


Citadel Plus


病患安置——準備

1

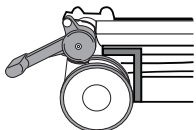

使用腳輪煞車。

2

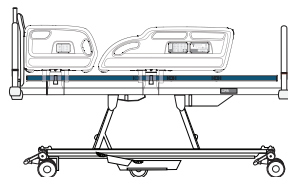


使病患的平面水平。

3




將病床調整至舒適的工作高度。

4

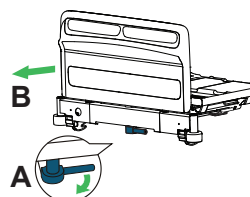

請視需要延伸床架與床板。

5

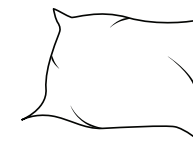


放上枕頭、毯子以及其他設備。

6




按下「歸零」按鈕，將稱重磅秤重設為零。

7

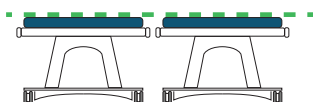


調整病患所處的高度，使其與病患要轉移到的平面等高。

8

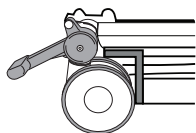


使用所有裝置上的腳輪煞車。

9

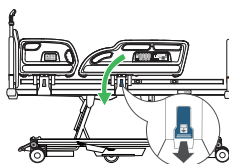


降下床邊護欄。

10

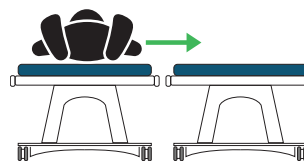


將病患轉位時，請遵守所有適用之安全規定與機構協議。

11

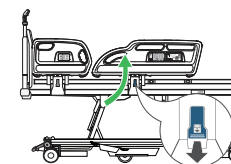

升起並鎖住床邊護欄。

對病患進行稱重


 不能用於藥物用量稱重



請視需要對病患進行稱重。


病患安置——完成

1




按下「臥床」或「離床警報」按鈕，以啟用與設定 VariZone 病患移動偵測系統的靈敏度。

2




讓病床處於令病患感到舒服的最低可行高度。

3

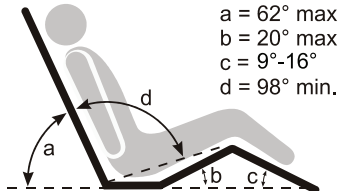

讓病床處於使病患感到舒服所需的角度的。


4



依照需求將病床功能上鎖。


從病床轉位病患

1

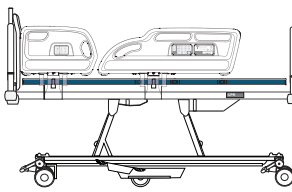


使病患的平面水平。

2

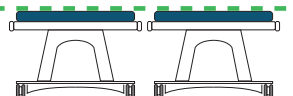


調整病患所處的高度，使其與病患要轉移到的平面等高。

3

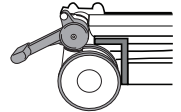


使用所有裝置上的腳輪煞車。

4

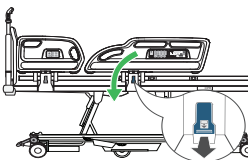


降下床邊護欄。

5

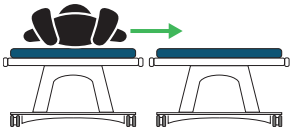

將病患轉位時，請遵守所有適用之安全規定與機構協議。


6



如果病患無法返回：
- 拔除電源插座
並按下電池電源按鈕。
- 禁用電池電源並關閉所有功能。


運送病患

1

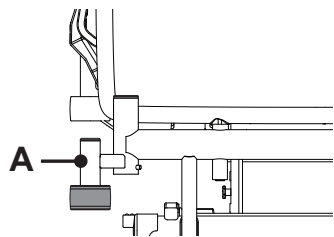

如有需要，將病患的靜脈治療置於靜脈注射竿上。

2

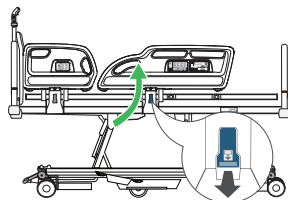


升起並鎖住床邊護欄。

3




運送前，請推入所有的寬度延伸墊。

4

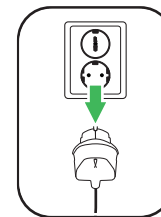


拔除牆上電源插座的電源插頭。

5

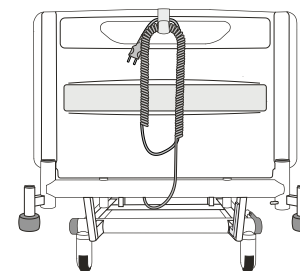

將電源線纏繞在床頭的托架上。

6

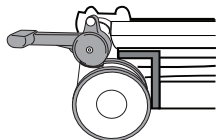


釋放腳輪制動器。

7




使用電力傳動輔助轉位。

8

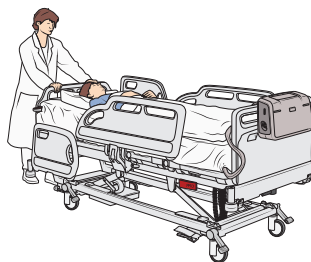

將病患轉位時，請遵守所有適用之安全規定與機構協議。

9

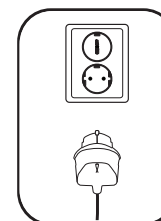

完成病患轉位後將電源插頭插入牆上插座。

