

# Maxi Sky 2 PLUS



## El kontrolü




- Yukarı Düğmesi
- Aşağı Düğmesi
- Yatırma Düğmesi
- Oturma Düğmesi
- Programlama/Bilgi Düğmesi

### Eğim işlevi

Hastayı dik veya yatık pozisyona getirmek için Yatırma ve Oturma düğmesini kullanın. Cihaz, hastanın pozisyonu ayarlanırken yalnızca birincil tavan liftini etkinleştirir. Hangi hasta pozisyonlandırma düğmesine basıldığından bağımsız olarak, yalnızca “ayak ucu” taşıma kolu yükselir veya alçalır.

## Kontrol paneli

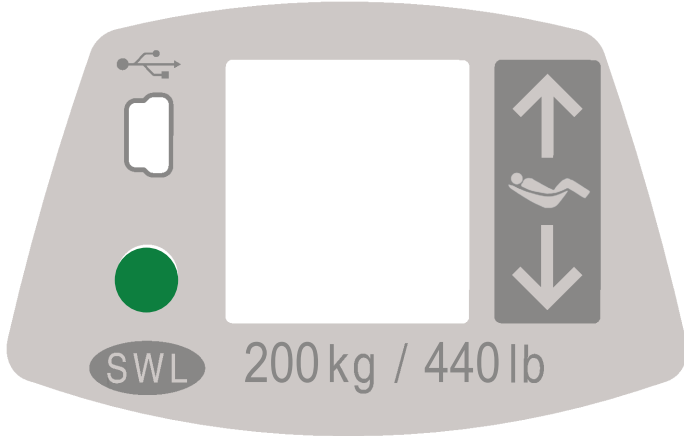

### Yardımcı Yukarı-Aşağı Düğmesi

El kontrolüyle ilgili bir sorun olması halinde transferi tamamlamak için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın.



### Durum LED'i

LED ışık, ekranda görüntülenen bir mesaja dikkat çekmek için kullanılan bir gösterge unsurudur.



### Güvenli Çalışma Yüğü (SWL)

Etiket, liftin güvenli çalışma yükünü gösterir.



### USB Erişim Portu

USB portu sadece MAXISMART kullanıcıları içindir.

## Ekran sembolleri



### Batarya Şarj Seviyesi



100%



75%

Normal çalışma aralığı



50%



25%

Düşük

Bir düğmeye basıldığında kısa bir bip sesi eşlik eder.



< 5%

Kritik

Her 10 saniyede iki kısa bip sesiyle birlikte simgeler dönüşümlü olarak görüntülenir



### Enhanced Charging System (ECS) Göstergesi

Üniteleri ECS ile şarj ederken gösterilir.



### Aşırı Çalışma Döngüsü

Liftin soğuması beklenmeden çok uzun bir süre boyunca kullanıldığında yanıp söner.

Bir işlev çalışma döngüsünü aştığında aşırı ısınma koruması devreye girer ve tüm diğer işlevler etkin kalırken döngüyü aşan işlev devre dışı bırakılır.

Soğutma işlemi devam ederken kırmızı ışık yanmaya devam eder ve tek bir bip sesi duyulur.

Sembol, işlev soğuduğunda ve kullanıma yeniden hazır hale geldiğinde söner.



### Genel Arıza (Sayısal bir karakter barındıran uyarı sembolü)

Lift bir arıza ile karşılaştığında yanıp söner.

Liftin, kalifiye bir servis teknisyeni tarafından incelenmesi veya onarılması gerekir.

Kırmızı ışık yanmaya devam eder ve tek bir bip sesi duyulur.



### Bakım Gerekli (Bir harf karakteri barındıran somun anahtarı sembolü)

Lift uyku modundan çıkarken 2 bip sesi ile birlikte 7 saniye boyunca görünür ve kullanıcının dikkatini çekmek için her 5 saniyede bir yanıp söner.

Bakım için Arjo servis merkezinizle temasa geçin.



### Aşırı Ağırlık

Liftin kapasitesini aşan bir yükü transfer yapılmaya çalışıldığında yanıp söner.


Hasta indirilene kadar kırmızı ışık 4 hızlı bip sesi eşliğinde yanmaya devam eder.

Diğer tüm işlevler etkin kalırken işlev devre dışı bırakılır.

## İkili ve Tekli mod


### Tekli Mod

Kilosu en fazla 159 kg (350 lb) olan hastalar

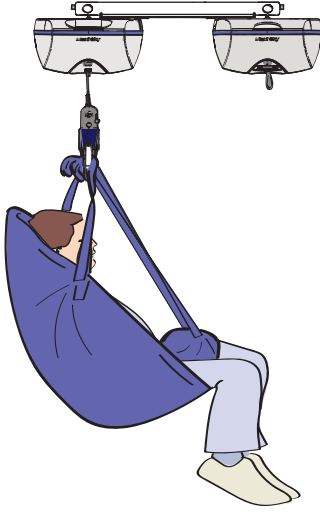

### İkili Mod

Kilosu 159 ile 454 kg (350-1000 lb) arasında olan hastalar

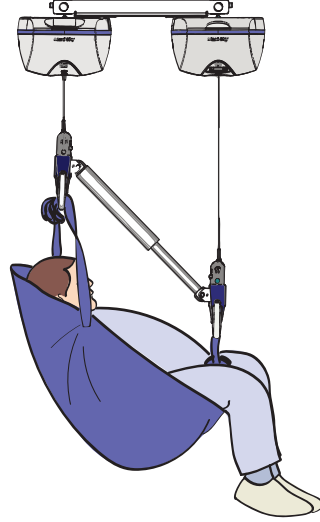


Maxi Sky 2 Plus tavan lifti İkili veya Tekli Modda çalışacak şekilde ayarlanabilir.

İkili Mod bariatrik hastalar için, Tekli Mod ise bariatrik olmayan hastalar için kullanılır.

Tekli Mod veya İkili Mod kullanımı hastanın ağırlığına bağlıdır.

## Kırmızı kordon ile acil durdurma

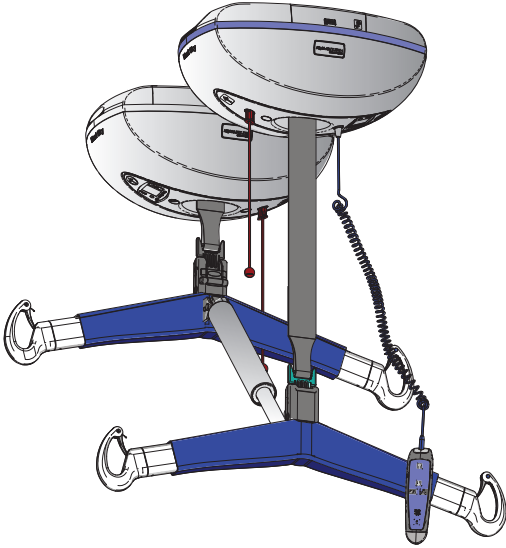

Acil durdurma, tavan liftlerini tamamen devreden çıkarır.

Kırmızı kordonlardan herhangi birini çektiğinizde her iki tavan lifti de hareket etmeyi keser ve ekranları ile göstergeleri kapanır.

Cihaz gövdesinden küçük kırmızı bir kılavuz çubuk çıkar.

### Tavan Liftini Yeniden Etkinleştirmek için

Her iki kırmızı kılavuz çubuğu da yukarı itin.

Tavan lifti, ekranda batarya sembolü veya ECS sembolü görüntülendiğinde kullanıma hazır olur.


## Acil durum freni

Mekanik arıza gibi bir durumda, tavan lifti, indirme işlevini engelleyen otomatik bir fren sistemine sahiptir.

Not: Acil durumda alçaltma mekanizması çalışmaz. Tavan liftini indirip hastayı liftten almak için acil durum prosedürlerini başlatın.

# Acil durumda alçaltma mekanizması

1

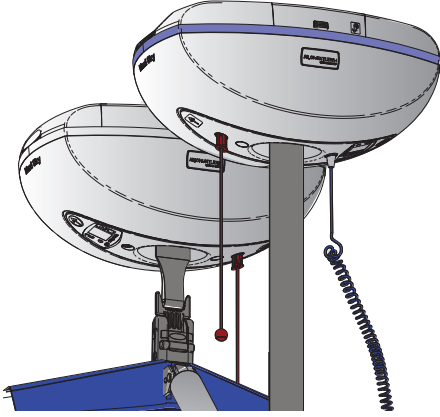


Acil durumda alçaltma mekanizması hastayı bir sandalyeye, yatağa veya tekerlekli sandalyeye güvenli bir şekilde indirmenizi sağlar. Yalnızca acil bir durumda kullanılır.

## Acil Durumda Alçaltma Prosedürü


Acil durdurma kordonlarından birini çekin.

2

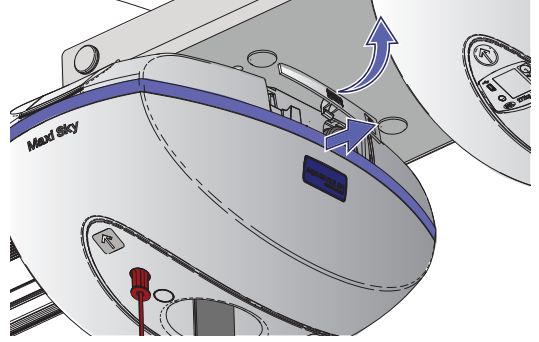


Tavan liftlerinin indirme mekanizmasına erişmek için küçük kapakları açın.

3

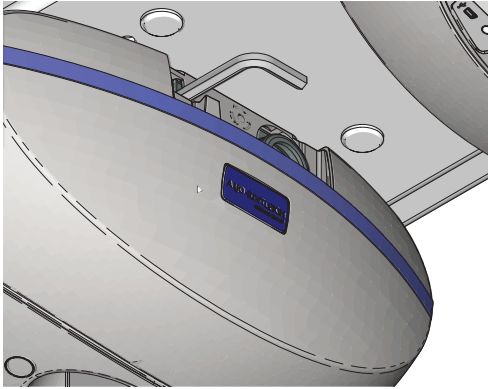

8 mm alyan anahtarlarını çekerek çıkarın.

4

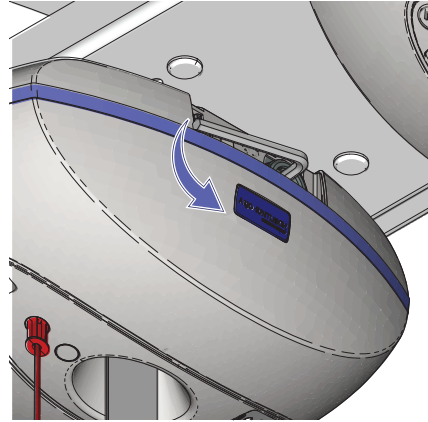

Alyan anahtarını aksenin tam oturtarak yerleştirin. Hastayı yavaşça indirmek için alyan anahtarını saat yönünün tersine çevirin. Bunu, her iki tavan lifti için de yapın. Hasta indirilip sandalyeye, yatağa veya tekerlekli sandalyeye yerleştirildikten sonra, tavan liftini kontrol etmesi için kalifiye bir teknisyen çağırın.

