

Maxi Sky 2 PLUS



AVERTISMENT



Pentru a evita afectarea ochilor sau a pielii, purtați întotdeauna ochelari și mănuși de protecție. Dacă intrați în contact cu dezinfectantul, clătiți cu apă din abundență. Dacă vi se irită ochii sau pielea, consultați medicul.

Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare și fișa de date de siguranță pentru dezinfectant.

Agenti de dezinfectare permisi	Bază cuaternară de amoniu ≤ 0,21% (2.100 ppm)	Alcool izopropilic ≤ 70%	Compuși fenolici ≤ 1,56% (15.600 ppm)	Clor ≤ 1% (10.000 ppm)	Acid peracetic ≤ 0,25% (2.500 ppm)	Apă oxigenată ≤ 1,5%
Modelul standard (curea țesută din nailon și bară de întindere cu pernuțe)	X	X	X			
Modelul Infection Control (curea cu înveliș de protecție și bară de întindere fără pernuțe) *	X	X	X	X	X	X
Alte accesorii **	X	X	X	X	X	X

* Anumite părți ale barei de întindere se pot decolora după contactul repetat cu clorul, acidul peracetic sau apa oxigenată.

** Cablul telecomenzii se poate înnegri ușor după contactul repetat cu clorul sau apa oxigenată.

Curățați și dezinfectați înainte de pacienții noi.

Accesorii necesare:

- mănuși și ochelari de protecție;
- lavetă de unică folosință.

Curățarea

1. Cu ajutorul unei lavete înmuiate în apă, îndepărtați reziduurile excesive de pe elevator și accesoriiile acestuia, de sus până jos.
2. Folosiți o lavetă umedă și apă caldă cu un lichid de curățare.
3. Frecați echipamentul de sus până jos, îndepărtând toate depunerile.
4. Folosiți o lavetă umedă curată și apă curată pentru a șterge toate urmele de lichid de curățare.
5. Ștergeți apoi cu o lavetă uscată.

Zonele indicate sunt cele mai predispuse să conțină murdărie și microbi; acordați atenție specială următoarelor zone:

- marginea telecomenzii;
- spatele și mânerul telecomenzii;
- îmbinarea între bara de întindere și curea;
- cadrul și carcasa barei de întindere;
- cablul de urgență;
- cureaua.

Dezinfectarea

6. Ștergeți aparatul Maxi Sky 2 Plus și accesoriiile sale folosind o soluție care conține unul dintre dezinfectanții compatibili.
7. Metodele de dezinfectare trebuie să respecte reglementările locale sau naționale, în funcție de instituția medicală sau de țara de utilizare. În caz de incertitudine, contactați specialistul local pentru prevenirea infecțiilor.

