



Riempimento automatico

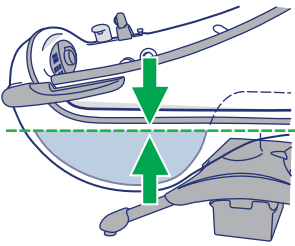


Premere il pulsante di riempimento automatico. Il riempimento si arresta automaticamente al livello d'acqua adeguato.

Premere nuovamente il pulsante di riempimento automatico per continuare il riempimento per 60 secondi.

Il riempimento può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il pulsante di riempimento automatico.

Doccetta




Premere per attivare la funzione doccia.

Premere per regolare il flusso d'acqua

Premere per bloccare il flusso d'acqua

Sbloccare premendo il grilletto.


Display temperatura

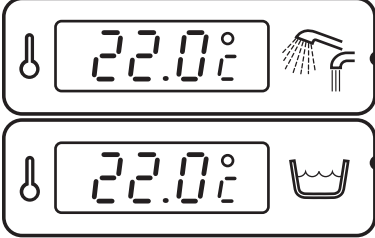

Mostra la temperatura della miscela disinfettante, di riempimento o della doccia attiva.

Mostra l'attuale temperatura dell'acqua nella vasca.

Protezione antiscottature

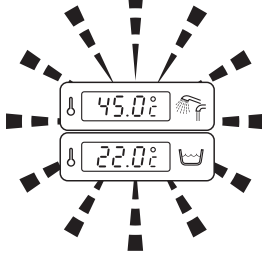


Il display della temperatura lampeggia e viene emesso un segnale acustico. L'acqua si arresta automaticamente dopo 10 secondi.

45 °C (113 °F)


Far uscire il paziente in sicurezza e interrompere l'uso della vasca.

Arresto di emergenza

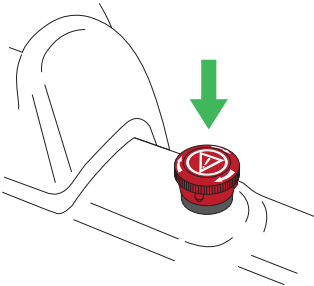


Premere il pulsante per arrestare tutte le funzioni. Ruotare in senso orario per sbloccare.

Blocco funzioni



Premere per bloccare tutte le funzioni eccetto la protezione antiscottature e l'arresto di emergenza. Premere di nuovo per sbloccare.

Blocco sportello

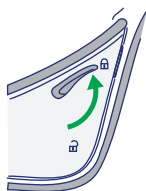

Blocco dello sportello della vasca.

Sblocco dello sportello della vasca.

Sistema idromassaggio (opzionale)



Vasca intera



Solo pozzetto






Premere per attivare l'idromassaggio e selezionare l'intensità.




Utilizzare per un massimo di 15 minuti.

Premere per spegnere.

Sistema Sound & Vision (opzionale)

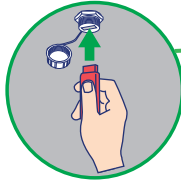


Svitare il tappo e inserire la chiavetta USB.

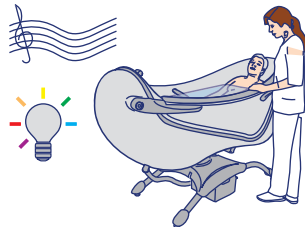


Usare la pulsantiera di controllo per regolare il suono e la luce.


Unità di disinfezione (opzionale)

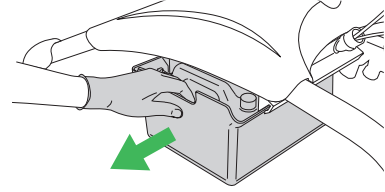


Il flacone di disinfettante è collocato tra le gambe della vasca.




La doccetta di disinfezione è situata dietro la cover.



Determinare il rapporto di miscelazione della disinfezione: spruzzare il disinfettante nella vasca mentre si controlla il flussometro all'interno della cover e regolare la manopola sul tubo di aspirazione se necessario.







Lampeggia quando il flacone di disinfettante è vuoto.