



Sara Combilizer




Sigurnosni pojasevi

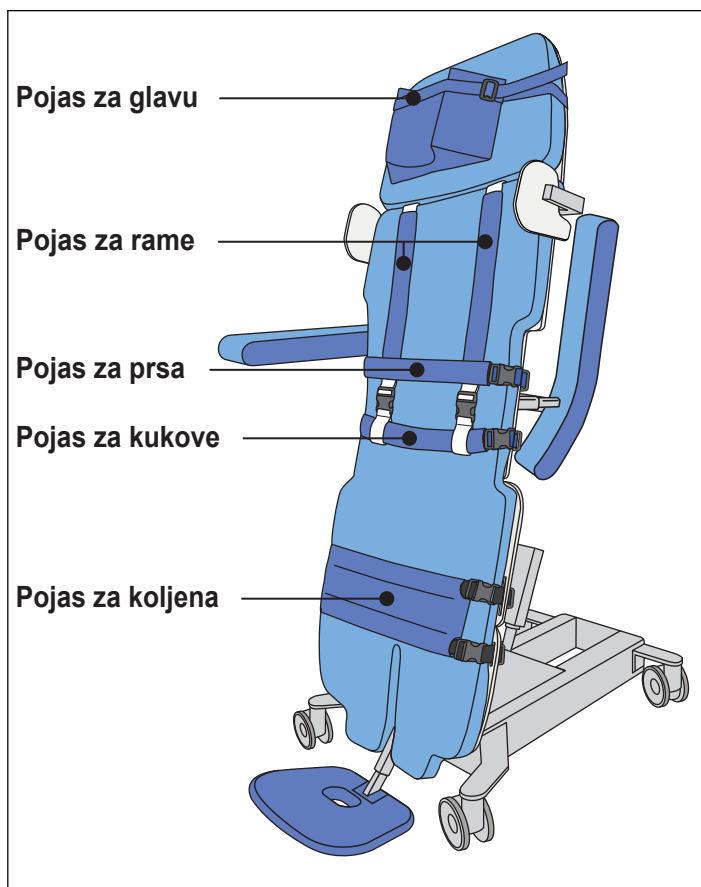


Pričvršćivanje pojasa na Sara Combilizer

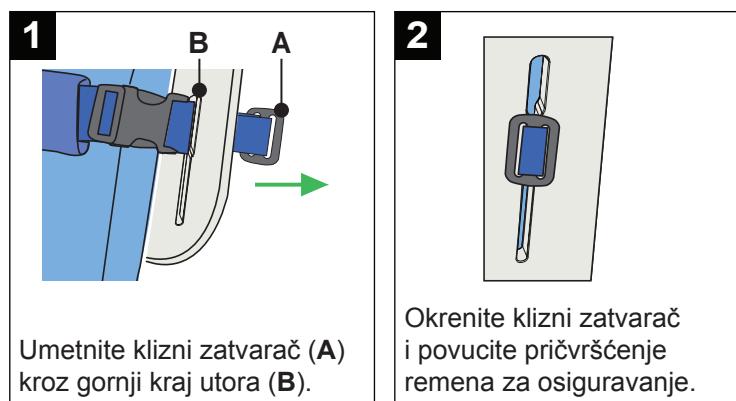


Skidanje pojasa s uređaja Sara Combilizer

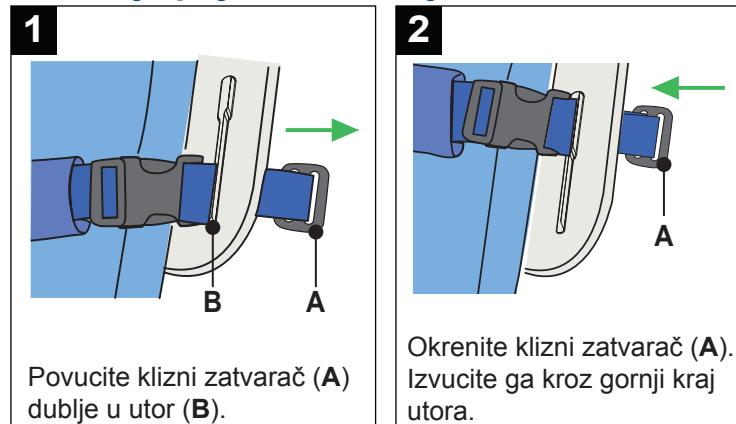


Zakopčavanje sigurnosnog pojasa

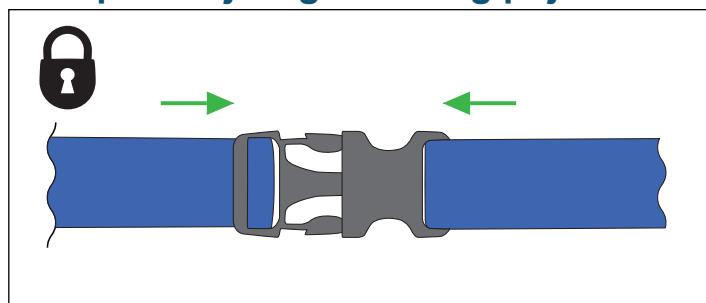


Otkopčavanje sigurnosnog pojasa

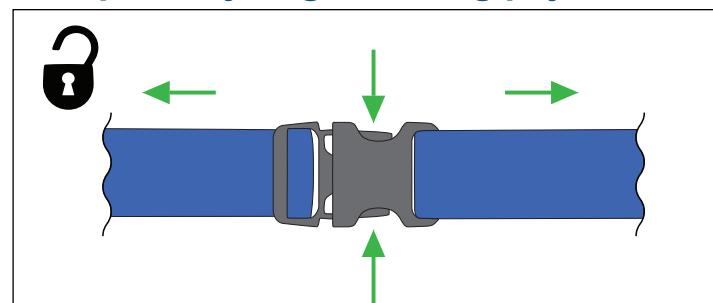

Zatezanje sigurnosnog pojasa

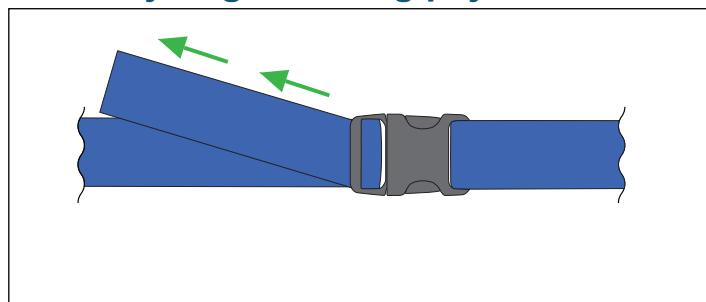


Otpuštanje sigurnosnog pojasa

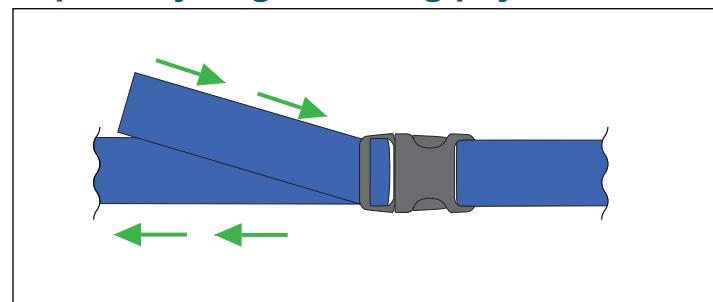

Pričvršćivanje sigurnosnih pojaseva na pacijenta

1 Pojas za prsa

Plavi pričvrsni remen
Dvije sigurnosne kopče (A)


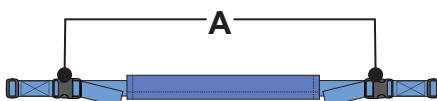


Položaj remena ispod pacijentovih ruku.

Zakopčajte sve sigurnosne kopče.
Nemojte previše pritegnuti remen.

2 Pojas za kukove

Plavi pričvrsni remen
Dvije sigurnosne kopče (A)

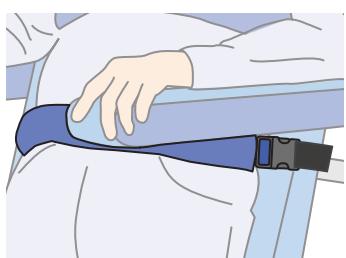
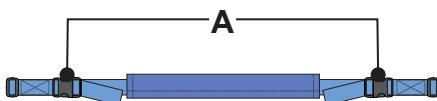


Položaj remena oko područja pacijentovih kukova.

Zakopčajte sve sigurnosne kopče.
Nemojte previše pritegnuti remen.

3 Pojas za koljena


Crne pričvrsni remeni
Četiri sigurnosne kopče (A)

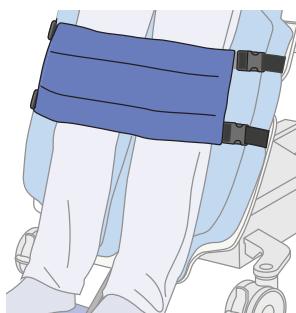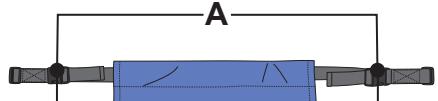


Postavite remen preko pacijentovih čašica koljena. Zakopčajte sve sigurnosne kopče.

4 Pojas za rame

Bijeli pričvrsni remen
Dva klizna zatvarača (A)
Dvije sigurnosne kopče (B)
Dvije petlje (C)

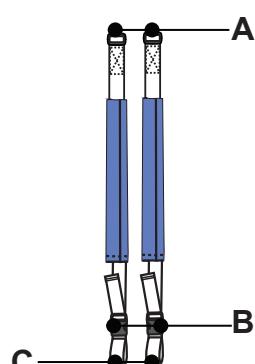

5 Pojas za rame

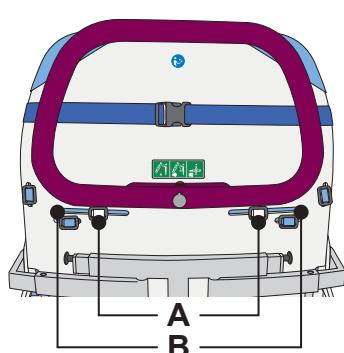

Umetnите dva klizna zatvarača (A) kroz gornje uteore (B).


6 Pojas za rame



Postavite pojaseve preko pacijentovih ramena i ispod pojasa za prsa (A).
Otkopčajte i umetnite sigurnosni pojaz za kukove (B) kroz krajne petlje (C) pojaseva za ramena.

7 Pojas za glavu

Jedna sigurnosna kopča (A)
Dva klizna zatvarača (B)

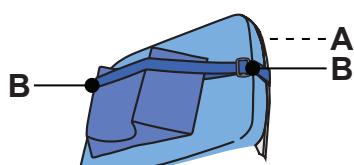

8 Pojas za glavu



Zakopčajte remen na stražnji dio madraca (A). Povucite remen kroz klizni zatvarač (B) s obje strane jastuka.

9

