



Sara Combilizer




Sangles de sécurité

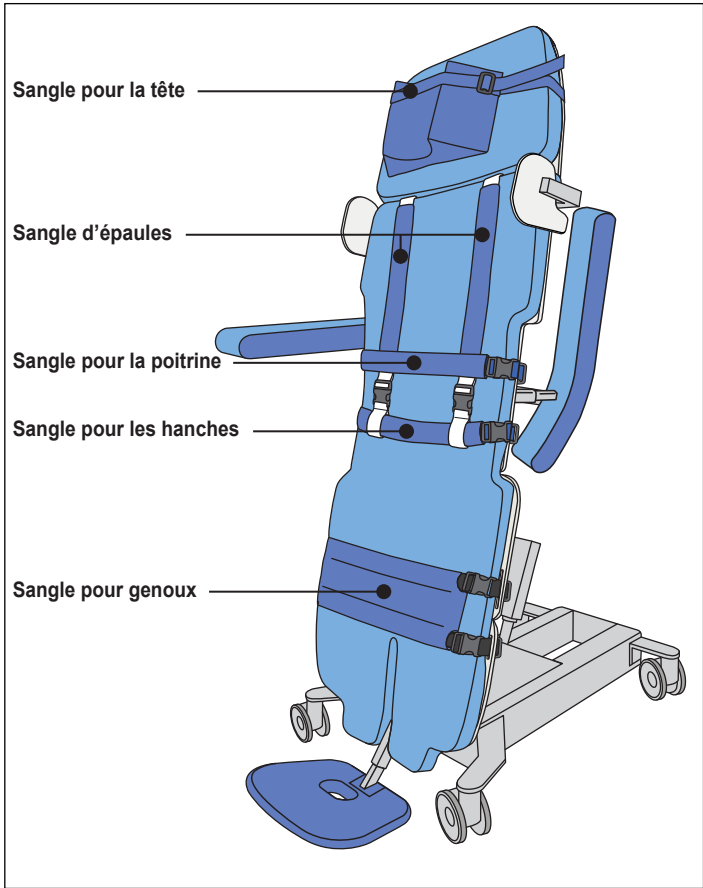


Fixer la sangle au Sara Combilizer

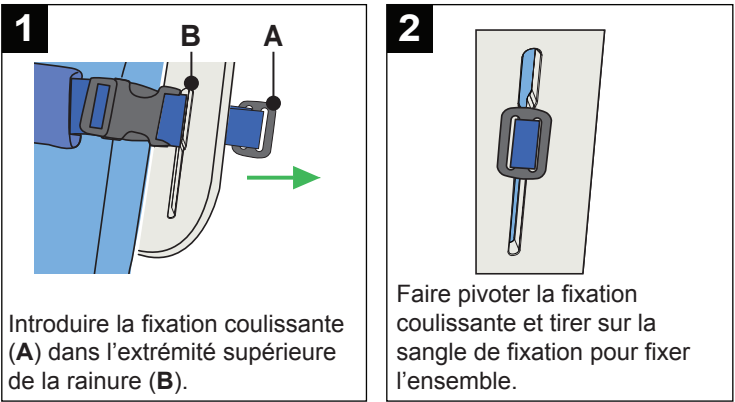


Retirer la sangle du Sara Combilizer

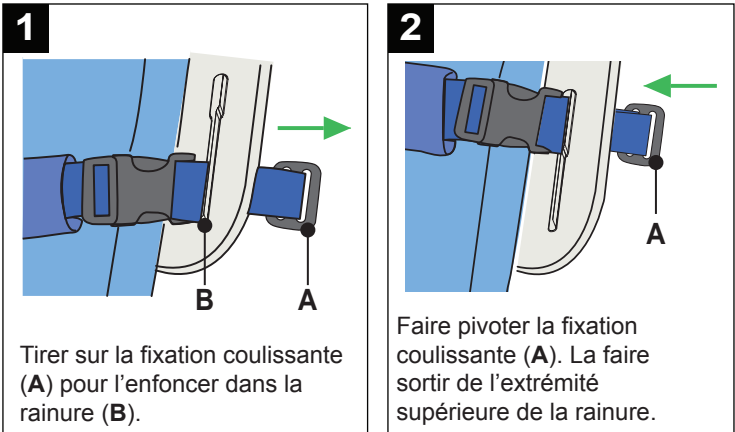


Boucler la sangle de sécurité

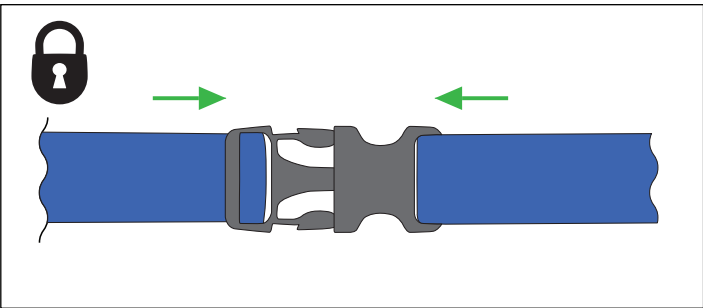


Ouvrir la sangle de sécurité

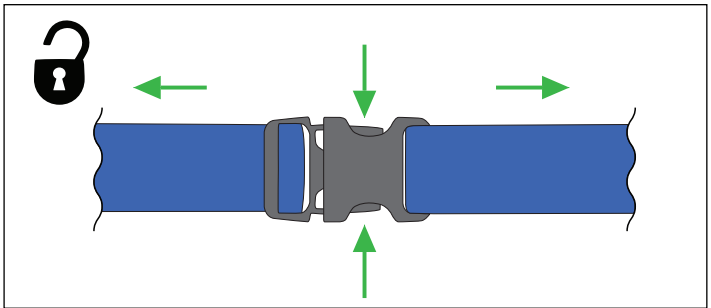

Serrer la sangle de sécurité

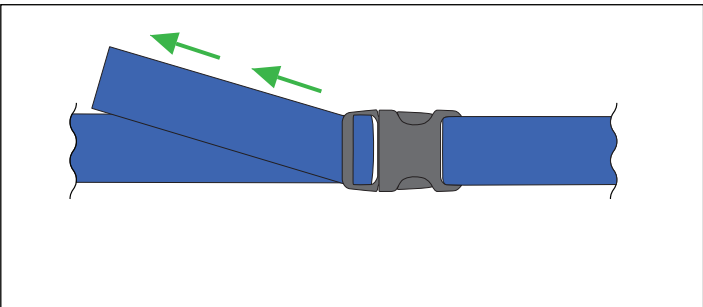


Desserrer la sangle de sécurité

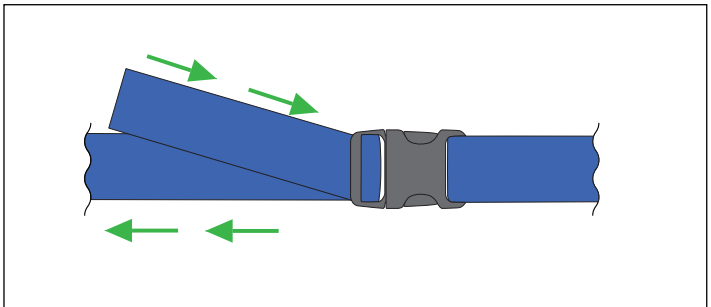



Fixer les sangles de sécurité au patient

- 1 Sangle pour la poitrine**
Sangles de fixation bleues
Deux boucles de sécurité (A)

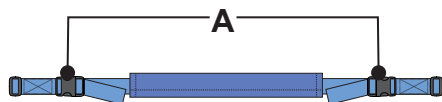



Positionner la sangle sous les bras du patient.
Fixer toutes les boucles de sécurité.
Ne pas trop serrer les sangles.

- 2 Sangle pour les hanches**
Sangles de fixation bleues
Deux boucles de sécurité (A)

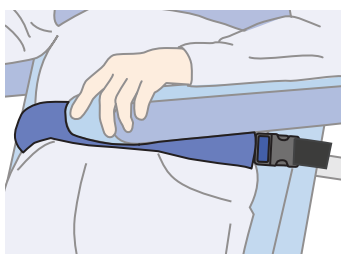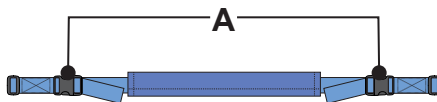


Positionner la sangle sur la zone des hanches du patient.
Fixer toutes les boucles de sécurité.
Ne pas trop serrer les sangles.

- 3 Sangle pour genoux**
Sangles de fixation noires
Quatre boucles de sécurité (A)

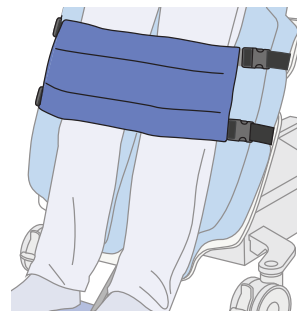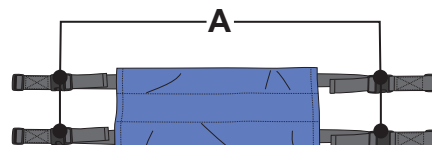


Positionner la sangle au-dessus des rotules du patient. Fixer toutes les boucles de sécurité.

- 4 Sangle d'épaules**
Sangles de fixation blanches
Deux fixations coulissantes (A)
Deux boucles de sécurité (B)
Deux boucles (C)

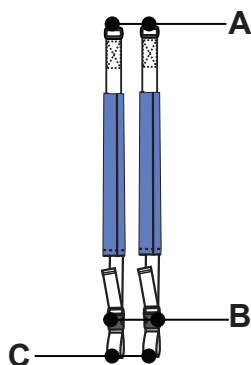

- 5 Sangle d'épaules**

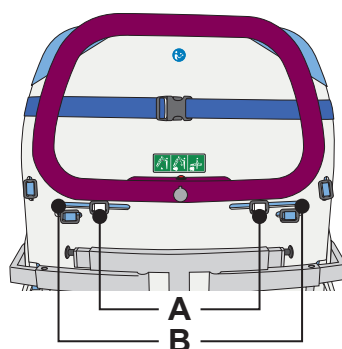


Insérer les deux fixations coulissantes (A) dans les extrémités supérieures (B).

- 6 Sangle d'épaules**



Positionner les sangles sur les épaules du patient et sous la sangle de poitrine (A).
Desserrer et insérer la sangle de sécurité pour les hanches (B) à travers les boucles d'extrémité (C) des sangles d'épaules.

- 7 Sangle pour la tête**
Une boucle de sécurité (A)
Deux fixations coulissantes (B)

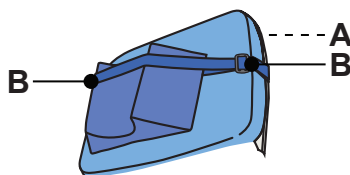

- 8 Sangle pour la tête**



Attacher la sangle à l'arrière du matelas (A).
Tirer la sangle à travers la fixation coulissante (B) des deux côtés du coussin de tête.

- 9**

