



# Sara Combilizer




## Biztonsági övek

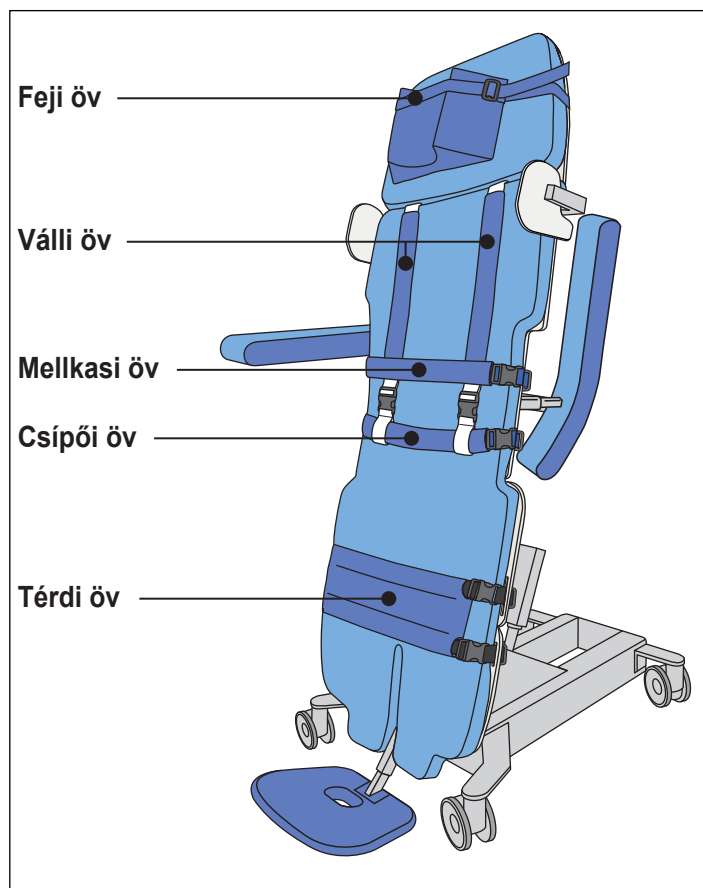


## Az öv rögzítése a Sara Combilizerhez

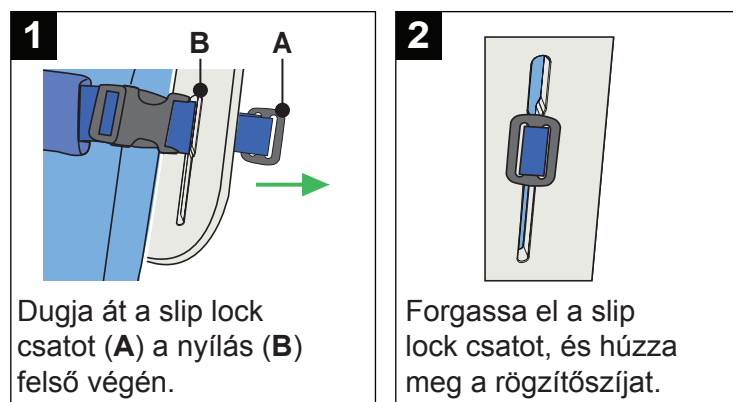


## Az öv eltávolítása a Sara Combilizerről

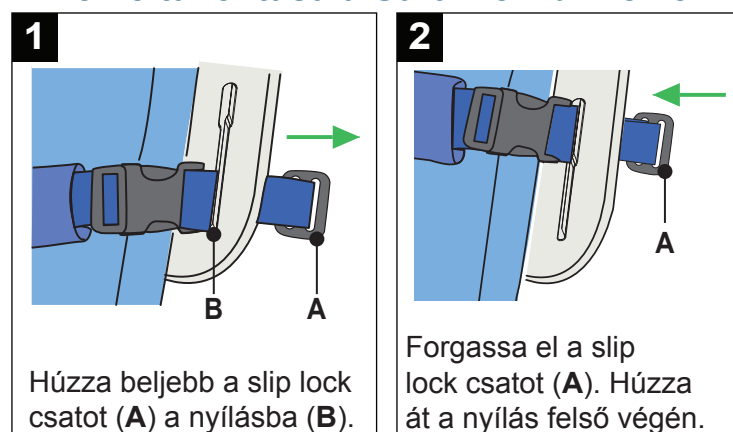


## A biztonsági öv becsatolása

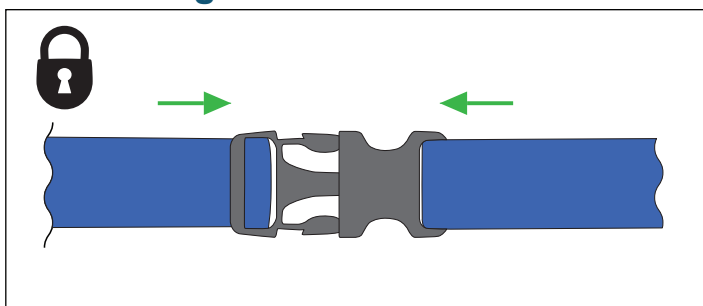


## A biztonsági öv kicsatolása

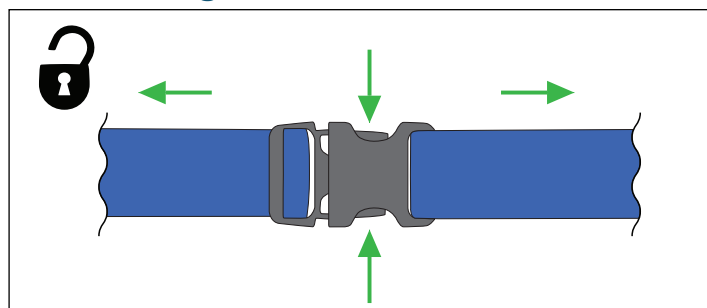

## A biztonsági öv megfeszítése

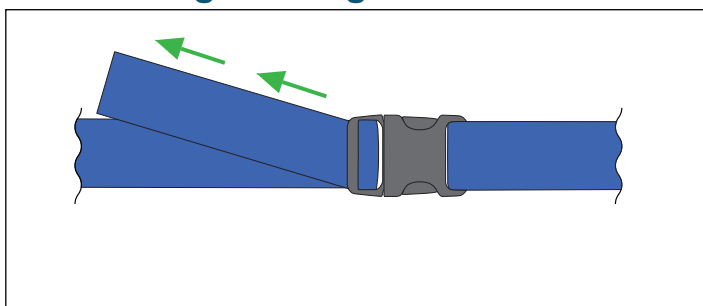


## A biztonsági öv meglazítása

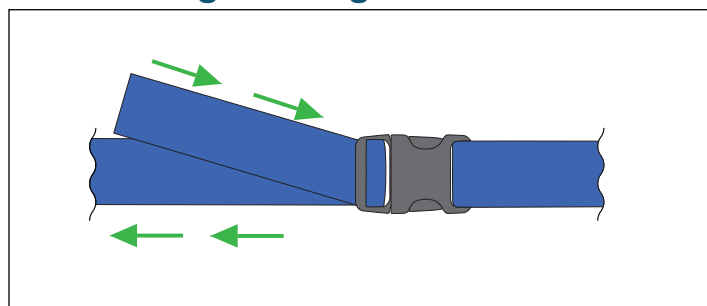

## A biztonsági övek beteg testéhez való rögzítése

### 1 Mellkasi öv

Kék rögzítőszíjak  
Két biztonsági csat (A)

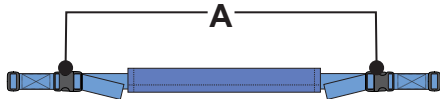



Helyezze el az övet a beteg karja alatt.

Csatolja be az összes biztonsági csatot.

Ne húzza túl szorosra az övet.

### 2 Csípői öv

Kék rögzítőszíjak  
Két biztonsági csat (A)

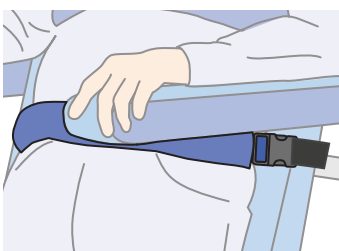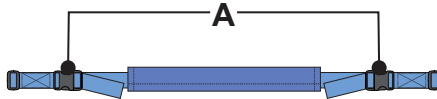



Helyezze el az övet a beteg csípőjénél.

Csatolja be az összes biztonsági csatot.

Ne húzza túl szorosra az övet.

### 3 Térdi öv


Fekete rögzítőszíjak  
Négy biztonsági csat (A)

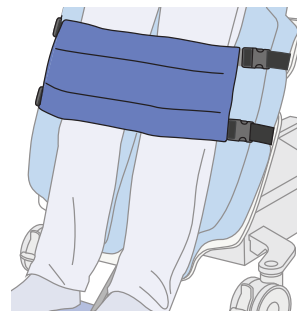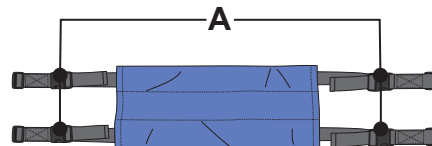


Helyezze el az övet a beteg térdkalácsánál. Csatolja be az összes biztonsági csatot.

### 4 Vállí öv

Fehér rögzítőszíjak  
Két slip lock csat (A)  
Két biztonsági csat (B)  
Két hurok (C)

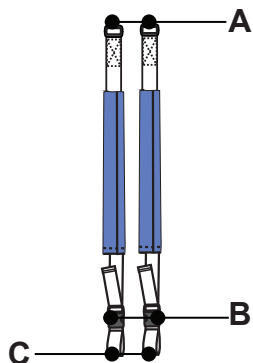

### 5 Vállí öv

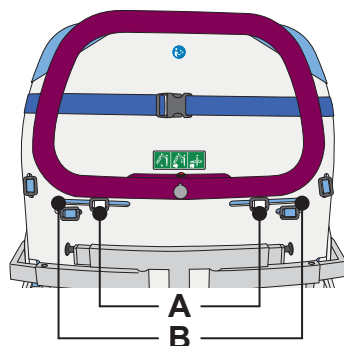

Dugja át a két slip lock csatot (A) a felső nyílásokon (B).

### 6 Vállí öv




Helyezze el az öveket a beteg vállán és a mellkasi öv (A) alatt.

Csatolja ki a csípői biztonsági övet (B) és fűzze át a vállí övek záróhurkán (C).

### 7 Feji öv

Egy biztonsági csat (A)  
Két slip lock csat (B)

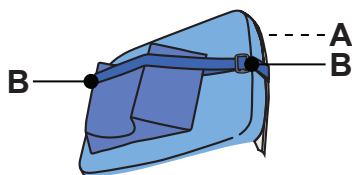

### 8 Feji öv



Csatolja be az övet a matrac hátoldalán (A). Húzza át az övet a párna két oldalán található slip lock csaton (B).

### 9

