



# Sara Combilizer




## Cintos de segurança

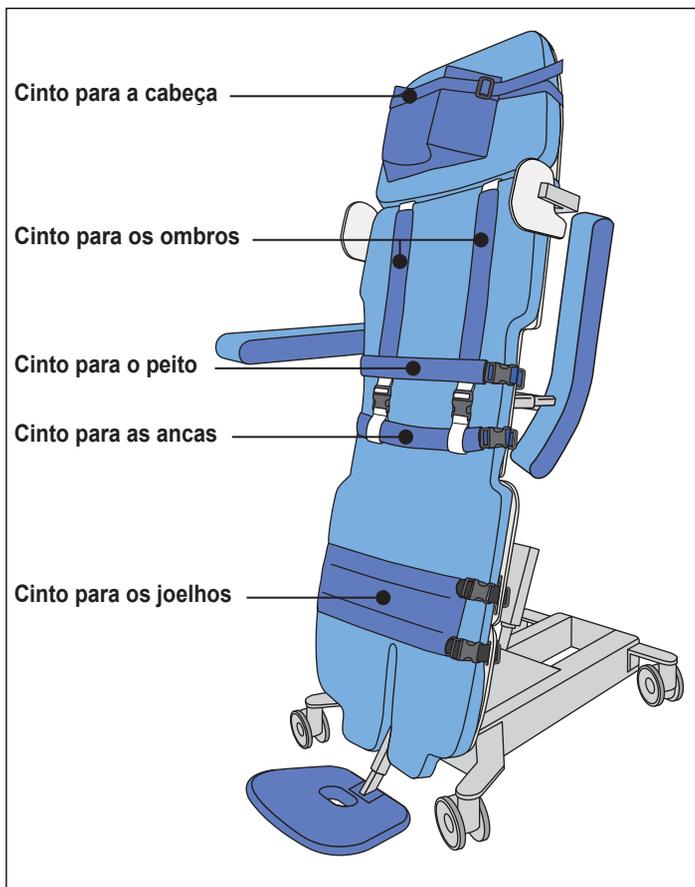


## Fixar o cinto ao Sara Combilizer

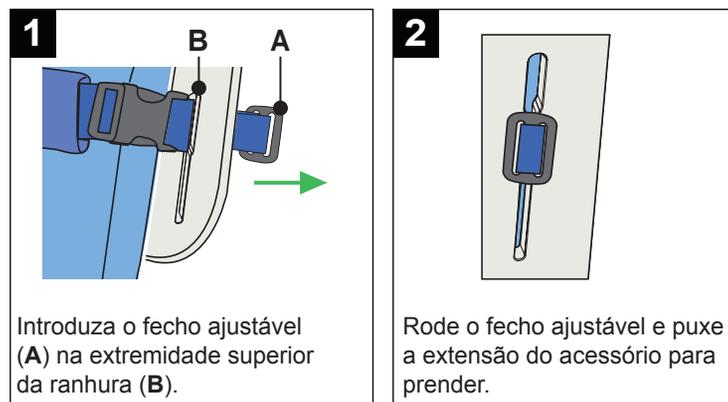


## Retirar o cinto do Sara Combilizer

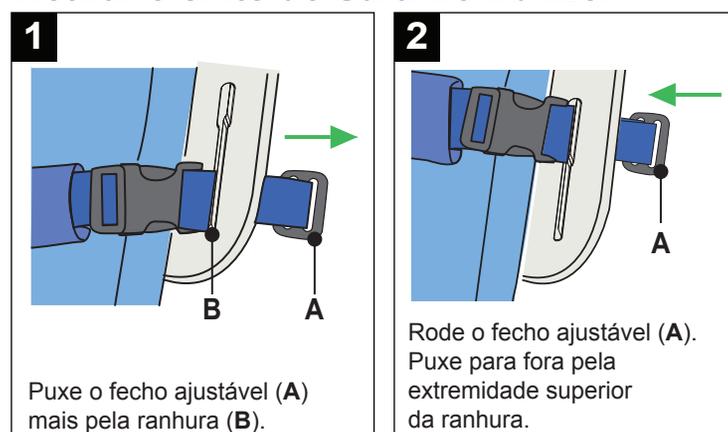


## Apertar a fivela do cinto de segurança

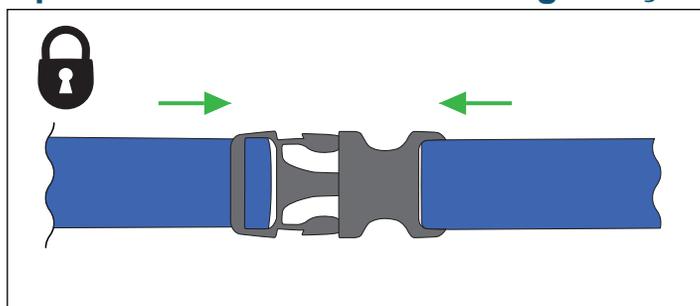


## Desapertar a fivela do cinto de segurança

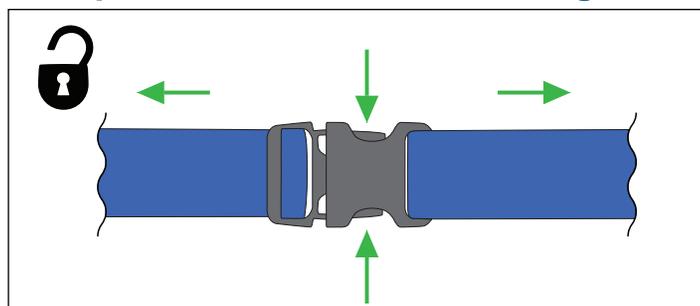

## Apertar o cinto de segurança

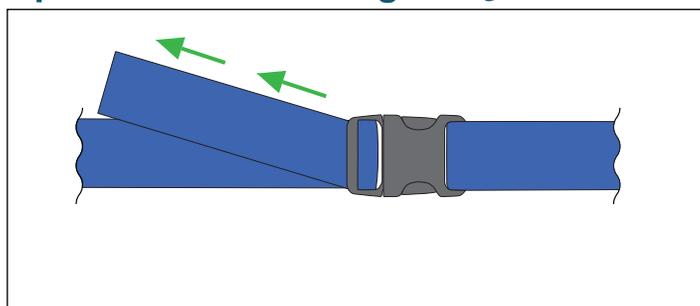

## Soltar o cinto de segurança

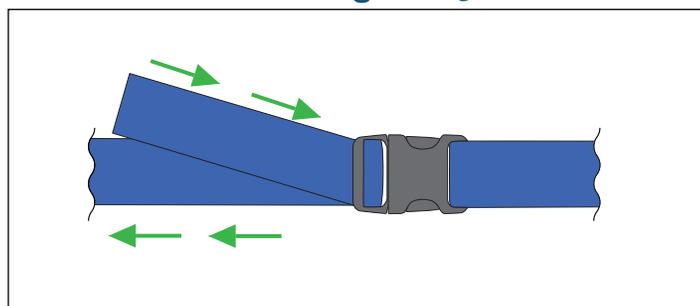

## Colocar os cintos de segurança no paciente

### 1 Cinto para o peito



Extensões do acessório azuis  
Duas fivelas de segurança (A)



Coloque o cinto por baixo dos braços do paciente.  
Aperte todas as fivelas de segurança.  
Não aperte o cinto excessivamente.

### 2 Cinto para as ancas


Extensões do acessório azuis  
Duas fivelas de segurança (A)

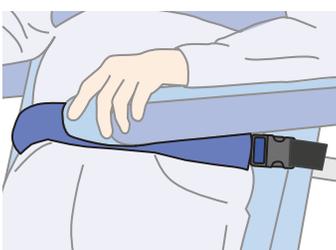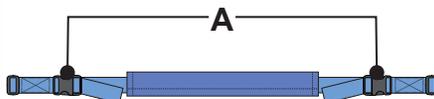

Coloque o cinto na zona das ancas do paciente.  
Aperte todas as fivelas de segurança.  
Não aperte o cinto excessivamente.

### 3 Cinto para os joelhos


Extensões do acessório pretas  
Quatro fivelas de segurança (A)

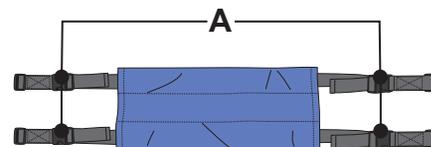


Coloque o cinto sobre as rótulas do paciente. Aperte todas as fivelas de segurança.

### 4 Cinto para os ombros

Extensões do acessório brancas  
Dois fechos ajustáveis (A)  
Duas fivelas de segurança (B)  
Duas argolas (C)

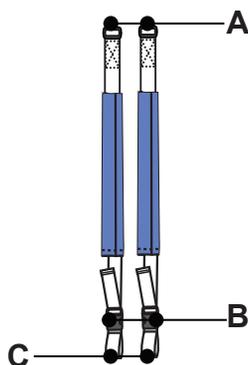

### 5 Cinto para os ombros

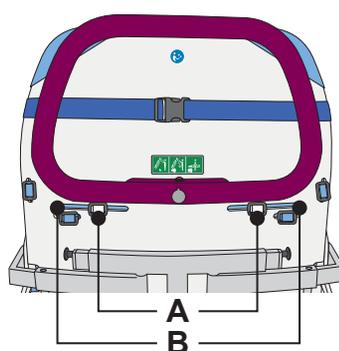

Introduza os dois fechos ajustáveis (A) nas ranhuras superiores (B).


### 6 Cinto para os ombros



Coloque os cintos sobre os ombros do paciente e abaixo do cinto para o peito (A).  
Desaperte a fivela do cinto de segurança das ancas (B) e passe-o pelas argolas terminais (C) dos cintos para os ombros.

### 7 Cinto para a cabeça

Uma fivela de segurança (A)  
Dois fechos ajustáveis (B)

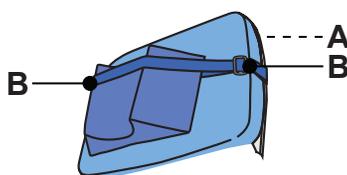

### 8 Cinto para a cabeça



Aperte a fivela do cinto na parte de trás do colchão (A). Puxe o cinto pelo fecho ajustável (B) em ambos os lados da almofada.

### 9

