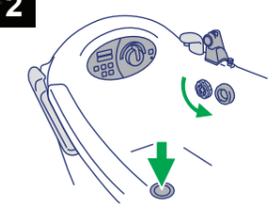
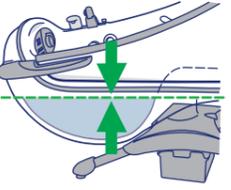


Pre-riempire il pozzetto

1  Accertarsi che la vasca sia in posizione verticale.

2  Chiudere lo scarico.

3   **Rischio di scottatura**
Premere il pulsante di riempimento automatico. Provare l'acqua con la mano nuda e regolare la temperatura se necessario.

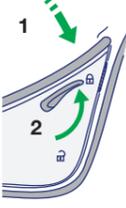
4  Il riempimento si ferma quando il pozzetto è pieno.

Far sedere il paziente

5  Aprire completamente lo sportello della vasca.

6  Regolare l'altezza della vasca in base al paziente.

7   **Rischio di caduta**
Aiutare il paziente a entrare nella vasca.

8   **Rischio di intrappolamento**
Chiudere e bloccare lo sportello della vasca.

Riempire la vasca

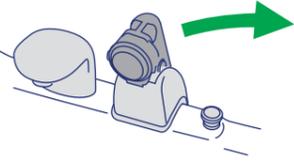
9  Inclinare la vasca.

10  Regolare l'altezza della vasca in base all'assistente.

11   Se è necessario aggiungere altra acqua, premere il pulsante di riempimento automatico.

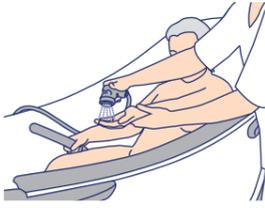
 **Rischio di scottatura**

Fare la doccia al paziente

12  Estrarre la doccetta.

13  Attivare il pulsante per doccia.

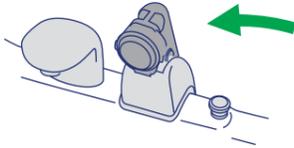
14   **Rischio di scottatura**
Premere il grilletto della doccetta.

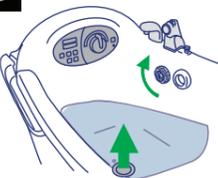
15  Far provare al paziente la temperatura dell'acqua. Se necessario, regolare la temperatura.

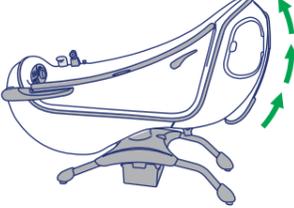
16  Fare la doccia al paziente.

Fine del bagno

17  Disattivare il pulsante per doccia.

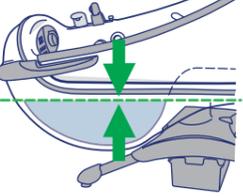
18  Rimettere la doccetta nell'apposito supporto.

19  Aprire lo scarico.

20   A intervalli, inclinare la vasca fino a riportarla in posizione verticale.

21  Mantenere il paziente al caldo usando la doccia o degli asciugamani.

22  Abbassare la vasca.

23  Accertarsi che il livello dell'acqua sia al di sotto dell'apertura dello sportello.

24  Aprire completamente lo sportello della vasca.

25   **Rischio di caduta**
Asciugare il paziente. Aiutare il paziente a uscire dalla vasca.