

Pré-remplissez le pédiluve

1

Vérifiez que la baignoire est en position assise.

2

Placez le bouchon sur la bonde.

3

Risque de brûlures

Appuyez sur le bouton de remplissage automatique. Mettez la main dans l'eau pour évaluer la température et ajustez-la si besoin.

4

Le remplissage s'arrête lorsque le pédiluve est rempli.

Asseyez le patient

5

Ouvrez entièrement la porte de la baignoire.

6

Réglez la hauteur de la baignoire par rapport au patient.

7

Risque de chute

Aidez le patient à s'installer dans la baignoire.

8

Risque de coincement

Fermez et verrouillez la porte de la baignoire.

Remplissez la baignoire

9

Inclinez la baignoire.

10

Réglez la hauteur de la baignoire par rapport au personnel soignant.

11

Risque de brûlures

Appuyez sur le bouton Remplissage automatique pour ajouter de l'eau si nécessaire.

Douchez le patient

12

Enlevez la douchette de son support.

13

Activez le bouton de la douche.

14

Risque de brûlures

Appuyez sur le bouton de la douchette.

15

Laissez le patient sentir la température de l'eau. Réglez la température, s'il y a lieu.

16

Lavez et douchez le patient.

Terminez le bain

17

Désactivez le bouton de la douche.

18

Remettez la douchette dans son support.

19

Ouvrez la bonde.

20

Risque de brûlures

Remettez la baignoire en position assise à intervalle régulier.

21

Gardez le patient au chaud à l'aide de la douche ou de serviettes.

22

Abaissez la baignoire.

23

Vérifiez que le niveau de l'eau se trouve sous l'ouverture de la porte.

24

Ouvrez entièrement la porte de la baignoire.

25

Risque de chute

Séchez le patient. Aidez le patient à sortir de la baignoire.