



Pré-enchêr a zona dos pés

1

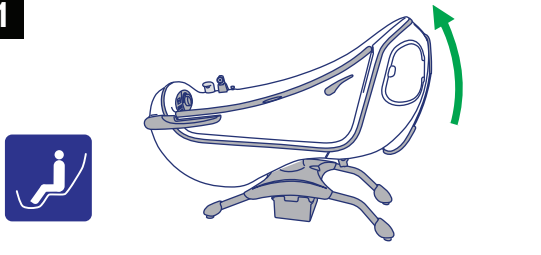


Certifique-se de que a banheira está na posição vertical.

2

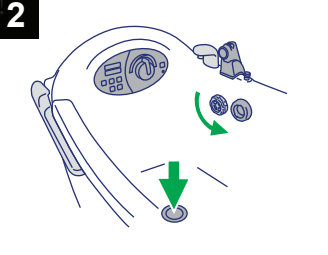

Feche o ralo.


3

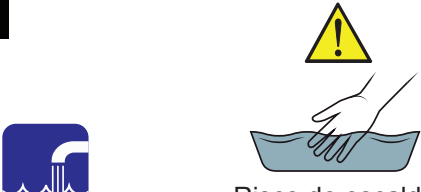

Risco de escaldão

Prima o botão de enchimento automático. Sinta a água com as mãos nuas e ajuste a temperatura, se necessário.

4

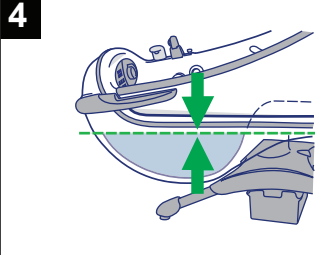

O enchimento para quando a zona dos pés estiver cheia.

Sentar o paciente

5



Abra totalmente a porta da banheira.

6



Ajuste a altura da banheira em função do paciente.

7



Risco de queda

Ajude o paciente a entrar na banheira.

8




Risco de aprisionamento

Feche e tranque a porta da banheira.


Encher a banheira

9




Recline a banheira.

10



Ajuste a altura da banheira em função do prestador de cuidados.

11

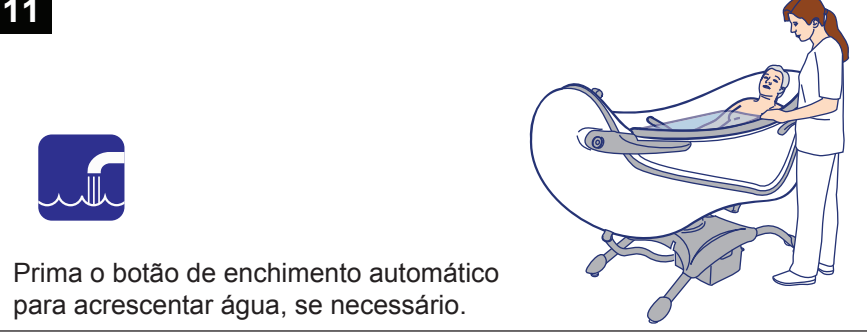


Risco de escaldão

Prima o botão de enchimento automático para acrescentar água, se necessário.


Dar duche ao paciente

12

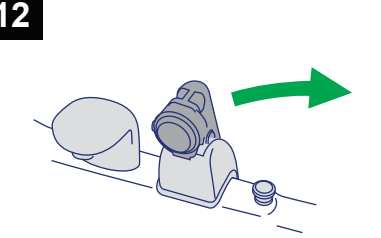


Levante o manípulo de chuveiro.

13

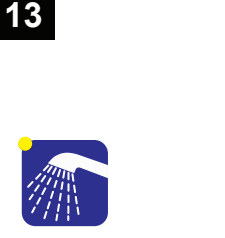

Ative o botão de duche.


14

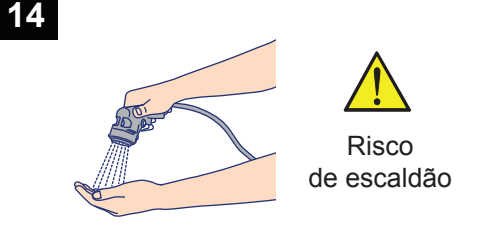

Risco de escaldão


Prima o gatilho do manípulo de chuveiro.

15

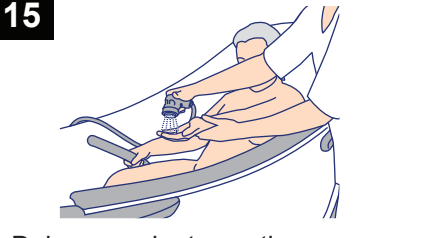

Deixe o paciente sentir a água. Ajuste a temperatura, se necessário.

16



Molhe e lave o paciente.

Terminar o banho

17



Desative o botão de duche.

18




Coloque o manípulo de chuveiro no suporte.

19



Abra o ralo.

20

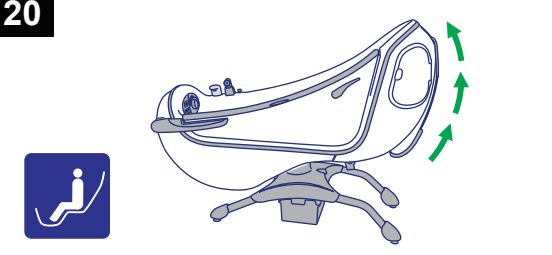

Com intervalos, incline a banheira para a posição vertical.

21



Mantenha o paciente quente, utilizando o chuveiro ou toalhas.

22



Baixe a banheira

23



Certifique-se de que a água está abaixo da abertura da porta.

24



Abra totalmente a porta da banheira.

25



Risco de queda

Seque o paciente. Ajude o paciente a sair da banheira.