



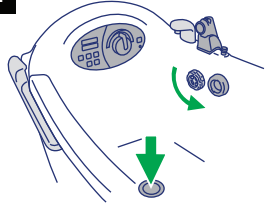
給擱腳空間注水

1



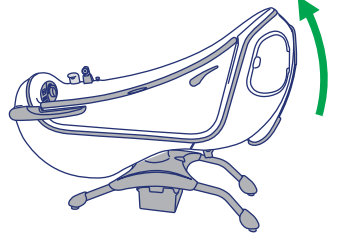

確保澡盆呈直立。

2



關閉排水管。


3



燙傷危險

按下自動注水按鈕。用手感覺一下水溫並在需要時進行調整。


4

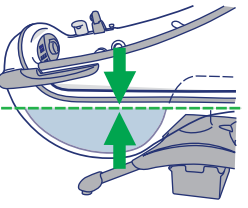

當擱腳空間注滿水時，將停止注水。


讓病患坐下

5

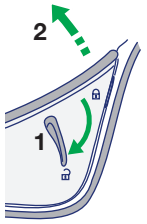



把浴缸門完全打開。

6



為病患調整浴缸高度。


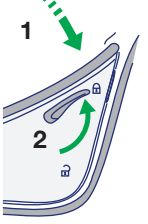
7



掉落危險

協助病患進入浴缸。

8




掉入危險

關上並鎖上浴缸門。


給浴缸注滿水

9





使浴缸傾斜。

10




為照護員調整浴缸高度。

11




若有必要，按下自動注水按鈕能為浴缸加水。



燙傷危險


幫病患淋浴

12

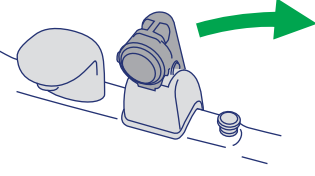


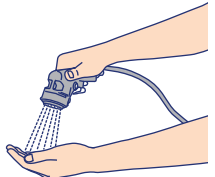
取下蓮蓬頭手柄。

13



打開淋浴按鈕。


14



燙傷危險


按下蓮蓬頭手柄觸發器。

15

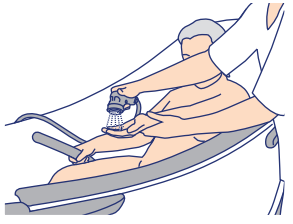

讓病患感受水溫。請視需要調整溫度。

16



幫病患洗澡。

結束沐浴

17



關閉淋浴按鈕。

18



將蓮蓬頭手柄放回手柄座。

19



打開排水管。

20



間或將浴缸傾斜至直立位置。

21



給患者沐浴或者蓋上毛巾以保暖。

22



降低浴缸。

23



確保水位低於門的開口。

24



把浴缸門完全打開。

25



掉落危險

擦乾病患。
協助病患離開浴缸。