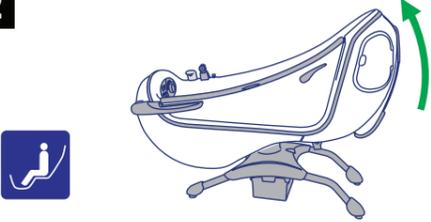
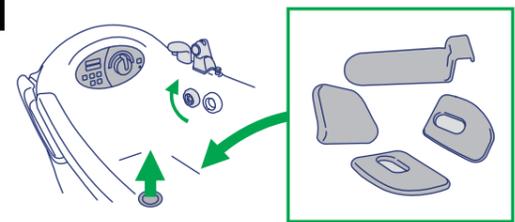
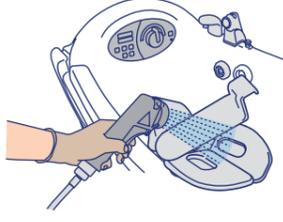
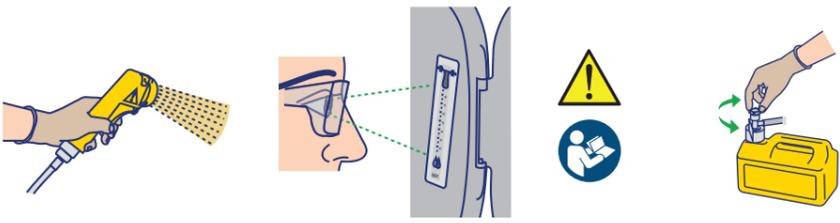


Disinfezione con doccetta integrata

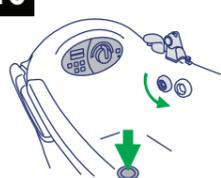
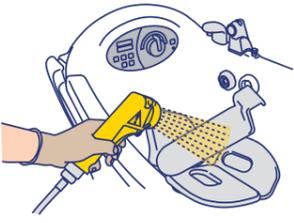
Rimuovere i residui visibili

- 1**  Indossare guanti e occhiali protettivi.
- 2**  La vasca deve trovarsi in posizione eretta con tutte le funzioni disattivate.
- 3**  Aprire lo scarico. Collocare tutti gli accessori sul fondo.
- 4**  Sciacquare con acqua per rimuovere i residui visibili.

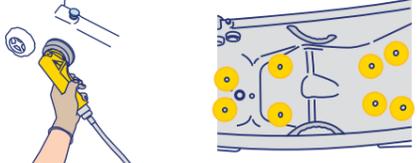
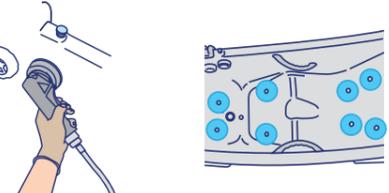
Determinare il rapporto di miscelazione del disinfettante

- 5**  Estrarre la doccetta di disinfezione.
- 6**  5 secondi
Attivare il pulsante per disinfezione.
- 7**  Spruzzare nella vasca finché il flussometro non mostra il corretto rapporto di miscelazione indicato dalle Istruzioni per l'uso. Se necessario, regolare la manopola sul tubo di aspirazione.
- 8**  Temperatura di miscelazione 20 °C (68 °F).

Pulire

- 9**  Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola.
 - 10**  Chiudere lo scarico.
 - 11**  Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne e su tutti i lati degli accessori.
 - 12**  Strofinare accuratamente le superfici interne e gli accessori.
- Per le vasche Parker senza idromassaggio, andare al punto 24.

Punti 13–23 solamente per idromassaggio

- 13**  Inclinare la vasca.
- 14**  Collocare la doccetta di disinfezione nell'ingresso. Ruotarla a sinistra o a destra per fissarla saldamente.
- 15**  Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve fuoriuscire il disinfettante per almeno 30 secondi.
- 16**  Rilasciare il grilletto e rimuovere la doccetta.
- 17**  Riporre la doccetta.
- 18**  5 secondi
Disattivare il pulsante per disinfezione.
- 19**  Collocare la doccetta nell'ingresso. Ruotarla a sinistra o a destra per fissarla saldamente.
- 20**  Attivare il pulsante per doccia.
- 21**  Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve fuoriuscire acqua pulita per almeno 30 secondi.
- 22**  Rimuovere la doccetta.
- 23**  Alzare la vasca in posizione eretta.

continua alla pagina successiva

24

Aprire lo scarico.

25

Temperatura dell'acqua 25 °C (77°F).

26

Risciacquare con acqua le superfici interne e gli accessori.

27

Disattivare il pulsante per doccia.

28

Immergere un panno nel disinfettante. Strofinare tutte le superfici esterne.

Disinfettare

29

Rimuovere ogni traccia di disinfettante con un panno pulito e acqua.

30

5 secondi

Attivare il pulsante per disinfezione.

31

Spruzzare il disinfettante nello scarico.

32

Chiudere lo scarico.

Punti 35–46 solamente per idromassaggio

33

Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne e su tutti i lati degli accessori.

34

Attendere il tempo di contatto appropriato per il disinfettante secondo le istruzioni sulla confezione.

Per le vasche Parker senza idromassaggio, andare al punto 47.

35

Inclinare la vasca.

36

Collocare la doccetta di disinfezione nell'ingresso. Ruotarla a sinistra o a destra per fissarla saldamente.

37

Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve fuoriuscire il disinfettante per almeno 30 secondi.

38

Rilasciare il grilletto e rimuovere la doccetta.

39

5 secondi

Disattivare il pulsante per disinfezione.

40

Riporre la doccetta.

41

Attendere il tempo di contatto appropriato per il disinfettante secondo le istruzioni sulla confezione.

42

Collocare la doccetta nell'ingresso. Ruotarla a sinistra o a destra per fissarla saldamente.

43

Attivare il pulsante per doccia.

44

Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve fuoriuscire acqua pulita per almeno 30 secondi.

45

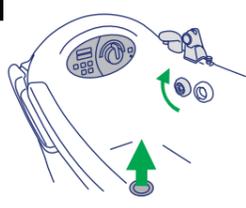
Rimuovere la doccetta.

46

Alzare la vasca in posizione eretta.

continua alla pagina successiva

47



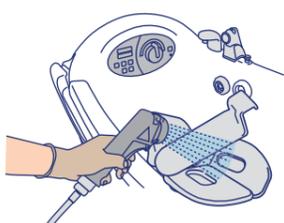
Aprire lo scarico.

48



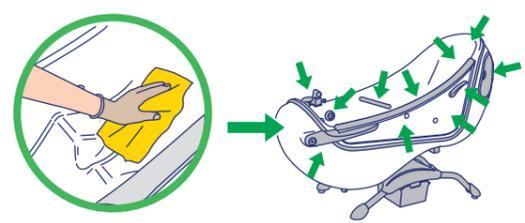
Attivare il pulsante per doccia.

49



Risciacquare con acqua le superfici interne e gli accessori.

50



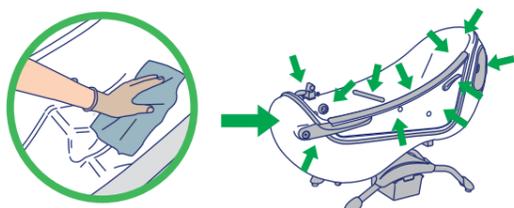
Strofinare tutte le superfici esterne con il disinfettante

51



Attendere il tempo di contatto appropriato per il disinfettante secondo le istruzioni sulla confezione.

52



Rimuovere ogni traccia di disinfettante con un panno pulito e acqua.

Punti 53–54 solamente per idromassaggio

53



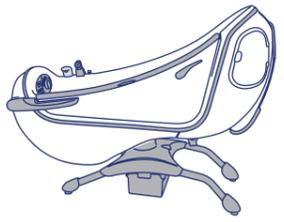

Premere due volte il pulsante idromassaggio. Far funzionare alla massima intensità per 30 secondi.

54



Premere una volta per spegnere.

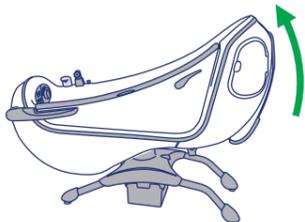
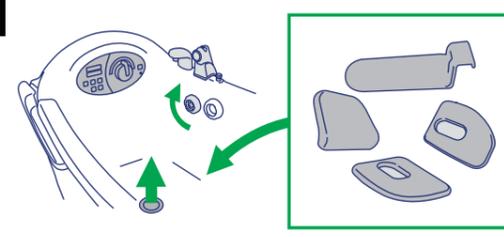
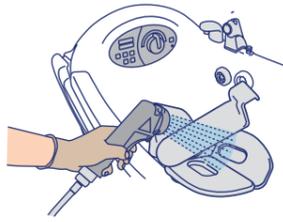
55



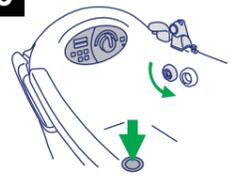
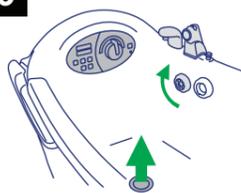
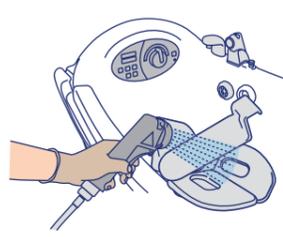
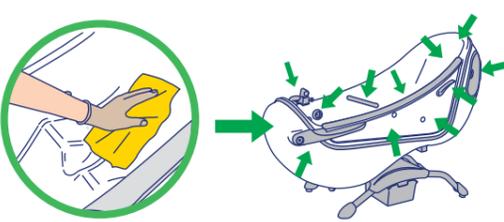
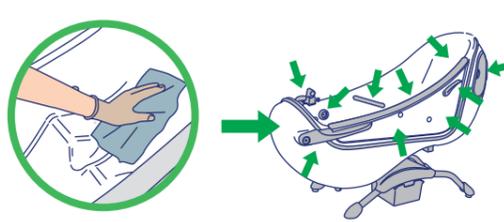
Lasciare asciugare all'aria.

Disinfezione con flacone spray

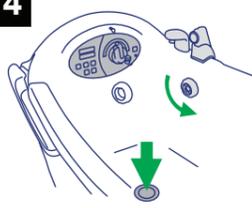
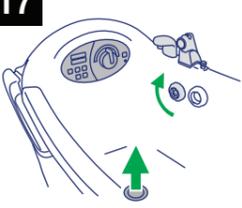
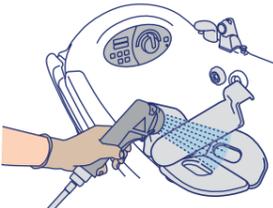
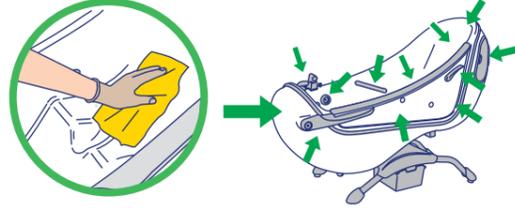
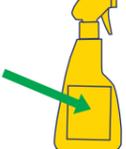
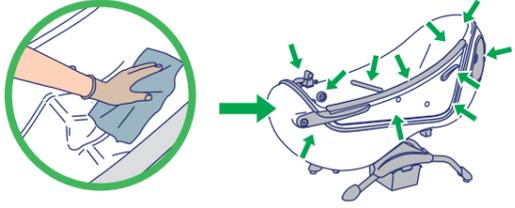
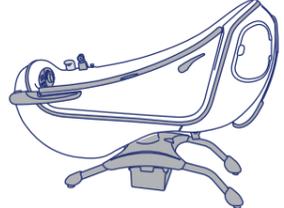
Rimuovere i residui visibili

<p>1</p>  <p>Indossare guanti e occhiali protettivi.</p>	<p>2</p>  <p>La vasca deve trovarsi in posizione eretta con tutte le funzioni disattivate.</p>	<p>3</p>  <p>Aprire lo scarico. Collocare tutti gli accessori sul fondo.</p>	<p>4</p>  <p>Sciacquare con acqua per rimuovere i residui visibili.</p>
--	--	--	---

Pulire

<p>5</p>  <p>Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola.</p>	<p>6</p>  <p>Chiudere lo scarico.</p>	<p>7</p>  <p>Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne e su tutti i lati degli accessori.</p>	<p>8</p>  <p>Strofinare accuratamente le superfici interne e gli accessori.</p>	<p>9</p>  <p>Aprire lo scarico.</p>
<p>10</p>  <p>Risciacquare con acqua le superfici interne e gli accessori.</p>	<p>11</p>  <p>Strofinare tutte le superfici esterne con il disinfettante.</p>	<p>12</p>  <p>Rimuovere ogni traccia di disinfettante con un panno pulito e acqua.</p>		

Disinfettare

<p>13</p>  <p>Spruzzare il disinfettante nello scarico.</p>	<p>14</p>  <p>Chiudere lo scarico.</p>	<p>15</p>  <p>Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne e su tutti i lati degli accessori.</p>	<p>16</p>  <p>Attendere il tempo di contatto appropriato per il disinfettante secondo le istruzioni sulla confezione.</p>
<p>17</p>  <p>Aprire lo scarico.</p>	<p>18</p>  <p>Risciacquare con acqua le superfici interne e gli accessori.</p>	<p>19</p>  <p>Strofinare tutte le superfici esterne con il disinfettante.</p>	<p>20</p>  <p>Attendere il tempo di contatto appropriato per il disinfettante secondo le istruzioni sulla confezione.</p>
<p>21</p>  <p>Rimuovere ogni traccia di disinfettante con un panno pulito e acqua.</p>	<p>22</p>  <p>Lasciare asciugare all'aria.</p>		