


Desinfecteren met geïntegreerde sproeier


Zichtbare resten verwijderen

1

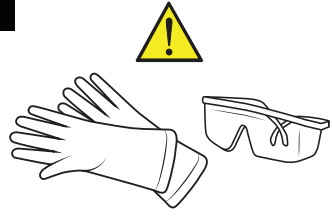


Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

2

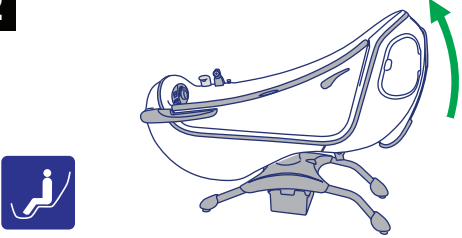


Zorg dat de badkuip rechtop staat en alle functies zijn uitgeschakeld.

3

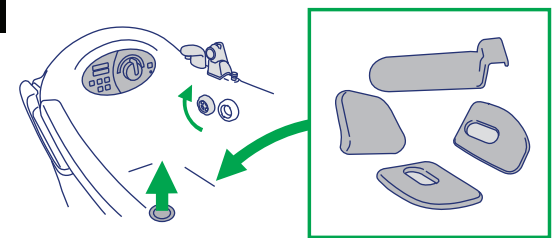

Open de afvoer. Plaats alle accessoires op de bodem.


4

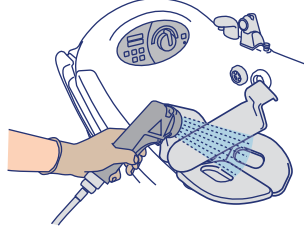

Spoel af met water om zichtbare resten te verwijderen.

De mengverhouding van het desinfectiemiddel bepalen


5

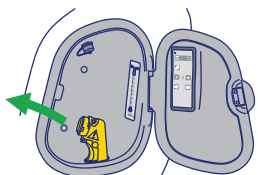

De desinfectiesproeier uitnemen.


6

5 seconden




Activeer de desinfectieknop.

7

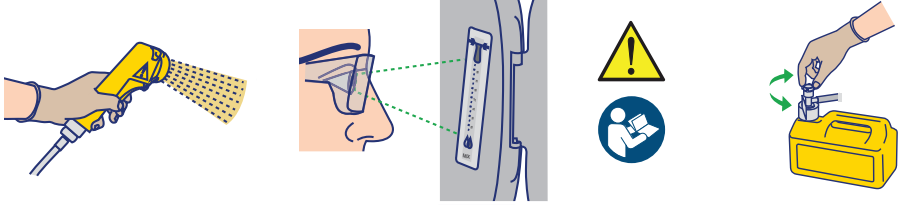

Spuit in de badkuip tot de stroommeter de juiste mengwaarde aangeeft volgens de gebruiksaanwijzing. Stel de knop op de zuigslang zo nodig af.


8



Mengtemperatuur 20 °C (68 °F).


Reinigen

9

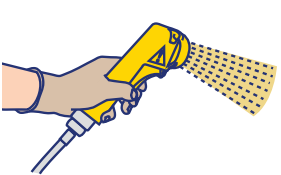


Sproei desinfectiemiddel in de afvoer. Schrob de afvoer met een borstel.

10

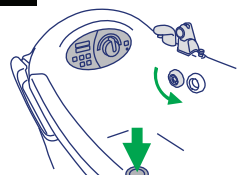


Sluit de afvoer af.

11

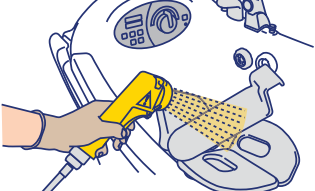

Spuit desinfectiemiddel op alle interne oppervlakken en alle zijden van de accessoires.

12

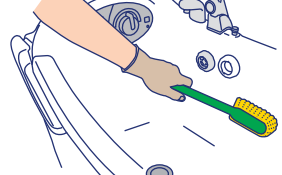


Schrob de interne oppervlakken en de accessoires grondig.

Ga voor Parker zonder Air Spa door naar stap 24.

Stap 13–23 alleen voor Air Spa

13





Kantel de badkuip achterover.

14

Plaats de desinfectiesproeier in de inlaat. Naar links of rechts draaien om stevig vast te zetten.



15

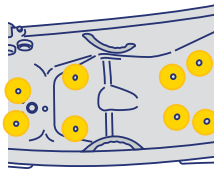


Houd de handbediening ingedrukt. Het desinfectiemiddel moet minstens 30 seconden uit alle sproeiers stromen.

16



Laat de handbediening los en verwijder de sproeier.


17

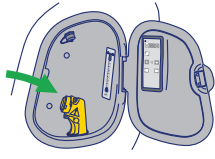

Plaats de sproeier terug.

18


5 seconden




Deactiveer de desinfectieknop.

19

Plaats de douchekop in de inlaat. Naar links of rechts draaien om stevig vast te zetten.





20




Activeer de doucheknop.

21

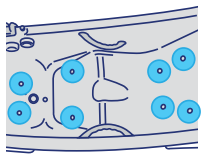

Houd de handbediening ingedrukt. Het schone water moet minstens 30 seconden uit alle sproeiers stromen.

22



Verwijder de douchekop.


23



Zet de badkuip rechtop.


Ga naar de volgende pagina voor het vervolg.

24

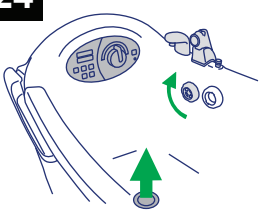


Open de afvoer.

25




Watertemperatuur
25 °C (77 °F).

26

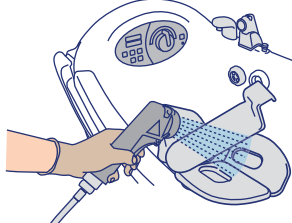


Spoel de interne oppervlakken
en accessoires met water.

27



Deactiveer de
doucheKnop.


28

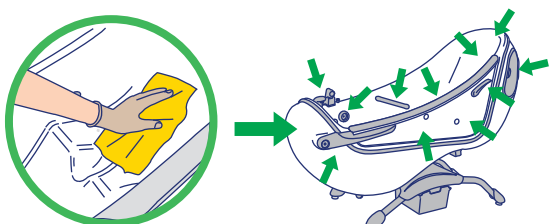

Drenk een doek in desinfectiemiddel.
Neem alle externe oppervlakken af.


Desinfecteren

29

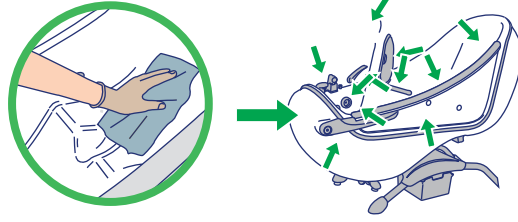

Verwijder al het desinfectiemiddel
met een nieuwe doek en water.


30



5 seconden


Activeer de
desinfectieKnop.

31



Sproei desinfectiemiddel
in de afvoer.


32

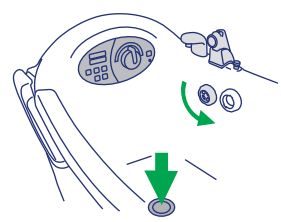

Sluit de afvoer af.


Stap 35-46 alleen voor Air Spa

33

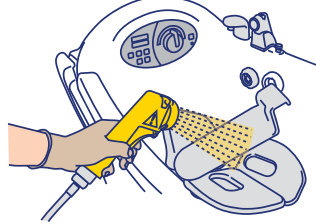


Spuit desinfectiemiddel op alle interne
oppervlakken en alle zijden van de accessoires.

34

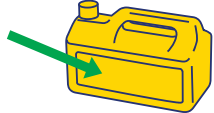


Laat het desinfectiemiddel voldoende
lang inwerken volgens de instructies
op de verpakking.

35




Kantel de badkuip
achterover.

36




Plaats de
desinfectiesproeier
in de inlaat.
Naar links of rechts
draaien om stevig
vast te zetten.

37

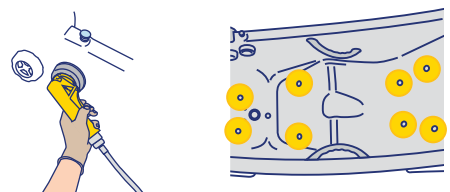


Houd de handbediening ingedrukt. Het desinfectiemiddel
moet minstens 30 seconden uit alle sproeiers stromen.

38



Laat de handbediening los
en verwijder de sproeier.


39



5 seconden


Deactiveer de
desinfectieKnop.

40




Plaats de
sproeier terug.

41

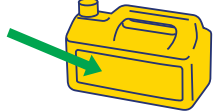


Laat het desinfectiemiddel voldoende
lang inwerken volgens de instructies
op de verpakking.

42

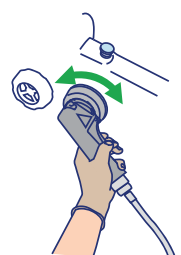


Plaats de
doucheKnop in de
inlaat. Naar links
of rechts draaien
om stevig vast
te zetten.

43




Activeer de
doucheKnop.

44

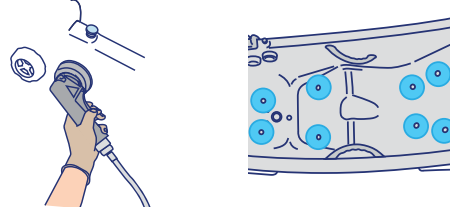


Houd de handbediening ingedrukt. Het schone water
moet minstens 30 seconden uit alle sproeiers stromen.

45

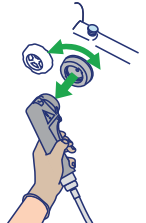

Verwijder de
doucheKnop.


46



Zet de badkuip
rechttop.

Ga naar de volgende pagina voor het vervolg.

47

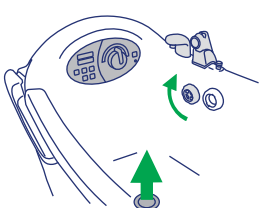


Open de afvoer.

48




Activeer de doucheknop.

49

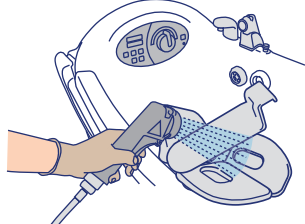

Spoel de interne oppervlakken en accessoires met water.

50

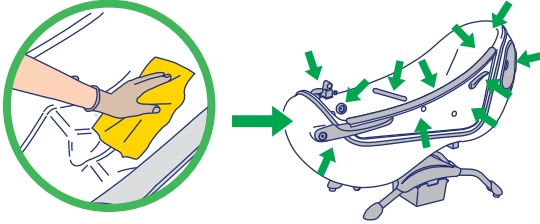


Neem alle externe oppervlakken af met desinfectiemiddel.

51



Laat het desinfectiemiddel voldoende lang inwerken volgens de instructies op de verpakking.

52

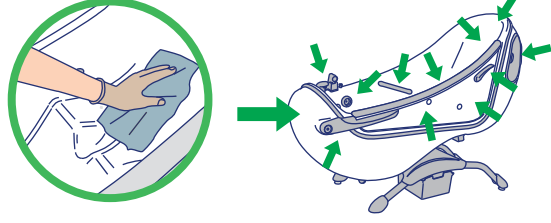

Verwijder al het desinfectiemiddel met een nieuwe doek en water.

Stap 53–54 alleen voor Air Spa

53



Druk twee keer op de Air Spa-knop. 30 seconden laten werken op het hoogste intensiteitsniveau.

54



Eén keer indrukken om uit te schakelen.

55




Laat aan de lucht drogen.

Desinfecteren met spuitfles


Zichtbare resten verwijderen

1




Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

2

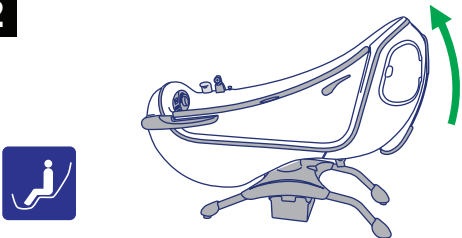


Zorg dat de badkuip rechtop staat en alle functies zijn uitgeschakeld.

3

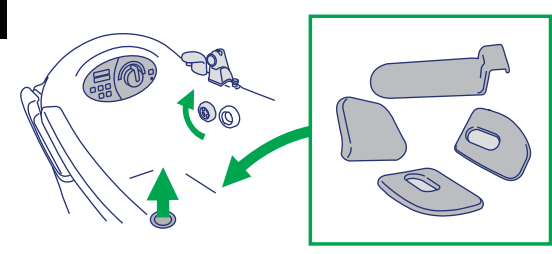

Open de afvoer. Plaats alle accessoires op de bodem.


4

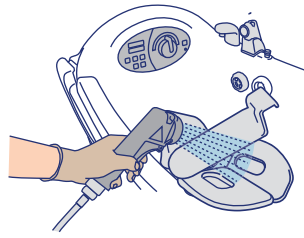

Spoel af met water om zichtbare resten te verwijderen.


Reinigen

5




Sproei desinfectiemiddel in de afvoer. Schrob de afvoer met een borstel.

6

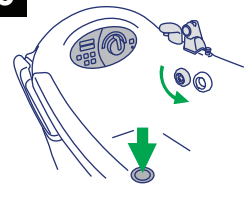


Sluit de afvoer af.

7




Spuit desinfectiemiddel op alle interne oppervlakken en alle zijden van de accessoires.

8

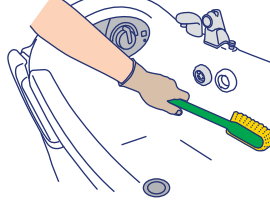


Schrob de interne oppervlakken en de accessoires grondig.

9

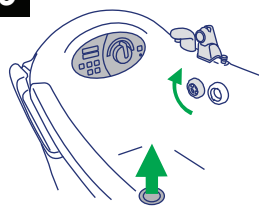


Open de afvoer.

10

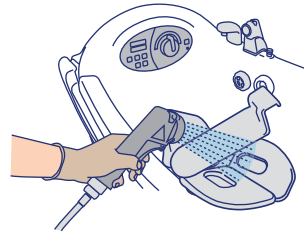


Spoel de interne oppervlakken en accessoires met water.

11

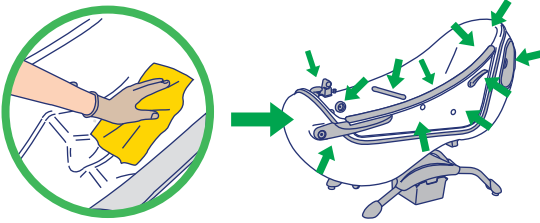

Neem alle externe oppervlakken af met desinfectiemiddel.


12

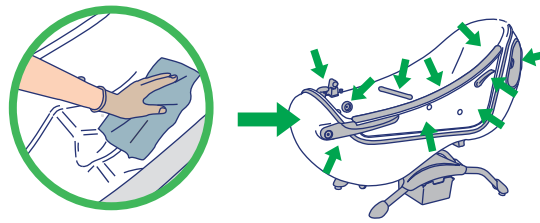

Verwijder al het desinfectiemiddel met een nieuwe doek en water.


Desinfecteren

13




Sproei desinfectiemiddel in de afvoer.

14

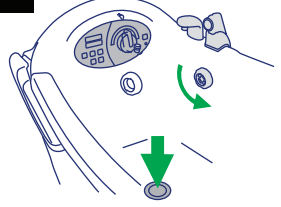


Sluit de afvoer af.

15




Spuit desinfectiemiddel op alle interne oppervlakken en alle zijden van de accessoires.

16

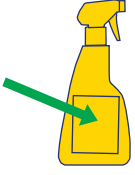


Laat het desinfectiemiddel voldoende lang inwerken volgens de instructies op de verpakking.

17

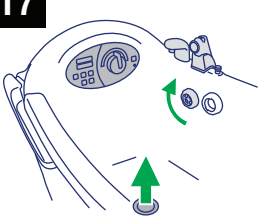


Open de afvoer.

18

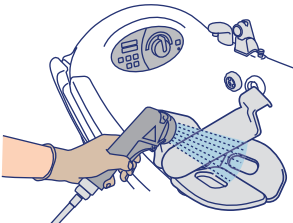


Spoel de interne oppervlakken en accessoires met water.

19

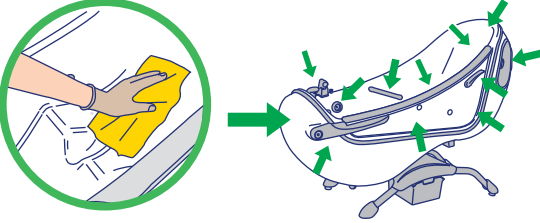


Neem alle externe oppervlakken af met desinfectiemiddel.

20

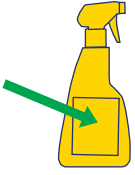


Laat het desinfectiemiddel voldoende lang inwerken volgens de instructies op de verpakking.

21

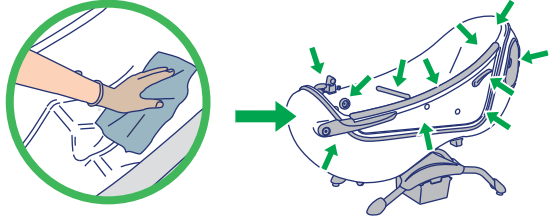

Verwijder al het desinfectiemiddel met een nieuwe doek en water.

22

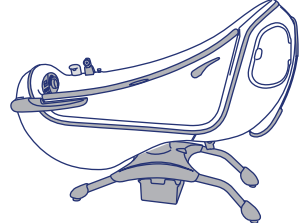

Laat aan de lucht drogen.