

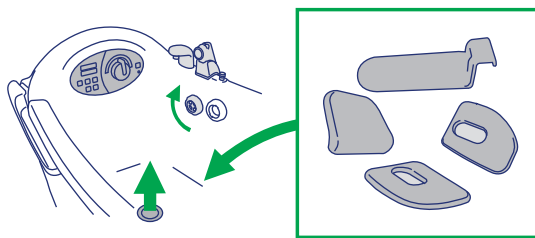
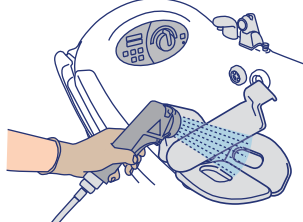




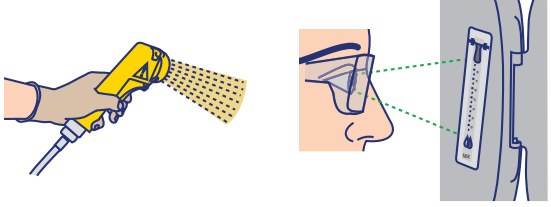

Razkuževanje z vgrajeno ročico razpršila

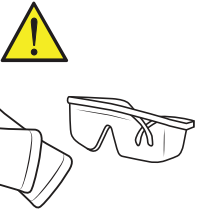

Odstranite vidno umazanijo

- 1**  Nadenite si zaščitne rokavice in očala.
- 2**  Kad mora biti v pokončnem položaju, z vsemi funkcijami izklopljenimi.
- 3**  Odprite odtok. Namestite vse pripomočke na dnu.
- 4**  Sperite z vodo, da odstranite vidne ostanke.



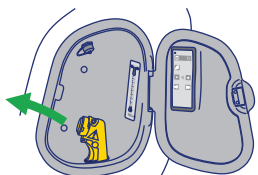

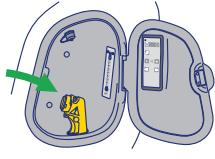

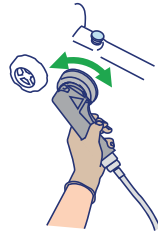

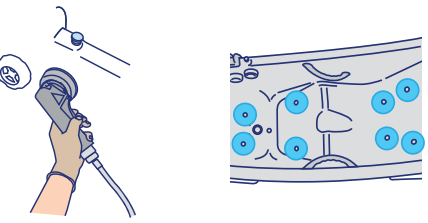


Določitev mešalnega razmerja razkužila

- 5**  Dvignite ročico razpršila za razkuževanje.
- 6**  5 sekund
Aktivirajte gumb za razkuževanje.
- 7**  Pršite v kad, dokler merilnik pretoka ne prikaže pravilnega razmerja mešanja v skladu z navodili za uporabo. Po potrebi prilagodite gumb na sesalni cevi.
- 8**  Temperatura mešanja 20 °C (68 °F).

Očistite


- 9**  Razkužilo napršite v odtok. Odtok zdrnite s ščetko.
 - 10**  Zaprite odtok.
 - 11**  Razpršite razkužilo po vseh notranjih površinah in vseh straneh pripomočkov.
 - 12**  Notranje površine in pripomočke temeljito zdrnite.
- Za kad Parker brez zračne terapije pojdite na 24. korak.

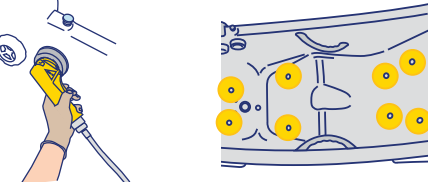Koraki 13–23 samo za zračno terapijo

- 13**  Nagnite kad.
- 14**  Vstavite ročico razpršila za razkuževanje v dovod. Obrnite levo ali desno, da trdno pritrdite.
- 15**  Pritisnite in držite sprožilec. Razkužilo mora teči iz vseh šob najmanj 30 sekund.
- 16**  Spustite sprožilec in odstranite ročico razpršila.
- 17**  Znova namestite ročico razpršila.
- 18**  5 sekund
Deaktivirajte gumb za razkuževanje.
- 19**  Vstavite ročico prhe v dovod. Obrnite levo ali desno, da trdno pritrdite.
- 20**  Aktivirajte gumb za prhanje.
- 21**  Pritisnite in držite sprožilec. Čista voda mora teči iz vseh šob najmanj 30 sekund.
- 22**  Odstranite ročico prhe.
- 23**  Dvignite kad v pokončni položaj.

Nadaljujte s koraki na naslednji strani

24

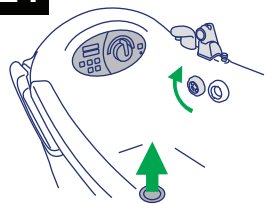


Odprite odtok.

25



Temperatura
vode 25 °C
(77 °F).

26

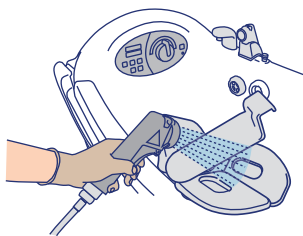


Sperite notranje površine
in pripomočke z vodo.

27



Deaktivirajte
gumb za prhanje.


28

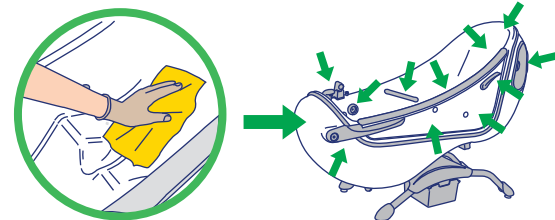

Krpo pomočite v razkužilo.
Obrišite vse zunanje površine.

Razkuževanje

29

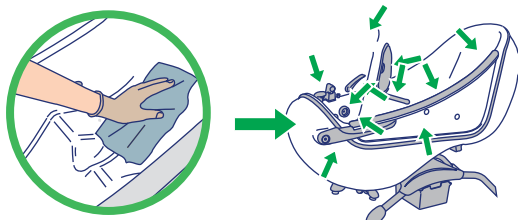

Odstranite vso razkužilo z novo krpo in vodo.


30

5 sekund




Aktivirajte
gumb za
razkuževanje.

31

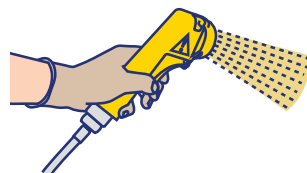

Razkužilo napršite v odtok.


32

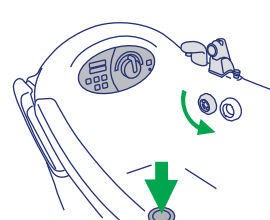

Zaprite odtok.


Koraki 35–46 samo za zračno terapijo

33

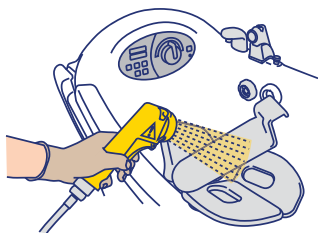

Razpršite razkužilo po vseh notranjih
površinah in vseh straneh pripomočkov.

34

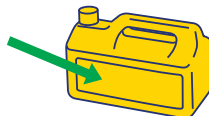

Omogočite primeren čas
delovanja razkužila v skladu
z navodili na vsebniku.

Za kad
Parker
brez zračne
terapije
pojdite na
47. korak.

35




Nagnite kad.

36

Vstavite ročico
razpršila za
razkuževanje
v dovod. Obrnite
levo ali desno,
da trdno pritrdite.



37

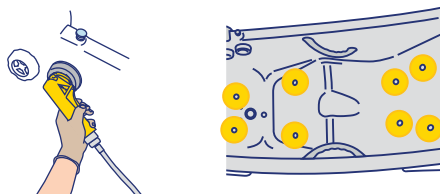

Pritisnite in držite sprožilec. Razkužilo mora
teči iz vseh šob najmanj 30 sekund.

38



Spustite sprožilec in
odstranite ročico razpršila.

39

5 sekund




Deaktivirajte
gumb za
razkuževanje.

40




Znova namestite
ročico razpršila.

41

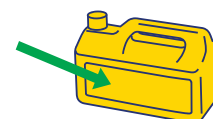

Omogočite primeren čas
delovanja razkužila v skladu
z navodili na vsebniku.

42

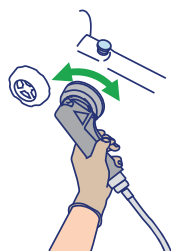


Vstavite ročico
prhe v dovod.
Obrnite levo
ali desno, da
trdno pritrdite.

43



Aktivirajte gumb
za prhanje.

44

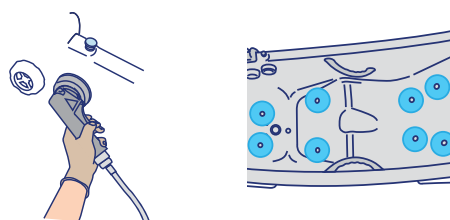

Pritisnite in držite sprožilec. Čista voda
mora teči iz vseh šob najmanj 30 sekund.

45



Odstranite
ročico prhe.


46



Dvignite kad v
pokončni položaj.

Nadaljujte s koraki na naslednji strani

47

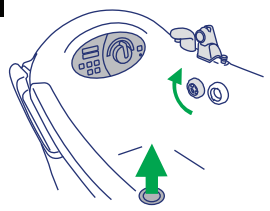

Odprite odtok.

48




Aktivirajte gumb za prhanje.

49




Sperite notranje površine in pripomočke z vodo.

50

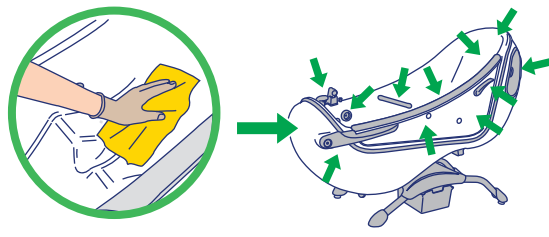

Obrišite vse zunanje površine z razkužilom.

51

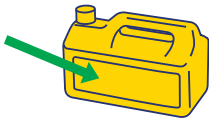

Omogočite primeren čas delovanja razkužila v skladu z navodili na vsebniku.



52



Odstranite vso razkužilo z novo krpo in vodo.

Koraki 53–54 samo za zračno terapijo

53

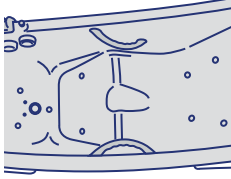

Dvakrat pritisnite gumb za zračno terapijo. 30 sekund izvajajte pri največji intenzivnosti.

54



Pritisnite enkrat za izklop.


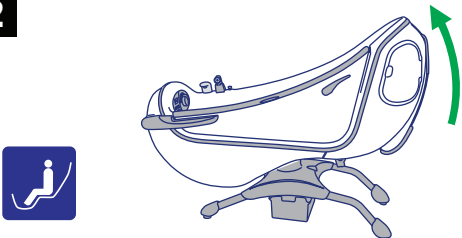
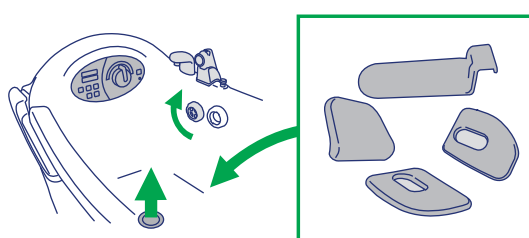
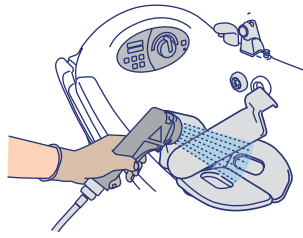
55




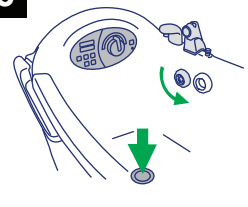

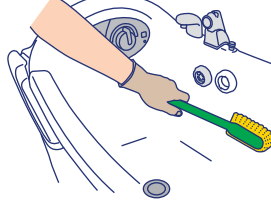
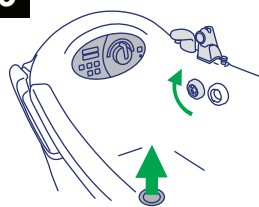
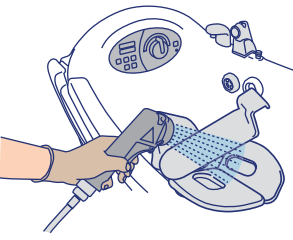
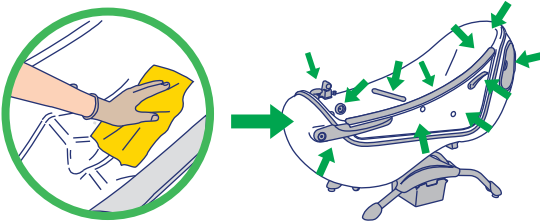
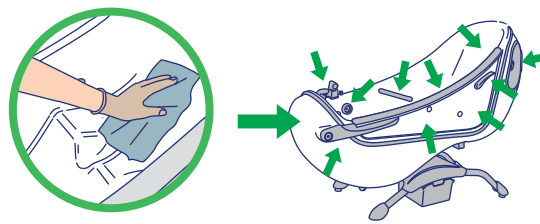
Pustite, da se posuši.

Razkuževanje z razpršilom


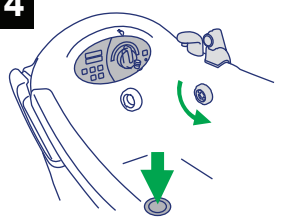

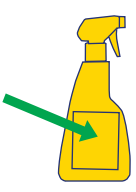
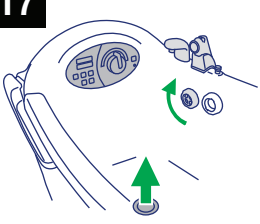
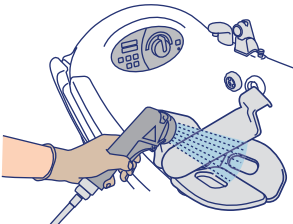
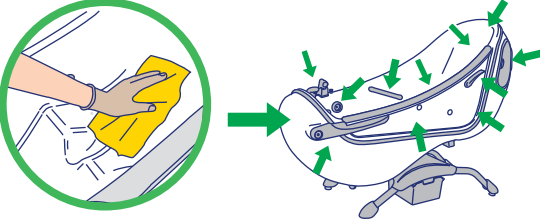
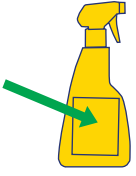
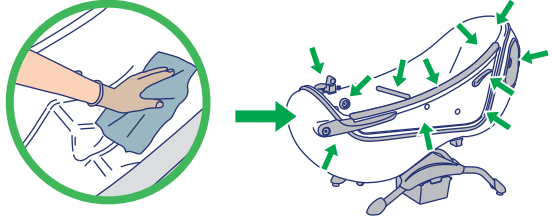
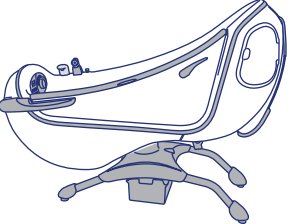
Odstranite vidno umazanijo

- 1**  Nadenite si zaščitne rokavice in očala.
- 2**  Kad mora biti v pokončnem položaju, z vsemi funkcijami izklopljenimi.
- 3**  Odprite odtok. Namestite vse pripomočke na dnu.
- 4**  Sperite z vodo, da odstranite vidne ostanke.

Očistite

- 5**  Razkužilo napršite v odtok. Odtok zdrnite s ščetko.
- 6**  Zaprite odtok.
- 7**  Razpršite razkužilo po vseh notranjih površinah in vseh straneh pripomočkov.
- 8**  Notranje površine in pripomočke temeljito zdrnite.
- 9**  Odprite odtok.
- 10**  Sperite notranje površine in pripomočke z vodo.
- 11**  Obrišite vse zunanje površine z razkužilom.
- 12**  Odstranite vso razkužilo z novo krpo in vodo.

Razkuževanje

- 13**  Razkužilo napršite v odtok.
- 14**  Zaprite odtok.
- 15**  Razpršite razkužilo po vseh notranjih površinah in vseh straneh pripomočkov.
- 16**  Omogočite primeren čas delovanja razkužila v skladu z navodili na vsebniku.
- 17**  Odprite odtok.
- 18**  Sperite notranje površine in pripomočke z vodo.
- 19**  Obrišite vse zunanje površine z razkužilom.
- 20**  Omogočite primeren čas delovanja razkužila v skladu z navodili na vsebniku.
- 21**  Odstranite vso razkužilo z novo krpo in vodo.
- 22**  Pustite, da se posuši.