



Εγκατάσταση επιστρώματος ή ανταλλακτικού στρώματος και αντλίας

1

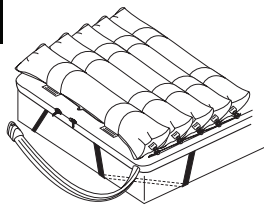

- σύστημα σωλήνων στα πόδια της κλίνης
- μονάδα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) στο επάνω μέρος της κλίνης
- αεροθάλαμοι στραμμένοι προς τα επάνω

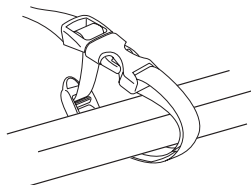

Επίστρωμα: Τοποθετήστε το πάνω από το στρώμα βάσης. Χρησιμοποιήστε τους 4 γωνιακούς ιμάντες για να το στερεώσετε.

Αντικατάσταση στρώματος:

Τοποθετήστε το στη βάση κλίνης. Χρησιμοποιήστε τους 8 ιμάντες για να το στερεώσετε στα κινούμενα μέρη του πλαισίου κλίνης.

2


ARJO

Auto Logic




Κλείστε το φερμουάρ του προστατευτικού καλύμματος πάνω από το στρώμα με το λογότυπο της Arjo στα πόδια της κλίνης.

3

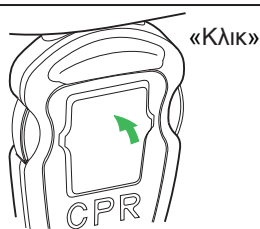


Η μονάδα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) είναι κουμπωμένη στην κλειστή θέση.

4

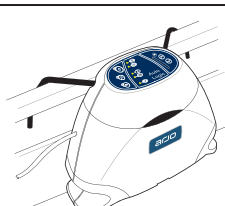


Τοποθετήστε την αντλία σε μια οριζόντια επιφάνεια ή κρεμάστε την από τη ράγα ποδιών της κλίνης.

5

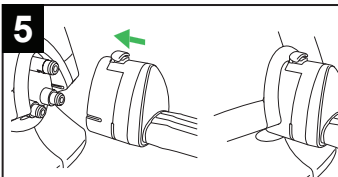

Συνδέστε το σύστημα σωλήνων. Τοποθετήστε το φιν παροχής τροφοδοσίας σε μια πρίζα.


6

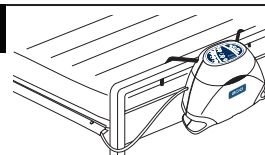

Δρομολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά μήκος του στρώματος. Στερεώστε το πτερύγιο γύρω από το καλώδιο με τις κόπτιτσες.


Εγκατάσταση μαξιλαριού καθίσματος και αντλίας

1

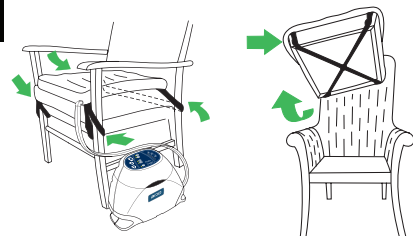

Μαξιλάρι καθίσματος: Τοποθετήστε το στην επιφάνεια της καρέκλας. Χρησιμοποιήστε τους ιμάντες στερέωσης για να το στερεώσετε.


Μπροστινό μέρος καρέκλας

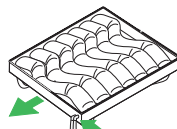

Πίσω μέρος καρέκλας

- αεροθάλαμοι στραμμένοι προς τα επάνω
- σύστημα σωλήνων στην μπροστινή δεξιά γωνία
- αεροθάλαμοι σε οριζόντια θέση κατά μήκος της καρέκλας, με το σχήμα «V» στραμμένο προς το μπροστινό μέρος

2

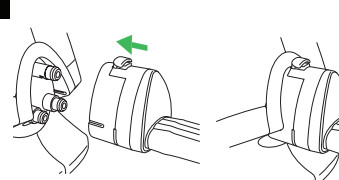

Συνδέστε το σύστημα σωλήνων. Τοποθετήστε το φιν παροχής τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

Γρήγορη εκκίνηση

1

- Η αντλία και το στρώμα ή το μαξιλάρι καθίσματος έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Το χειριστήριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) είναι κουμπωμένο στην κλειστή θέση.
- Αυτοέλεγχος αντλίας:
Ηχητικό σήμα (μπιπ) - 10 δευτερόλεπτα - ηχητικό σήμα (μπιπ) - έτοιμη προς χρήση.

2



Πατήστε το πλήκτρο Λειτουργίας/Αναμονής. Περιμένετε μέχρι να διογκωθεί πλήρως:

Επίστρωμα: 7 λεπτά

Αντικατάσταση στρώματος: 15 λεπτά

Μαξιλάρι καθίσματος: 3 λεπτά

3



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Το χειριστήριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) πρέπει να είναι ορατό και προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.



Όταν εξαφανιστεί η ένδειξη αναμονής, τοποθετήστε το κλινοσκέπασμα στο στρώμα και τοποθετήστε τον ασθενή στο στρώμα ή στο μαξιλάρι καθίσματος. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η Ενεργή λειτουργία (εναλλασσόμενη πίεση).

Χειριστήριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης [CPR] (μόνο για στρώματα)

1

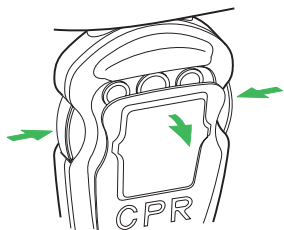

Ενεργοποίηση: Πατήστε ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα απελευθέρωσης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR).

2



Επαναφορά:

Ωθήστε το εμπρός μέρος της μονάδας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Λειτουργία Autoconfirm

1



2s



Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο. Οι ενδείξεις άνεσης αναβοσβήνουν και στη συνέχεια, ανάβουν διαδοχικά.

Επίτευξη πίεσης:

- Οι ενδείξεις άνεσης ανάβουν
- Η αντλία εκπέμπει 3 φορές ένα ηχητικό σήμα (μπιπ)
- Ανάβει η ένδειξη αντιδραστικής (CLP) λειτουργίας

2



2s

Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο.





Επέκταση:

Οι ενδείξεις άνεσης αναβοσβήνουν + εκπέμπονται ορισμένα ηχητικά σήματα: Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο άνεσης για παράταση κατά 5 λεπτά. Μέγιστο διάστημα 30 λεπτά.

Λειτουργία μεταφοράς (μόνο για στρώματα)



1

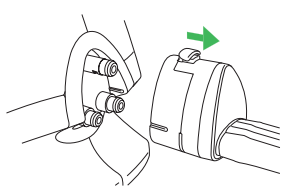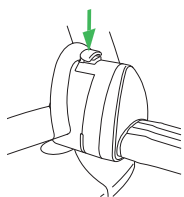

Ενεργοποίηση:

Πατήστε το πλήκτρο και τραβήξτε τον σύνδεσμο του συστήματος σωλήνων. Το στρώμα στηρίζει τον ασθενή για έως και 12 ώρες.

2

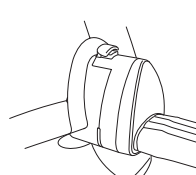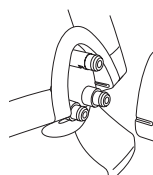

Αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας:

Συνδέστε εκ νέου το σύστημα σωλήνων.

Καθαρισμός και απολύμανση

Καθαρίστε και απολυμάνετε μετά από κάθε ασθενή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια χρήσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της αντλίας αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο τροφοδοσίας ή αφαιρώντας τη συστοιχία μπαταριών πριν από τον καθαρισμό.

Πρέπει να φοράτε πάντοτε προστατευτικό ρουχισμό κατά την πραγματοποίηση απολύμανσης.

Καθαρισμός

1. Καθαρίζετε όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες και απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα σκουπίζοντας με πανί βρεγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό και νερό.
2. Στεγνώστε σχολαστικά. Μην αφήνετε νερό ή καθαριστικά διαλύματα να συσσωρεύονται στην επιφάνεια της αντλίας.

Χημική απολύμανση

Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό με χλώριο, όπως το υποχλωριώδες νάτριο, με δραστηριότητα 1.000 ppm διαθέσιμου χλωρίου (από 250 ppm έως 10.000 ppm ανάλογα με την τοπική πολιτική και την κατάσταση της μόλυνσης).

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απολυμαντικά με βάση την αλκοόλη (δραστηριότητα 70%).

Εάν επιλέξετε άλλο απολυμαντικό, επιβεβαιώστε την καταλληλότητα χρήσης με τον προμηθευτή του χημικού, πριν από τη χρήση.

1. Σκουπίστε όλες τις καθαρισμένες επιφάνειες με το διάλυμα.
2. Σκουπίστε με ένα πανί, το οποίο έχετε βρέξει με νερό.
3. Στεγνώστε σχολαστικά.

Θερμική απολύμανση

Για τον καθαρισμό του άνω καλύμματος του στρώματος, δείτε την ετικέτα.