



Montaż nakładki na materac lub materaca i pompy

1

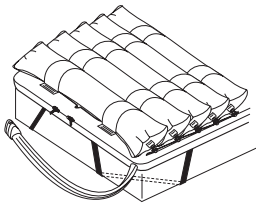

- przewód powietrzny po stronie nóg
- zawór CPR po stronie głowy
- materac położony komorami do góry

Nakładka na materac:
Umieść nakładkę na materacu.
Przymocuj 4 pasami narożnymi.

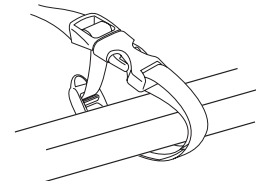

Materac:
Umieść na podstawie łóżka.
Przymocuj do ruchomych części rami łóżka za pomocą 8 pasów.

2

arjo
Auto Logic



Zapnij pokrowiec ochronny wokół materaca tak, aby logo Arjo znajdowało się po stronie nóg.

3



„Kliknięcie“


Zawór CPR zatrzaśnięty w pozycji zamkniętej.

4




Ustaw pompę na płaskiej powierzchni lub zawieś na poręczy po stronie nóg.

5

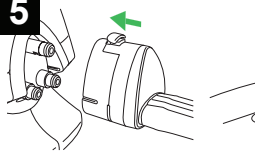

Podłącz przewód powietrzny. Wtyczkę zasilania podłącz do gniazda zasilającego.


6




Poprowadź przewód zasilania wzdłuż materaca. Zatraskami zapnij klappę wokół przewodu.

Montaż poduszki do siedzenia i pompy

1

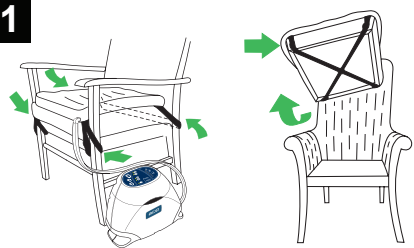

Poduszka do siedzenia:
Połóż na fotelu.
Przymocuj pasami.

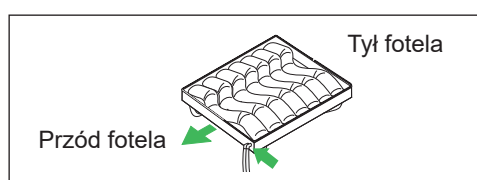


Tył fotela

Przód fotela

- materac położony komorami do góry
- przewód powietrzny w prawym przednim rogu
- komory ułożone poziomo na fotelu, czubkiem V do przodu

2

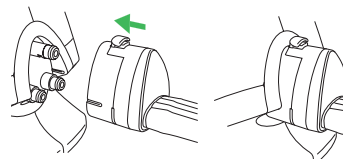



Podłącz przewód powietrzny. Wtyczkę zasilania podłącz do gniazda zasilającego.

Szybkie uruchomienie

1

- Pompa i materac lub poduszka do siedzenia prawidłowo zamontowane.
- Zawór CPR zatrzaśnięty w pozycji zamkniętej.
- Samokontrola pompy:
Dźwięk — 10 sekund — dźwięk — gotowa do użycia.



2

Wciśnij przycisk Praca/Gotowość. Zaczekaj na całkowite napompowanie:
Nakładka na materac: 7 minut
Materac: 15 minut
Poduszka do siedzenia: 3 minuty

3


UWAGA
Zawór CPR powinien być zawsze dostępny i widoczny.

Gdy wskaźnik czekania wyłączy się, rozłóż prześcieradło na materacu i ułóż pacjenta na materacu lub poduszce do siedzenia. Ustawienie domyślne to Tryb aktywny (ciśnienie zmienne).

Zawór CPR (tylko materace)

1

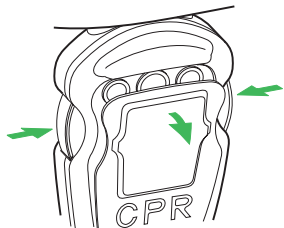

Aktywacja: równocześnie wcisnąć dwa przyciski zwolnienia CPR.

2



„Kliknięcie”

Reset: popchnąć przód zaworu CPR, aż charakterystyczne kliknięcie oznajmi, że znalazł się on na miejscu.

Tryb Autofirm

1



2 s



Aktywacja: nacisnąć i przytrzymać przycisk. Wskaźniki komfortu migają, a następnie świecą się sekwencyjnie.

Osiągnięto ciśnienie:

- Wskaźniki komfortu świecą się
- Pompa emituje 3 sygnały dźwiękowe
- Świeci się wskaźnik trybu pasywnego (CLP)

2



2 s

Wyłączenie: nacisnąć i przytrzymać przycisk.





Przedłużanie:

Wskaźnik komfortu miga + seria dźwięków: wciśnij dowolny z przycisków komfortu, aby przedłużyć tryb o 5 minut. Maksymalnie 30 minut.



Tryb transportowy (tylko materace)

1

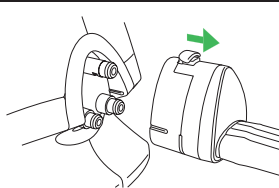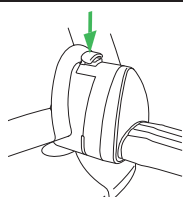

Aktywacja: Wcisnąć przycisk i wyciągnąć złącze przewodu powietrznego. Materac zapewnia pacjentowi podparcie do 12 godzin.

2

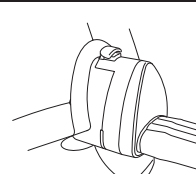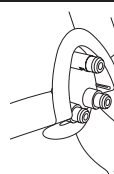

Wznowienie normalnego działania: Ponownie podłączyć przewód powietrzny.

Czyszczenie i dezynfekcja

Czyść i dezynfekuj przed zmianą pacjenta oraz z regularną częstotliwością w czasie użycia.



UWAGA

Przed czyszczeniem odciąć dopływ prądu do pompy poprzez odłączenie kabla zasilającego od gniazda zasilania lub odłączenie zestawu akumulatorowego.

W trakcie odkażania personel powinien mieć na sobie odzież ochronną.

Czyszczenie

1. Wyczyścić wszystkie odkryte powierzchnie i usunąć wszelkie pozostałości, przemywając urządzenie szmatką zanurzoną w wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu i wody.
2. Dokładnie osuszyć. Nie dopuścić do gromadzenia się wody ani środków czyszczących na powierzchni pompy.

Dezynfekcja chemiczna

Zaleca się stosowanie środka z aktywnym chlorem, np. podchlorynem sodu, o stężeniu 1000 ppm dostępnego chloru (od 250 do 10 000 ppm w zależności od miejscowych przepisów i stanu zanieczyszczenia).

Ewentualnie można również stosować środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (moc do 70%).

W razie wyboru innego środka dezynfekcyjnego przed użyciem sprawdź możliwość jego użycia u dostawcy.

1. Wszystkie czyszczone powierzchnie przetrzyj roztworem.
2. Wytrzyj ściereczką nasączoną wodą.
3. Dokładnie osuszyć.

Dezynfekcja termiczna

Informacje dotyczące prania górnego pokrowca materaca znajdują się na metce.