



## Montiranje nadduška ili zamenskog duška i pumpe

**1**

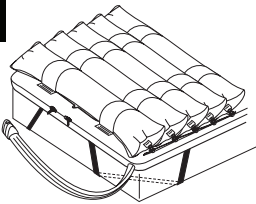

- cevi kod podnožja
- sistem za reanimaciju kod uzglavlja
- komore okrenute nagore

**Naddušek:**  
Postavite preko osnovnog duška.  
Pričvrstite pomoću 4 trake u uglovima.

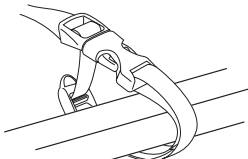

**Zamenski dušek:**  
Postavite na osnovu kreveta.  
Pokretne delove okvira kreveta pričvrstite pomoću 8 traka.

**2**

**ARJO**  
Auto Logic



Zakopčajte zaštitnu navlaku preko duška tako da logotip Arjo bude kod podnožja kreveta.

**3**



Treba da se čuje škljocanje

Jedinica za reanimaciju je postavljena u zatvoreni položaj.

**4**



Postavite pumpu na horizontalnu površinu ili je okačite o šinu u podnožju kreveta.

**5**



Povežite cevi.  
Povežite mrežni utikač sa utičnicom mrežnog napajanja.


**6**




Provucite kabl za napajanje duž ivice duška. Pričvrstite kanalicu oko kabla kopčama.

## Postavljanje jastuka za sedalni deo i pumpe


**1**

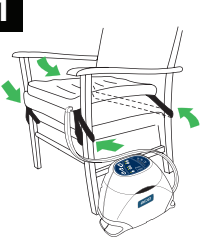

**Jastuk za sedalni deo:**  
Postavite na površinu stolice.  
Pričvrstite pomoću traka za fiksiranje.

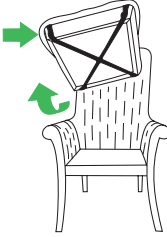


**2**

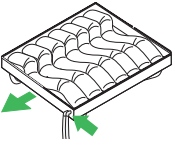

Prednja strana stolice      Zadnja strana stolice

- komore okrenute nagore
- cevi u prednjem desnom uglu
- komore horizontalno preko stolice, u obliku slova V prema prednjoj strani

**2**

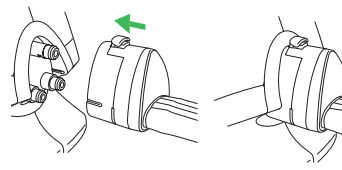



Povežite cevi.  
Povežite mrežni utikač sa utičnicom mrežnog napajanja.

## Mehanizam za brzo pokretanje

**1**

- Pumpa i dušek ili jastuk za sedenje su pravilno postavljeni.
- Kontrola za reanimaciju je postavljena u zatvoreni položaj.
- Samostalna provera pumpe:  
Zvučni signal – 10 sekundi  
– zvučni signal – spremna za rad.



**2**

Pritisnite dugme za pokretanje/ pripravnost.  
Sačekajte da se u potpunosti naduva:  
**Naddušek:** 7 minuta  
**Zamenski dušek:** 15 minuta  
**Jastuk za sedalni deo:** 3 minuta

**3**


**UPOZORENJE**  
Kontrola za reanimaciju mora da bude vidljiva i pristupačna sve vreme.

Kada se indikator isključi, stavite čaršav preko duška i postavite pacijenta na dušek ili jastuk za sedenje.  
Podrazumevana postavka je aktivan režim (promena pritiska).

## Kontrola za reanimaciju (samo za dušek)

1

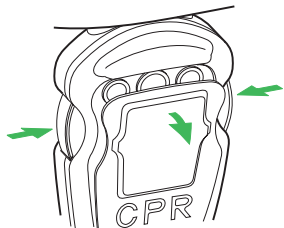

**Aktiviranje:** Istovremeno pritisnite dva CPR dugmeta za otpuštanje.

2



Treba da se čuje škljocanje

**Resetovanje:** Gurajte prednji deo CPR jedinice dok ne nalegne na mesto.

## Režim automatskog učvršćivanja

1



2 s



### Aktiviranje:

Pritisnite i držite dugme. Indikatori za udobnost trepere, a zatim redom počinju da svetle.

Postignut je pritisak:

- Svetle indikatori za udobnost
- Pumpa emituje zvučni signal 3 puta
- Svetli indikator za reaktivni režim (režim stalnog nižeg pritiska)

2



2 s

### Deaktiviranje:

Pritisnite i držite dugme.




### Produžavanje:

Trepere indikatori za udobnost + niz tonova: Pritisnite bilo koji taster za udobnost da biste produžili 5 minuta. Najviše 30 minuta.

## Režim transporta (samo za dušek)


1

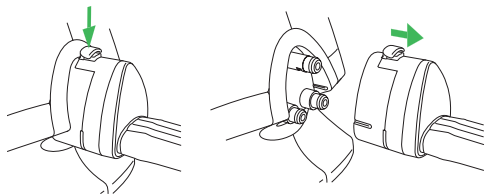

### Aktiviranje:

Pritisnite dugme i povucite priključak cevi. Dušek pruža oslonac pacijentu najviše 12 sati.

2

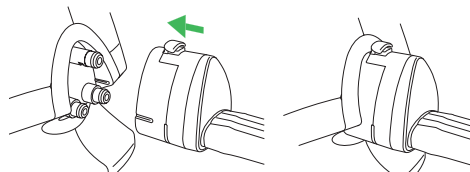

### Nastavak normalnog rada:

Ponovo priključite cevi.

## Čišćenje i dezinfekcija

Čistite i dezinfikujte dušek između korišćenja kod dva pacijenta i u redovnim intervalima tokom upotrebe.



### UPOZORENJE

Isključite dovod struje u pumpu tako što ćete isključiti kabl iz mrežnog napajanja ili izvući baterije pre čišćenja.

Uvek nosite zaštitnu odeću dok sprovedite dekontaminaciju.

### Čišćenje

1. Očistite sve izložene površine i uklonite zaprljanja krpom koja je navlažena neutralnim deterdžentom i vodom.
2. Temeljno osušite. Sprečite nakupljanje vode ili rastvora za čišćenje na površini pumpe.

### Hemijska dezinfekcija

Koristite sredstvo koje otpušta hlor, kao što je natrijum hipohlorit razblažen do 1000 ppm raspoloživog hlora (između 250 i 10000 ppm u zavisnosti od lokalnih propisa i stanja kontaminacije).

Možete da koristite i sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola (do 70% koncentracije alkohola).

Ako izaberete neko drugo sredstvo za dezinfekciju, proverite pogodnost tog sredstva kod dobavljača hemijskih sredstava pre upotrebe.

1. Prebrišite sve očišćene površine ovim rastvorom.
2. Prebrišite krpom koju ste navlažili vodom.
3. Temeljno osušite.

### Toplotna dezinfekcija

Pogledajte etiketu na navlaci dušeka da biste saznali kako se održava.

