


Freedom Bath




Notventil zum Lösen der Türdichtung



Bei medizinischen Notfällen während des Badens die Schritte 1 bis 3 durchführen.


Bei Stromausfall die Badewanne vor Durchführung der Schritte 1 bis 3 ablassen.

1

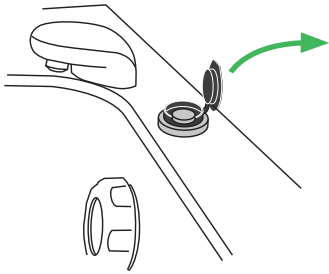


Öffnen Sie den Deckel.

2

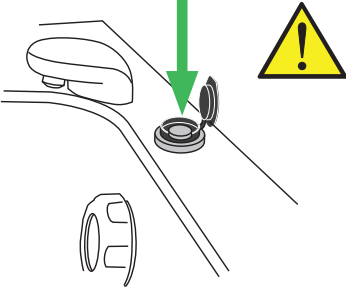



Drücken Sie den Schalter. Der Abfluss wird geöffnet und das Wasser fließt an der Tür ab.

3

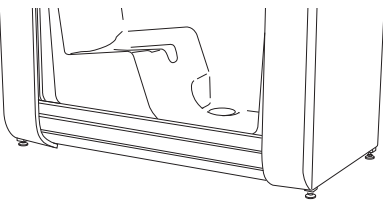

Drücken Sie die Tür manuell herunter.


Aufblasbare Türdichtung

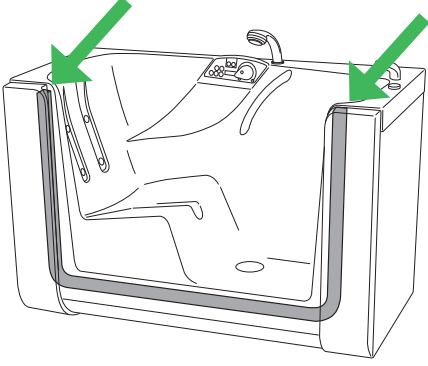


Aktiveren Sie das aufblasbare Dichtungssystem, sodass die Tür völlig dicht abschließt. Heben Sie die Tür an und drücken Sie die Türdichtungs-/Abflusstaste.

Lassen Sie die Tür bei Nichtbenutzung mit entleerter Dichtung oben.

Automatischer Abfluss

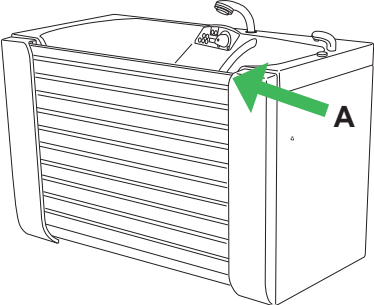

A

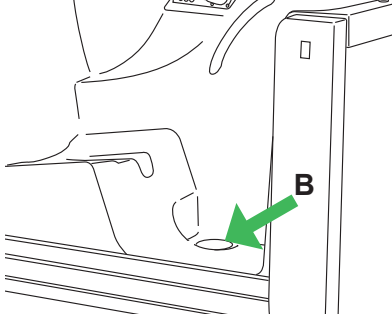


B

Der Abfluss schließt sich nur, wenn die Tür in der oberen Position steht (A). Der Abfluss öffnet sich, solange das Dichtungssystem deaktiviert ist (B).

Luftperlbad (Air Spa) (Sonderausstattung)


1

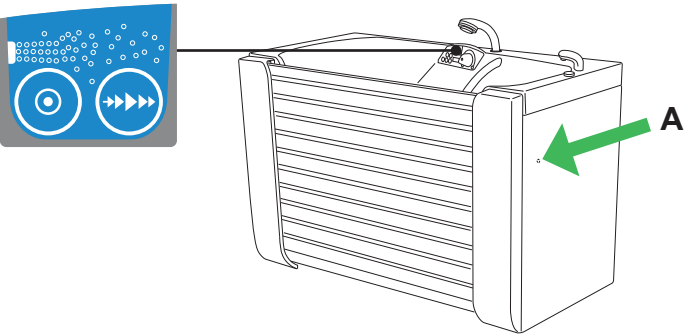

A


Heben Sie die Tür in die obere Position und füllen Sie die Badewanne über den Wasserhochstandsensor (A).

2




Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Luftgebläse bei voller Geschwindigkeit zu starten.

3




Die Geschwindigkeitstaste gedrückt halten, um die Intensität zu verringern. Lassen Sie die Taste wieder los, wenn die gewünschte Intensität erreicht ist.

4




Zum Stoppen des Luftgebläses die Taste ON/OFF drücken.

Sicherheitsgurt (Zusatzausstattung)

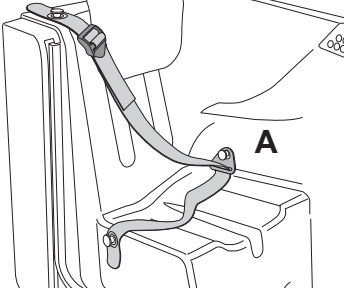

A

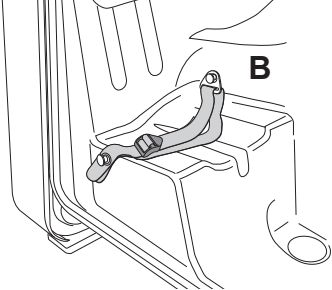

B

Schließen Sie den Sicherheitsgurt gemäß den Anweisungen unter A oder B.

Die Höhe durch Ziehen des Sicherheitsgurtes an seinem Verschluss einstellen.