


Freedom Bath




Sblocco di emergenza della guarnizione di tenuta



In caso di emergenza medica durante il bagno, eseguire i passaggi 1–3.


In caso di mancanza di corrente, svuotare la vasca prima di effettuare i passaggi 1–3.

1

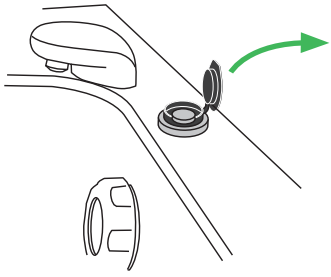


Aprire il coperchio.

2

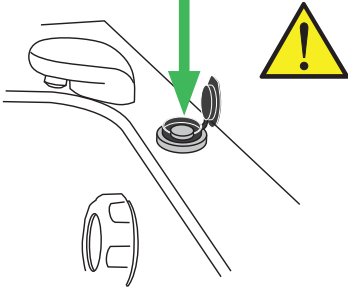



Premere il pulsante lo scarico si apre e l'acqua fuoriesce dalla porta.

3

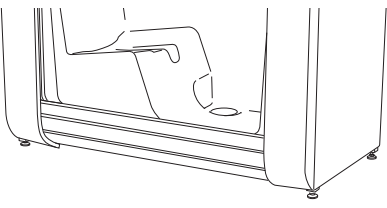


Spingere manualmente la porta verso il basso.

Guarnizione di tenuta gonfiabile della porta

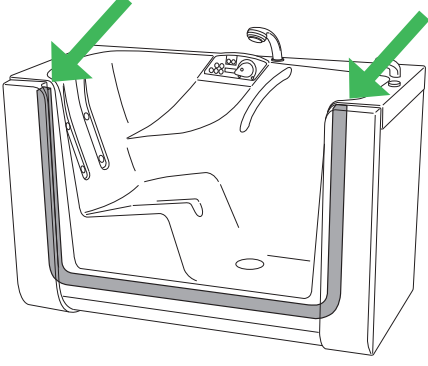


Attivare il sistema di tenuta gonfiabile per rendere la porta a tenuta stagna. Sollevare a porta e premere il pulsante di tenuta/scarico. Quando non viene utilizzata, lasciare la porta sollevata con la guarnizione sgonfia.

Scarico automatico

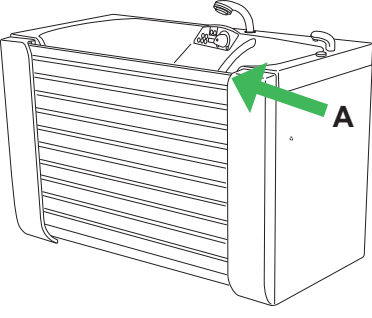

A

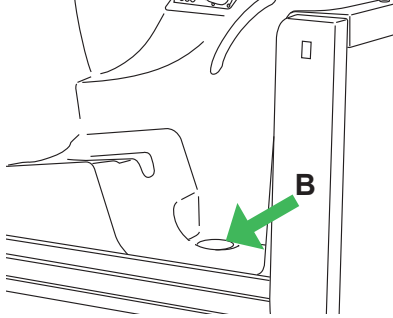

B

Lo scarico si chiude solo quando la porta viene sollevata in posizione superiore (A). Quando il sistema di tenuta è disattivato, lo scarico si apre (B).

Sistema idromassaggio (opzionale)

1



A

Sollevare la porta in posizione superiore e riempire la vasca sopra il pulsante del sensore di alto livello dell'acqua (A).

2



Premere il pulsante ON/OFF: il motore si avvia alla velocità massima.

3




Tenere premuto il pulsante della velocità d'aria per ridurre l'intensità. Rilasciare il pulsante una volta raggiunta l'intensità desiderata.

4




Premere il pulsante ON/OFF per arrestare il motore.

Cintura di sicurezza (opzionale)

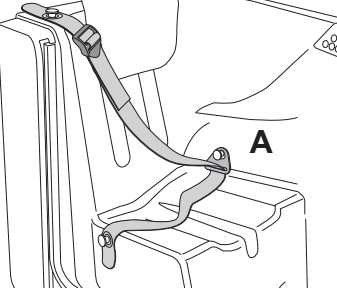

A

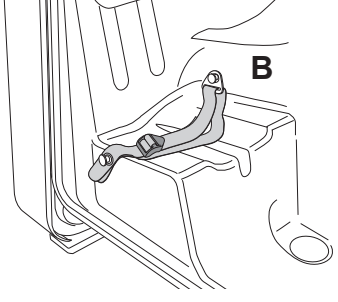

B

Allacciare la cintura di sicurezza secondo la figura A o B. Regolare la lunghezza tirando l'estremità della cintura di sicurezza tramite il gancio.