

Freedom Bath



Vykoupejte a osprchujte pacienta/klienta

1

Stiskněte spouštěcí tlačítko dvířek pro spuštění dvířek do nejnižší polohy. Pomozte pacientovi/klientovi vstoupit do vany.

2

Nebezpečí zachycení

Koupel: dvířka zvedněte do nejvyšší polohy pomocí tlačítka dvířek.
Sprchování: dvířka by měla být nejméně 25 mm (1 in) pod úrovní nejvyšší polohy, aby zůstal otevřený odtok.

3

Po stisknutí tlačítka těsnění/odtoku LED kontrolka bliká zeleně.

4

Při správném nafouknutí svítí LED kontrolka trvale zeleně.

5

Koupel: naplňte vanu pomocí tlačítka napouštění.
Sprchování: použijte tlačítko sprchy.

Nebezpečí opaření

Holou rukou vyzkoušejte teplotu vody. Upravte teplotu podle potřeby.

Ukončete koupel

6

Znovu stiskněte tlačítko těsnění/odtoku pro otevření odtoku.

7

Stiskněte znovu pro vypuštění těsnění. Během vyfukování LED kontrolka bliká zeleně.

8

Volitelné. Osprchujte pacienta/klienta. Spusťte dvířka pro usnadnění přístupu pro pacienta/klienta.

9

Stiskněte spouštěcí tlačítko dvířek pro spuštění dvířek do nejnižší polohy. Pomozte pacientovi/klientovi vystoupit z vany.

