


Freedom Bath




Fare il bagno/la doccia al paziente

1

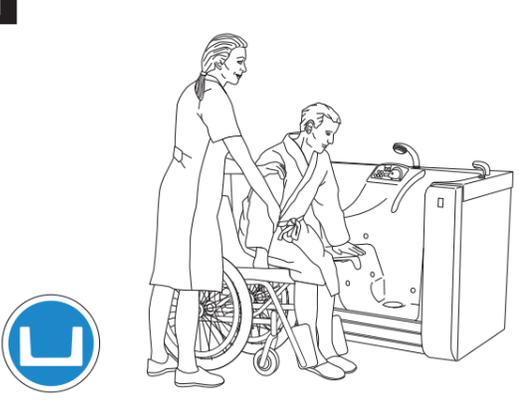

Premere il pulsante di abbassamento della porta per abbassarla completamente. Aiutare il paziente a entrare nella vasca.


2

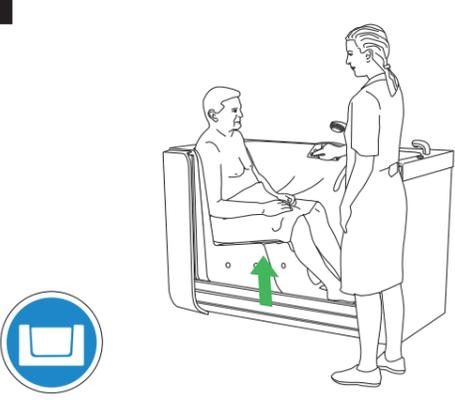

Rischio di intrappolamento

Per il bagno: sollevare la porta in posizione superiore utilizzando il pulsante di sollevamento.
Per la doccia: lasciare la porta ad almeno 25 mm (1 in) dalla posizione di sollevamento per tenere aperto lo scarico.

3

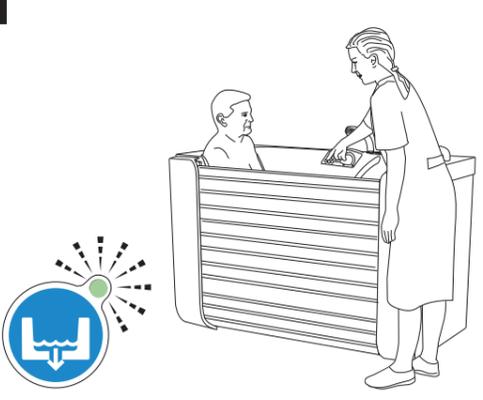

Premere il pulsante di tenuta/scarico della porta, il LED emetterà una luce LED lampeggiante.

4



Al corretto gonfiaggio, il LED emette una luce verde fissa.

5



Rischio di scottatura

Provare l'acqua con la mano nuda. Se necessario, regolare la temperatura.

Per il bagno: riempire la vasca utilizzando il pulsante di riempimento della vasca.
Per la doccia: usare il pulsante per doccia.


Fine del bagno

6



Premere una volta il pulsante di tenuta/scarico della porta per aprire lo scarico.

7

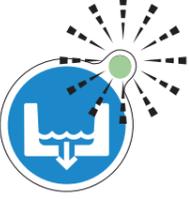


Premere nuovamente per sgonfiare la guarnizione. Durante lo sgonfiaggio, il LED emetterà una luce lampeggiante.

8



Opzionale. Fare la doccia al paziente. Abbassare la porta per agevolare l'accesso al paziente.

9

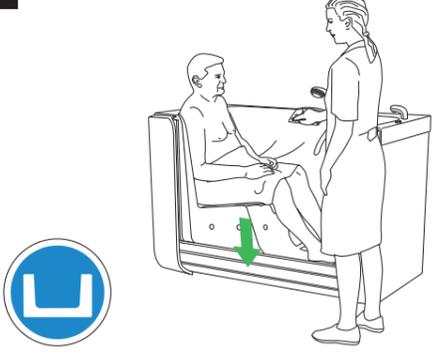

Premere il pulsante di abbassamento della porta per abbassarla completamente. Aiutare il paziente a uscire dalla vasca.