


Freedom Bath




Bade og dusje pasienten

1

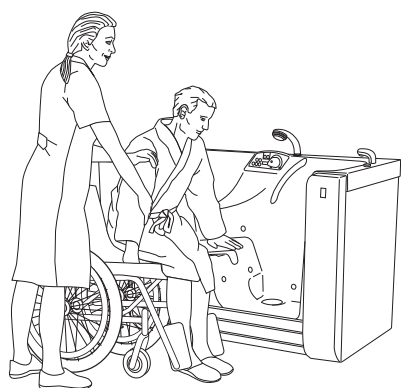

Trykk på dør ned-knappen for å senke døren til den laveste stillingen. Hjelp pasienten ned i badekaret.


2

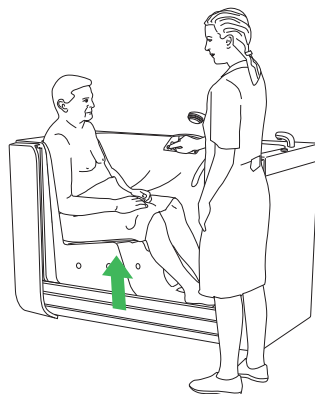

Risiko for å bli sittende fast

For bading: Hev døren til den øverste stillingen ved bruk av dør opp-knappen.
For dusjing: La døren være minst 25 mm (1 tomme) lavere enn den øverste stillingen, for å holde avløpet åpent.

3

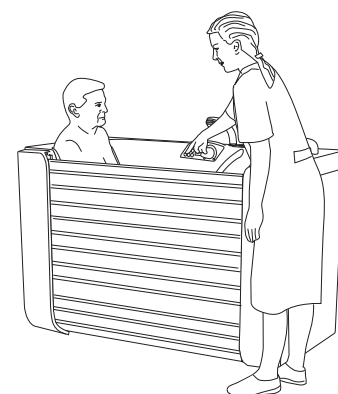



Trykk på dørforsegings-/tømmeknappen, og LED-lampen vil blinke grønt.

4



Ved riktig luftfylling lyser LED-lampen sammenhengende grønt.

5

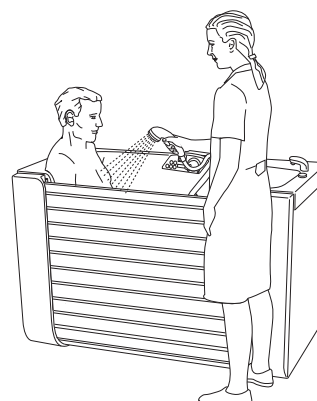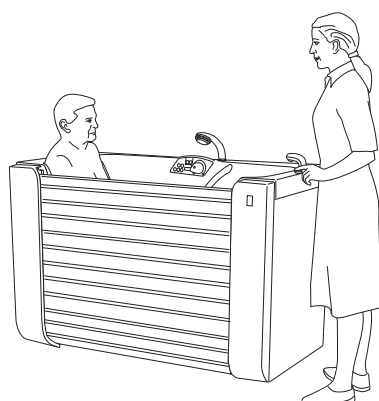

Risiko for skålding

For bading: Fyll badekaret med badekarets fyllknapp.
For dusjing: Bruk dusjknappen.

Kjenn på vannet med en bar hånd. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.


Avslutte badet

6



Trykk på dørtetning-/tømmeknappen for å åpne avløpet.

7

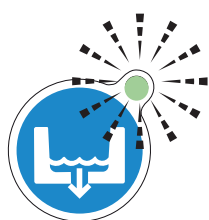


Trykk på nytt for å tømme tetningen for luft. Under tømming av luft vil LED-lampen blinke grønt.

8



Ekstrautstyr. Dusj pasienten. Senk døren for mer praktisk tilgang til pasienten.

9

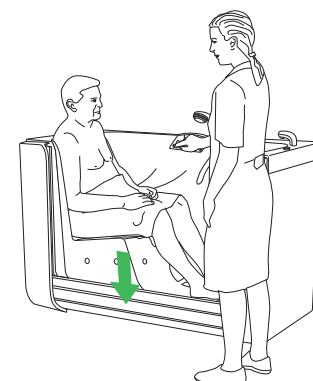

Trykk på dør ned-knappen for å senke døren til den laveste stillingen. Hjelp pasienten ut av badekaret.