

Freedom Bath



为患者沐浴和淋浴

1

按下门下降按钮，将门降低至最低位置。
帮助患者进入浴缸。

2

沐浴：使用门上升按钮将门升至顶部位置。
淋浴：让门从顶部位置下降至少 25 毫米 (1 英寸)，以保持排水口打开。

掉入的风险

3

按下门密封/排水按钮，LED 灯将会闪绿光。

4

充气正常是 LED 会一直保持绿灯状态。

5

沐浴：用浴缸注水按钮给浴缸注水。
淋浴：使用淋浴按钮。

烫伤的风险

用手感知水温。需要时调节温度。

结束洗浴

6

按下门密封/排水按钮一次，打开排水口。

7

再按一次对密封放气。在放气过程中，LED 将会闪绿光。

8

选件。为患者淋浴。把门降低，更方便接近病人。

9

按下门下降按钮，将门降低至最低位置。
帮助患者从浴缸中出来。