

Freedom Bath



VARNING



Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar för att undvika ögon- och hudskador. Vid kontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid irriterade ögon eller irriterad hud, kontakta läkare. Läs alltid igenom säkerhetsdatabladet för desinficeringsmedlet.

Undvik korskontamination genom att alltid följa desinficeringsanvisningarna i bruksanvisningen.

Desinficera aldrig utrustning i närheten av en patient, för att förhindra att dennes hud och ögon irriteras.

Förhindra skador genom att endast använda nödsänkkningsfunktionen i situationer där normal sänkning är omöjlig. Var oerhört försiktig under sänkningen.

Vårdpersonalens skyldigheter

Mellan patienter

Rengör och desinficera Freedom Bath före varje användning.

Varje dag

Rengör dörrtätningen och badkarets undersida.

För badkar som inte går att lyfta för att komma åt, följ följande steg för att komma åt att rengöra dörrens underdel och under badkaret:

1. Tryck ned knapparna för upprullning och nedrullning av dörren samtidigt i 30 sekunder tills temperaturvisningen börjar blinka.
2. Tryck på knappen för nedrullning av dörren. Dörren skjuts in under badkaret så att den undre delen av tätningen och karets undersida blir åtkomliga för rengöring.

Var försiktig vid den här manövern eftersom klämskyddet är fränkopplat. Skyddet aktiveras automatiskt på nytt efter en minut.

Utan desinficerings-/sköljningsinlopp

Använd en sprayflaska eller en MultiClean-enhet Vid användning av en MultiClean-enhet, se MultiClean-enhetens bruksanvisning.

Ta bort synliga rester

1. Ta på skyddshandskar och skyddsglasögon.
2. Se till att alla funktioner är avslagna.
3. Öppna avloppet för att tömma ut kvarstående vatten.
4. Lossa och placera tillbehör såsom nackkudden och säkerhetsbältet i botten av badkaret.
5. Duscha av och skölj badkaret och tillbehören med vatten för att ta bort synliga rester. Vänd runt tillbehören och skölj dem igen.

Rengör

6. Spraya desinficeringsmedel i avloppet. Använd en borste med långt skaft för att rengöra avloppet.
7. Lyft upp dörren till det översta läget så att avloppet stängs.
8. Spraya desinficeringsmedel på alla invändiga badkarsytor och tillbehören på botten av badkaret. Vänd på tillbehören och spraya på andra sidan. Var uppmärksam på delar, knappar och sensorer på badkaret, som t.ex. vred för säkerhetsbälte och översvämningsskydd.
9. Skrubba alla badkarsytor och tillbehör med en mjuk borste eller trasa.
10. Öppna avloppet genom att trycka på tätnings-/avloppsknappen.
11. Skölj alla delar rena från desinficeringsmedel med vatten med en temperatur på ca 25 °C (77 °F).
12. Doppa en trasa i desinficeringsmedel.
13. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida (i synnerhet bakom huvudet), sensorknappar i metall och dörrtätningar.
14. Fukta en ny trasa med vatten och torka bort överflödigt desinficeringsmedel på kontaktytorna.

Desinficera

15. Spraya desinficeringsmedel i avloppet.
16. Stäng avtappningen.
17. Spraya desinficeringsmedel på alla invändiga badkarsytor och tillbehören på botten av badkaret. Vänd på tillbehören och spraya på andra sidan. Var uppmärksam på delar, knappar och sensorer på badkaret, som t.ex. vred för säkerhetsbälte och översvämningsskydd.
18. Doppa en trasa i desinficeringsmedel.
19. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida (i synnerhet bakom huvudet), sensorknappar i metall och dörrtätningar.
20. Låt desinficeringsmedlet verka under den tid som anges på förpackningen.
21. Öppna avtappningen.
22. Skölj alla delar rena från desinficeringsmedel med vatten med en temperatur på ca 25 °C (77 °F). Skölj bort desinficeringsmedlet med duschhandtaget.
23. Fukta en ny trasa med vatten och torka bort överflödigt desinficeringsmedel på kontaktytorna.
24. Lyft upp dörren till det översta läget.
25. Låt lufttorka.

Freedom Bath



Med desinficerings-/sköljningsinlopp och en MultiClean-enhet

Vid användning av en MultiClean-enhet, se MultiClean-enhetens bruksanvisning.

Ta bort synliga rester

1. Ta på skyddshandskar och skyddsglasögon.
2. Se till att alla funktioner är avslagna.
3. Öppna avloppet för att tömma ut kvarstående vatten.
4. Lossa och placera tillbehör såsom nackkudden och säkerhetsbältet i botten av badkaret.
5. Duscha av och skölj badkaret och tillbehören för att ta bort synliga rester.

Rengör

6. Placera desinficerings-sprayhandtaget i desinficerings-/sköljningsinloppet och sätt fast genom att vrida åt valfritt håll.
7. Tryck på avtryckarhandtaget och håll kvar tills desinficeringsmedel strömmar ut ur luftspasystemets samtliga munstycken.
8. Låt rinna i ytterligare 30 sekunder.
9. Släpp avtryckarhandtaget och ta bort desinficerings-sprayhandtaget från desinficerings-/sköljningsinloppet.
10. Placera sprayhandtaget med vatten i desinficerings-/sköljningsinloppet och sätt fast genom att vrida åt valfritt håll.
11. Tryck på avtryckarhandtaget och håll kvar tills rent vatten börjar strömma ur alla munstycken.
12. Låt rinna i ytterligare 30 sekunder.
13. Ta bort duschhandtaget från desinficerings-/sköljningsinloppet.
14. Spraya desinficeringsmedel i avloppet. Använd en borste med långt skaft för att rengöra avloppet.
15. Lyft upp dörren till det översta läget så att avloppet stängs.
16. Spraya desinficeringsmedel på alla invändiga badkarsytor och tillbehören. Vänd på tillbehören och spraya på andra sidan. Var uppmärksam på delar, knappar och sensorer på badkaret, som t.ex. vred för säkerhetsbälte och översvämningsskydd.
17. Skrubba badkarets samtliga ytor och tillbehör med en mjuk borste eller trasa (för att avlägsna alla avlagringar, t.ex. hudflagor).
18. Öppna avloppet genom att trycka på tätnings-/avloppsknappen.
19. Skölj alla delar rena från desinficeringsmedel med vatten med en temperatur på ca 25 °C (77 °F).
20. Doppa en trasa i desinficeringsmedel.
21. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida, sensorknappar i metall och dörrtätningar.
22. Fukta en ny trasa med vatten och torka bort överflödigt desinficeringsmedel på kontaktytorna.

Desinficera

23. Placera desinficerings-sprayhandtaget i desinficerings-/sköljningsinloppet och sätt fast genom att vrida åt valfritt håll.
24. Tryck på avtryckarhandtaget och håll kvar tills desinficeringsmedel strömmar ut ur luftspasystemets samtliga munstycken.
25. Låt rinna i 30 sekunder.
26. Släpp avtryckarhandtaget och ta bort desinficerings-sprayhandtaget från desinficerings-/sköljningsinloppet.

27. Låt desinficeringsmedlet verka under den tid som anges på förpackningen.
28. Spraya desinficeringsmedel i avloppet.
29. Stäng avtappningen.
30. Spraya desinficeringsmedel på alla invändiga badkarsytor och tillbehören på botten av badkaret. Vänd på tillbehören och spraya på andra sidan. Var uppmärksam på delar, knappar och sensorer på badkaret, som t.ex. vred för säkerhetsbälte och översvämningsskydd.
31. Doppa en trasa i desinficeringsmedel.
32. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida, sensorknappar i metall och dörrtätningar.
33. Låt desinficeringsmedlet verka under den tid som anges på förpackningen.
34. Öppna avtappningen.
35. Placera sprayhandtaget med vatten i desinficerings-/sköljningsinloppet och sätt fast genom att vrida åt valfritt håll.
36. Tryck på avtryckarhandtaget och håll kvar tills rent vatten börjar strömma ur alla munstycken.
37. Låt rinna i ytterligare 30 sekunder.
38. Ta bort duschhandtaget från desinficerings-/sköljningsinloppet.
39. Skölj alla delar rena från desinficeringsmedel med vatten med en temperatur på ca 25 °C (77 °F). Skölj bort desinficeringsmedlet med duschhandtaget.
40. Fukta en ny trasa med vatten och torka bort överflödigt desinficeringsmedel på kontaktytorna.
41. Lyft upp dörren till det översta läget.
42. Tryck på TILL/FRÅN-knappen för luftspasystemet för att starta fläkten. Fläkten är nu igång under en minut.
43. Låt lufttorka.

