

# Freedom Bath



## WARNUNG



Immer eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, um Augen- und Hautschäden zu vermeiden. Bei Berührung mit viel Wasser abspülen. Wenn Augen oder Haut gereizt sind, an einen Arzt wenden. Lesen Sie stets das Sicherheitsdatenblatt für das Desinfektionsmittel.

Um eine Infektionsübertragung zu verhindern, gehen Sie immer nach der Desinfektionsanleitung in der Bedienungsanleitung vor.

Um Augen- oder Hautreizungen zu vermeiden, dürfen Sie die Desinfektion nie in Anwesenheit eines Patienten durchführen.

Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie die Notabsenkung nur, wenn eine normale Absenkung nicht möglich ist. Seien Sie besonders vorsichtig während des Absenkens.

## Verpflichtungen der Pflegekraft

### Zwischen den einzelnen Patienten

Das Freedom Bath vor jedem Gebrauch reinigen und desinfizieren.

### Täglich

Türleiste/-dichtung und Unterseite der Badewanne reinigen.

Bei Badewannen ohne Lifterzugang befolgen Sie diese Schritte, um den Bereich unter der Tür und unter der Badewanne zum Reinigen zugänglich zu machen:

1. Die Tasten zum Hochfahren und Absenken der Tür gleichzeitig 30 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Temperaturanzeige anfängt zu blinken.
2. Drücken Sie auf die Taste zum Absenken der Tür. Die Tür fährt daraufhin unter die Badewanne und gibt den unteren Bereich der Leiste / Dichtung sowie den Bereich unter der Badewanne zum Reinigen frei.

Gehen Sie mit Vorsicht vor, da der Klemmschutz deaktiviert ist. Der Schutz wird nach einer Minute automatisch wieder aktiviert.

## Ohne Desinfektionsmittel-/Spüleinlass

Eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche oder die MultiClean-Einheit verwenden. Informationen zur MultiClean-Einheit entnehmen Sie dem Abschnitt MultiClean-Einheit in der Bedienungsanleitung.

### Entfernen sichtbarer Rückstände

1. Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.
2. Sicherstellen, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind.
3. Öffnen Sie den Abfluss, um alles Restwasser abzulassen.
4. Das Zubehör wie Nackenkissen und Sicherheitsgurt abnehmen und auf den Wannenboden legen.
5. Spülen Sie die Badewanne und das Zubehör mit Wasser ab, um sichtbare Rückstände zu entfernen. Zubehör auch von der anderen Seite abspülen.

### Reinigung

6. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Verwenden Sie für die Reinigung des Ablaufs eine Bürste mit einem langen Griff.
7. Durch Anheben der Tür in die obere Position den Abfluss schließen.
8. Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und das Zubehör auf dem Boden der Wanne mit Desinfektionsmittel. Drehen Sie das Zubehör herum und besprühen Sie es auch auf der anderen Seite. Achten Sie auf Teile, Schalter und Sensoren in der Wannenoberfläche, wie z. B. die Sicherheitsgurtknaufe oder die Überlauföffnung.
9. Reinigen Sie alle Oberflächen der Badewanne und des Zubehörs mit einer weichen Bürste oder einem Tuch.
10. Drücken Sie auf die Türdichtungs-/Abflusstaste, um den Abfluss zu öffnen.
11. Spülen Sie alle Teile mit viel Wasser und mit einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab, um alle Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen.
12. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel.
13. Wischen Sie alle anderen Kontaktflächen, wie die Außenseite der Badewanne (insbesondere die Fläche wo der Kopf aufliegt), die Metallsensoren und die Türdichtungen ab.
14. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie alle Rückstände des Desinfektionsmittels von den Kontaktstellen.

### Reinigen/Desinfizieren

15. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf.
16. Schließen Sie den Abfluss.
17. Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und das Zubehör auf dem Boden der Wanne mit Desinfektionsmittel. Drehen Sie das Zubehör herum und besprühen Sie es auch auf der anderen Seite. Achten Sie auf Teile, Schalter und Sensoren in der Wannenoberfläche, wie z. B. die Sicherheitsgurtknaufe oder die Überlauföffnung.
18. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel.
19. Wischen Sie alle anderen Kontaktflächen, wie die Außenseite der Badewanne (insbesondere die Fläche wo der Kopf aufliegt), die Metallsensoren und die Türdichtungen ab.
20. Das Desinfektionsmittel den Anweisungen des Desinfektionsmittelbehälters entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.
21. Öffnen Sie den Abfluss.
22. Spülen Sie alle Teile mit viel Wasser und mit einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab, um alle Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen. Benutzen Sie die Dusche, um das Desinfektionsmittel zu entfernen.
23. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie alle Rückstände des Desinfektionsmittels von den Kontaktstellen.
24. Heben Sie die Tür an, bis sie in der obersten Position ist.
25. Lassen Sie es lufttrocknen.

# Freedom Bath



## Mit Desinfektionsmittel-/Spüleinlass und einer MultiClean-Einheit

Informationen zur MultiClean-Einheit entnehmen Sie dem Abschnitt MultiClean-Einheit in der Bedienungsanleitung.

### Entfernen sichtbarer Rückstände

1. Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.
2. Sicherstellen, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind.
3. Öffnen Sie den Abfluss, um alles Restwasser abzulassen.
4. Das Zubehör wie Nackenkissen und Sicherheitsgurt abnehmen und auf den Wannenboden legen.
5. Spülen Sie die Badewanne und das Zubehör ab, um sichtbare Rückstände zu entfernen.

### Reinigung

6. Stecken Sie die Desinfektionsdusche in den Desinfektionsmittel-/Spüleinlass und drehen Sie ihn zur Befestigung in eine beliebige Richtung.
7. Halten Sie den Hebelgriff gedrückt, bis das Desinfektionsmittel aus allen Düsen des Luftperlbads (Air Spa) strömt.
8. Lassen Sie es weitere 30 Sekunden laufen.
9. Lösen Sie den Hebel, und nehmen Sie die Desinfektionsdusche aus dem Desinfektionsmittel-/Spüleinlass.
10. Stecken Sie den Wassersprühgriff in den Desinfektionsmittel-/Spüleinlass und drehen Sie ihn zur Befestigung in eine beliebige Richtung.
11. Halten Sie den Hebelgriff gedrückt, bis klares Wasser aus allen Düsen strömt.
12. Lassen Sie es weitere 30 Sekunden laufen.
13. Nehmen Sie den Duschgriff aus dem Desinfektionsmittel-/Spüleinlass.
14. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Verwenden Sie für die Reinigung des Ablaufs eine Bürste mit einem langen Griff.
15. Durch Anheben der Tür in die obere Position den Abfluss schließen.
16. Sprühen Sie Desinfektionsmittel auf alle Innenflächen der Badewanne und des Zubehörs. Drehen Sie das Zubehör herum und besprühen Sie es auch auf der anderen Seite. Achten Sie auf Teile, Schalter und Sensoren in der Wannenoberfläche, wie z. B. die Sicherheitsgurtknaufe oder die Überlauföffnung.
17. Reinigen Sie alle Badewannenflächen und das Zubehör mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einem Tuch (um alle Ablagerungen, wie z. B. Hautschuppen, zu entfernen).
18. Drücken Sie auf die Türdichtungs-/Abflusstaste, um den Abfluss zu öffnen.
19. Spülen Sie alle Teile mit viel Wasser und mit einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab, um alle Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen.
20. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel.
21. Wischen Sie alle anderen Kontaktflächen, wie die Außenseite der Badewanne, die Metallsensoren und die Türdichtungen ab.
22. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie alle Rückstände des Desinfektionsmittels von den Kontaktstellen.

### Reinigen/Desinfizieren

23. Stecken Sie die Desinfektionsdusche in den Desinfektionsmittel-/Spüleinlass und drehen Sie ihn zur Befestigung in eine beliebige Richtung.
24. Halten Sie den Hebelgriff gedrückt, bis das Desinfektionsmittel aus allen Düsen des Luftperlbads (Air Spa) strömt.
25. Lassen Sie es 30 Sekunden laufen.

26. Lösen Sie den Hebel, und nehmen Sie die Desinfektionsdusche aus dem Desinfektionsmittel-/Spüleinlass.
27. Das Desinfektionsmittel den Anweisungen des Desinfektionsmittelbehälters entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.
28. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf.
29. Schließen Sie den Abfluss.
30. Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und das Zubehör auf dem Boden der Wanne mit Desinfektionsmittel. Drehen Sie das Zubehör herum und besprühen Sie es auch auf der anderen Seite. Achten Sie auf Teile, Schalter und Sensoren in der Wannenoberfläche, wie z. B. die Sicherheitsgurtknaufe oder die Überlauföffnung.
31. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel.
32. Wischen Sie alle anderen Kontaktflächen, wie die Außenseite der Badewanne, die Metallsensoren und die Türdichtungen ab.
33. Das Desinfektionsmittel den Anweisungen des Desinfektionsmittelbehälters entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.
34. Öffnen Sie den Abfluss.
35. Stecken Sie den Wassersprühgriff in den Desinfektionsmittel-/Spüleinlass und drehen Sie ihn zur Befestigung in eine beliebige Richtung.
36. Halten Sie den Hebelgriff gedrückt, bis klares Wasser aus allen Düsen strömt.
37. Lassen Sie es weitere 30 Sekunden laufen.
38. Nehmen Sie den Duschgriff aus dem Desinfektionsmittel-/Spüleinlass.
39. Spülen Sie alle Teile mit viel Wasser und mit einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab, um alle Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen. Benutzen Sie die Dusche, um das Desinfektionsmittel zu entfernen.
40. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie alle Rückstände des Desinfektionsmittels von den Kontaktstellen.
41. Heben Sie die Tür an, bis sie in der obersten Position ist.
42. Drücken Sie die ON/OFF-Taste des Luftperlbads (Air Spa), um das Gebläse zu starten. Dieses wird dann eine Minute lang aktiviert sein.
43. Lassen Sie es lufttrocknen.

