


## Transportieren einer Person aus dem Bett




Stellen Sie sicher, dass die Wegstrecke keine Hindernisse aufweist, um das Risiko von Einklemmungen zu vermeiden.

**1**

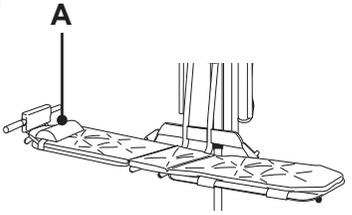


Befestigen Sie das Kopfkissen (A) am gewünschten Kopfende.

**2**

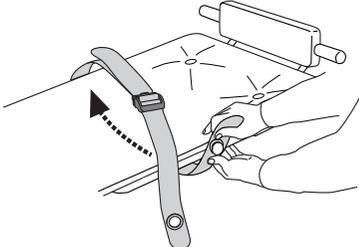


Befestigen Sie den Hüftsicherheitsgurt über den Knopf. Legen Sie den Sicherheitsgurt oben auf die Liege.

**3**

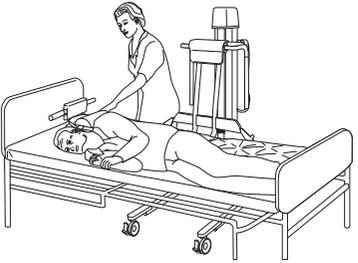


Drehen Sie den Patienten auf die Seite. Schieben Sie den Bolero Liegelifter nahe an den Patienten heran und senken Sie ihn so weit ab, bis er fest auf dem Bett aufliegt.

**4**

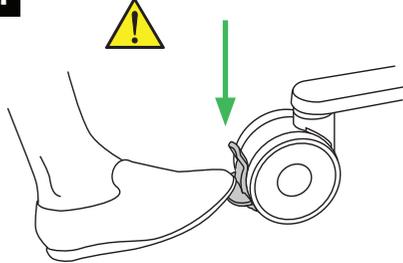


Betätigen Sie alle Lenkrollenbremsen.

**5**

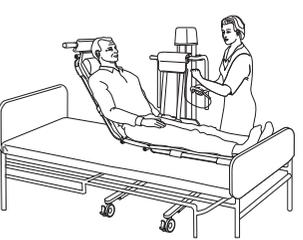


Drehen Sie den Patienten auf die Liege. Heben Sie die Rückenlehne an. Prüfen Sie, dass die Rückenlehne gesperrt ist.

**6**

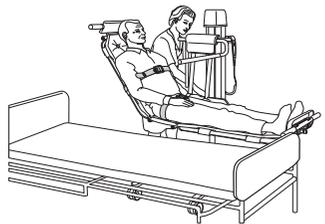


Schließen Sie den Sicherheitsgurt über dem Brustbereich. Heben Sie die Liege an und befestigen Sie den Sicherheitsgurt über der Hüfte. Senken Sie den Griff.

**7**

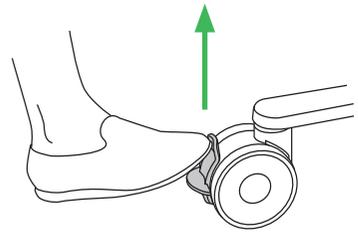

Lösen Sie die Lenkrollenbremsen.

**8**

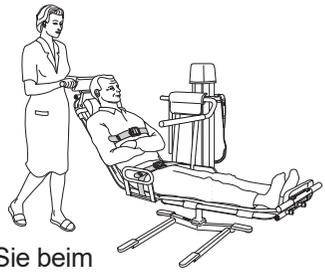

Achten Sie beim Absenken auf ortsfeste Objekte.

Ziehen Sie den Bolero Liegelifter vom Bett weg und senken Sie ihn auf eine bequeme Höhe ab.


## Transfer einer Person in das Bett

1




Heben Sie den Bolero Liegelifter auf eine Höhe an, die es ermöglicht, ihn über das Bett zu positionieren.

2

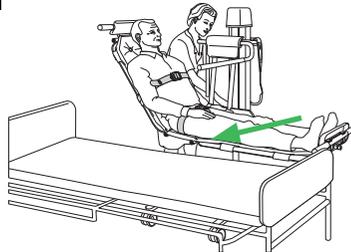


Bewegen Sie den Bolero Liegelifter über das Bett.

3

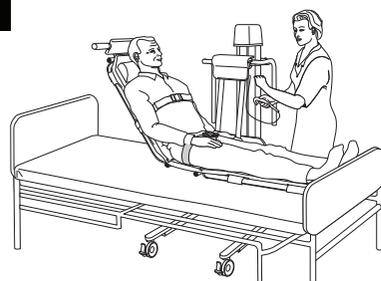

Senken Sie den Bolero Liegelifter so weit ab, dass er fest auf dem Bett aufliegt.

4

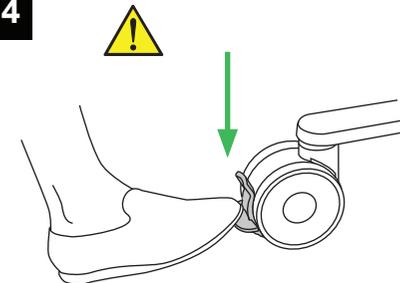

Betätigen Sie alle Lenkrollenbremsen.


5



Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsseiten oben sind.

Entfernen Sie die Sicherheitsgurte. Senken Sie die Rückenlehne ab. Drehen Sie den Patienten vom Bolero Liegelifter herunter auf das Bett.

6

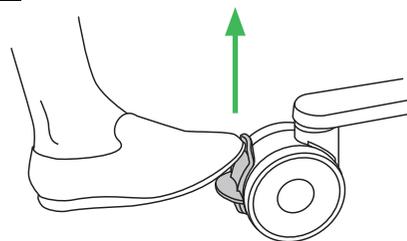

Lösen Sie die Lenkrollenbremsen und ziehen Sie den Bolero Liegelifter vom Bett weg.

## Baden des Patienten


1

Lesen Sie die separaten Anweisungen für Ihr Badesystem durch.

### HINWEIS

Lesen Sie vor dem Baden die Sicherheitsvorschriften in der Bedienungsanleitung.


2

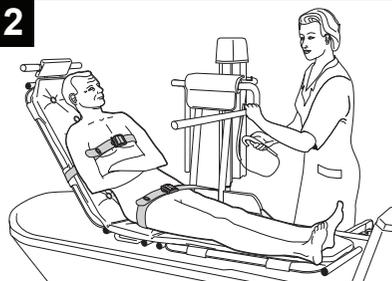

 Patient gemäß Bedienungsanleitung positioniert.

Heben Sie den Bolero Liegelifter über den Wannenrand. Bewegen Sie den Patienten über die Badewanne.

3

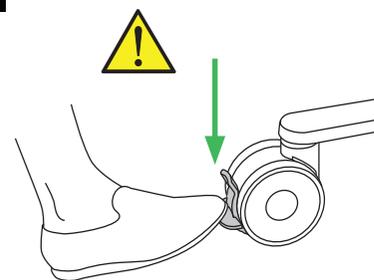

Betätigen Sie alle Lenkrollenbremsen.

4




Heben Sie die Badewanne auf eine ergonomische Höhe an. Senken Sie den Bolero Liegelifter ab, bis er auf dem Badewannenboden aufliegt.

5


Entfernen Sie den Brustsicherheitsgurt und lösen Sie den Hüftsicherheitsgurt. Baden Sie dann den Patienten.

6

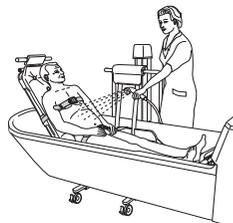


Schließen Sie nach dem Baden die Sicherheitsgurte. Heben Sie den Bolero Liegelifter über das Wasser und duschen Sie den Patienten ab. Trocken Sie den Patienten nach dem Duschen ab.

7

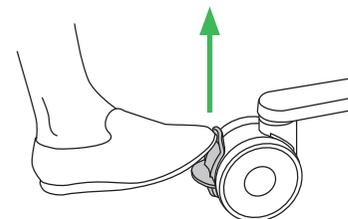

Lösen Sie die Lenkrollenbremsen.

8

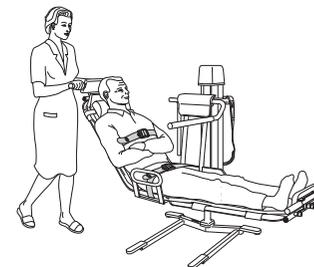

Legen Sie den Patienten wieder ins Bett.