

# Bolero

## Forflytning fra sengen




CE  
2797




Kontroller at bevegelsesbanen er fri for hindringer for å unngå at noe setter seg fast.

1

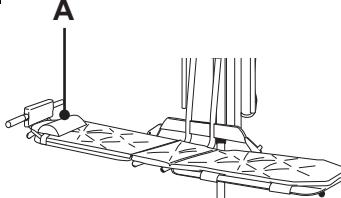


Fest puten (A) i den ønskede hodeenden.

2

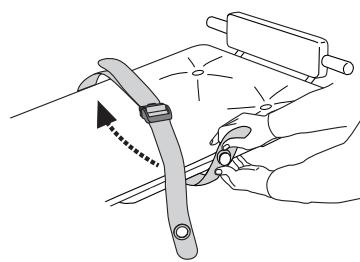


Fest hoftesikkerhetsbeltet til knappen. Legg sikkerhetsbeltet over båren.

3

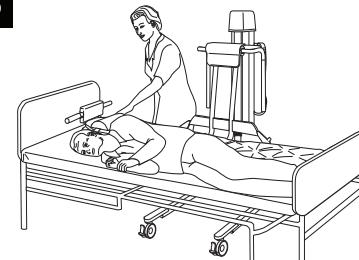


Rull pasienten over på siden. Flytt Bolero badevogn nær pasienten, og senk den slik at den hviler trygt på sengen.

4

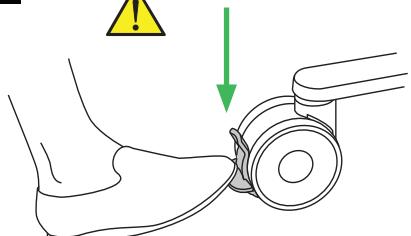


Sett på bremsene på alle hjulene.

5

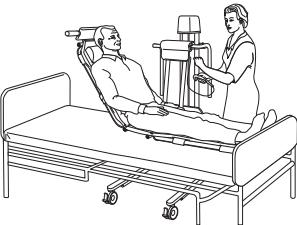


Rull pasienten over på båren. Hev ryggstøtten. Kontroller at ryggstøtten er låst.

6

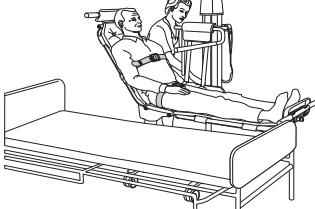


Fest sikkerhetsbeltet over brystet. Hev båren, fest sikkerhetsbeltet over hofteiene. Senk håndtaket.

7

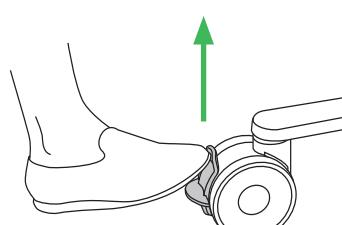

Ta av hjulbremsene.

8

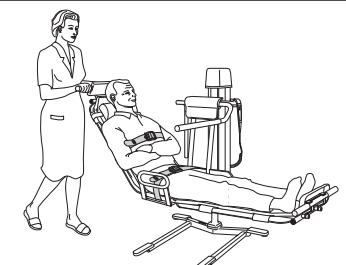

Vær oppmerksom på stasjonære gjenstander når du senker den.

Trekk Bolero badevogn ut fra sengen og senk Bolero til en komfortabel høyde.


## Forflytning til sengen

1




Hev Bolero badevogn til en høyde der det er mulig å bevege den inn over sengen.

2

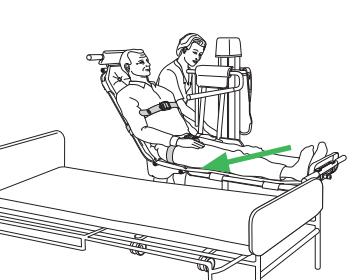


Flytt Bolero badevogn inn over sengen.

3

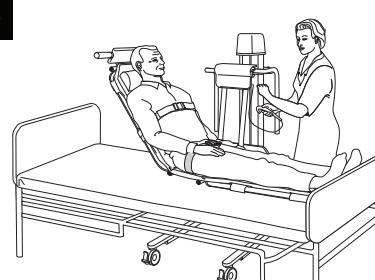


Senk slik at Bolero badevogn hviler trygt på sengen.

4

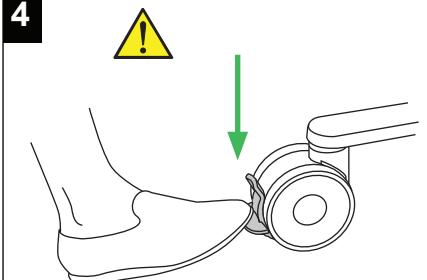

Sett på bremsene på alle hjulene.

5

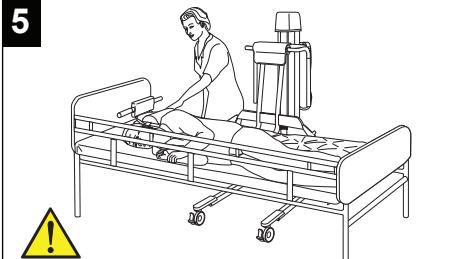


Pass på at sengehesten på sengen er hevet.

Fjern sikkerhetsbeltene.  
Senk ryggstøtten.

Rull pasienten av Bolero badevogn og inn på sengen.

6

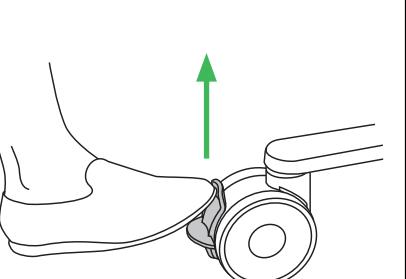

Ta av hjulbremsene og trekk Bolero badevogn ut fra sengen.

# Bad pasienten


1

Les de separate anvisningene for badesystemet.

MERK

Les sikkerhetsinstruksene i bruksanvisningen før bading.


2

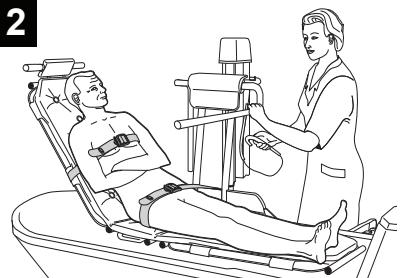

**!** Plasser pasienten i samsvar med bruksanvisningen.

Hev Bolero badevogn slik at den går klar av kanten. Flytt pasienten over badekaret.

3

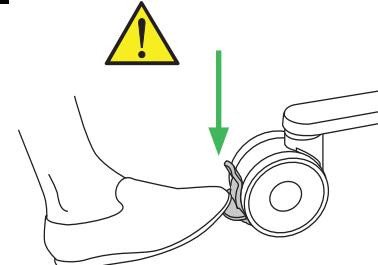

Sett på bremsene på alle hjulene.

4




Hev badekaret til ergonomisk høyde.  
Senk Bolero badevogn slik at den hviler mot bunnen av badekaret.

5


Fjern sikkerhetsbeltet over brystet, løsne sikkerhetsbeltet over hofteiene, og bad pasienten.

6

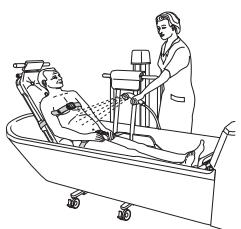


Etter bading skal du feste sikkerhetsbelte. Hev Bolero badevogn over vannet og dusj pasienten.  
Tørk pasienten etter dusjen.

7

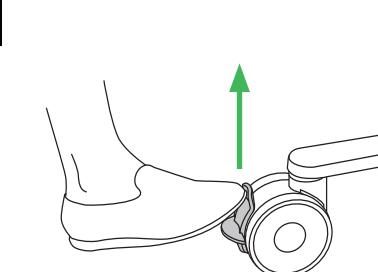

Ta av hjulbremsene.

8

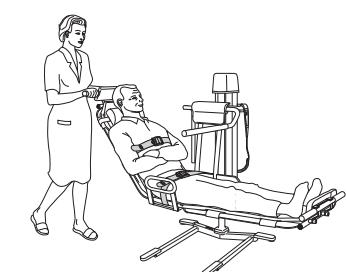

Flytt pasienten tilbake til sengen.

