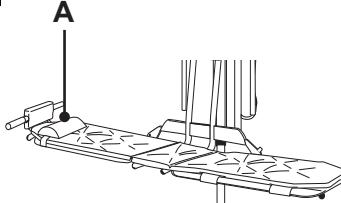


# Bolero


## Di chuyển từ giường

CE  
2797


**Để tránh vướng víu, đảm bảo  
lối đi không có vật cản.**

**1**


Siết chặt gối (A) ở phần đầu  
tại vị trí mong muốn.

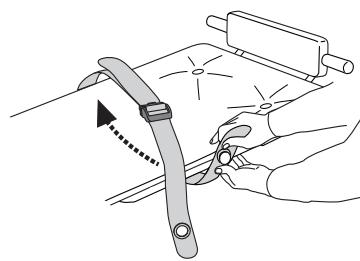**2**


Cài đai an toàn quanh hông  
qua núm. Đặt đai an toàn  
nằm trên cáng.

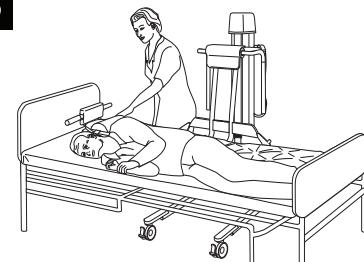**3**


Lăn bệnh nhân sang một bên.  
Di chuyển xe đẩy đi tắm Bolero  
đến gần bệnh nhân và hạ xuống  
sao cho xe đẩy tựa chắc chắn  
vào giường.

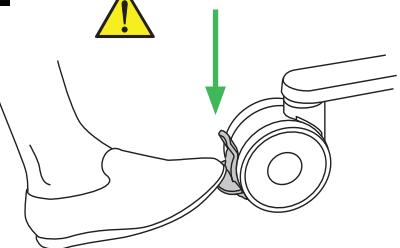**4**


Cài phanh trên tất cả các  
bánh xe.

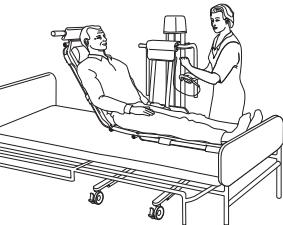**5**


Lăn bệnh nhân lên cáng.  
Nâng tấm đỡ lưng. Kiểm tra  
để đảm bảo tựa lưng đã khóa.

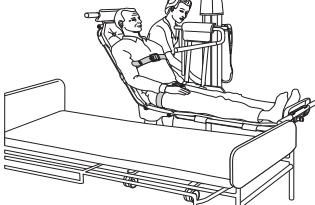**6**

Siết chặt đai an toàn qua ngực.  
Nâng cáng, siết chặt đai qua  
hông. Hạ tay cầm xuống.

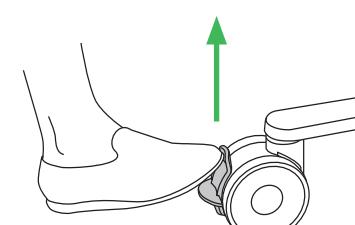**7**

Nhả phanh.

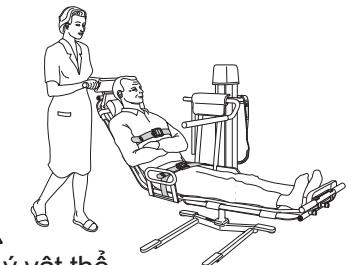**8**

Chú ý vật thể  
cố định khi hạ.

Kéo xe đẩy đi tắm Bolero ra  
khỏi giường và hạ xe Bolero  
đến chiều cao thích hợp.


## Chuyển đến giường

1




Nâng xe đẩy đi tắm Bolero  
tới độ cao có thể đưa xe vào  
sát giường.

2

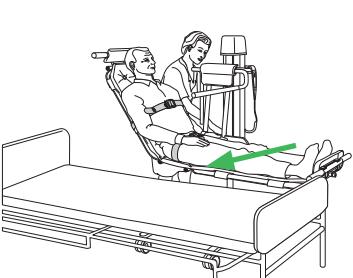


Di chuyển xe đẩy đi tắm Bolero  
vào sát giường.

3

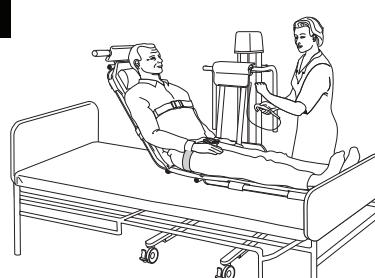


Hạ xuống sao cho xe đẩy đi tắm  
Bolero tựa chắc chắn vào giường.

4

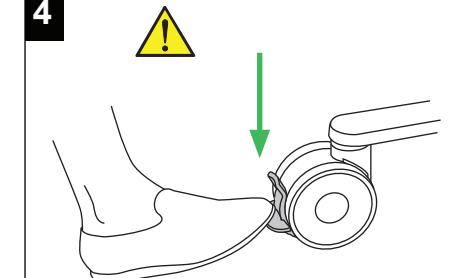

Cài phanh trên tất cả các  
bánh xe.

5

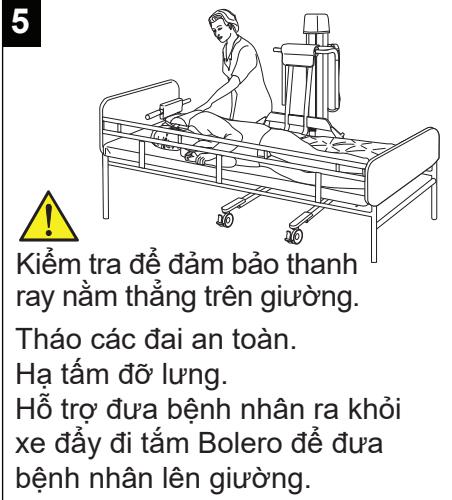

6



Nhả phanh bánh xe và kéo  
xe đẩy đi tắm Bolero ra khỏi  
giường.

# Tắm cho bệnh nhân


1

Hãy đọc hướng dẫn riêng dành cho hệ thống bồn tắm của bạn.

## LƯU Ý

Đọc hướng dẫn an toàn trong IFU trước khi tắm.


2

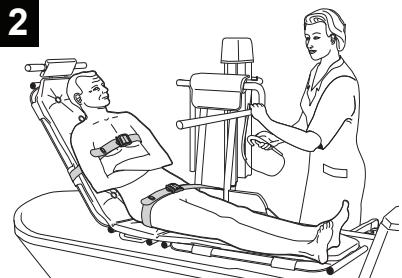

**!** Đặt bệnh nhân đúng vị trí theo hướng dẫn trong IFU.

Nâng xe đẩy đi tắm Bolero để làm sạch mép cạnh. Di chuyển bệnh nhân qua bồn tắm.

3

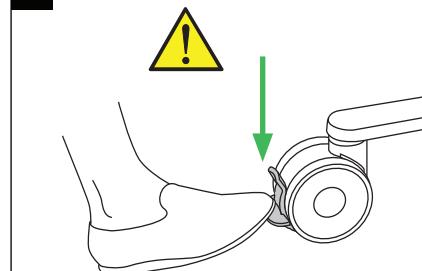

Cài phanh trên tất cả các bánh xe.

4




Nâng bồn tắm tới độ cao phù hợp.  
Hạ xe đẩy đi tắm Bolero sao cho xe nằm trên đáy bồn tắm.

5


Tháo đai an toàn trên ngực ra và nới lỏng đai an toàn ở hông, sau đó tắm cho bệnh nhân.

6

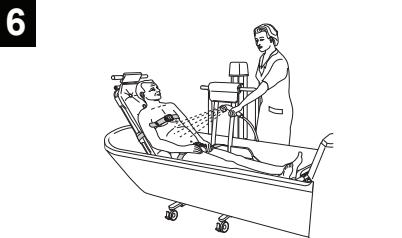


Sau khi tắm xong, siết chặt đai an toàn. Nâng xe đẩy đi tắm Bolero nằm trên mặt nước, sau đó tắm cho bệnh nhân bằng vòi sen.  
Lau khô cho bệnh nhân sau khi tắm bằng vòi sen.

7

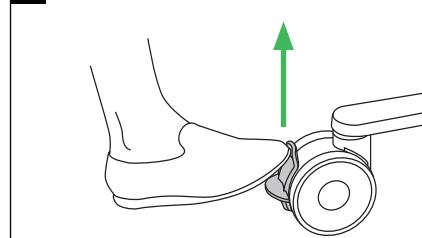

Nhả phanh.

8

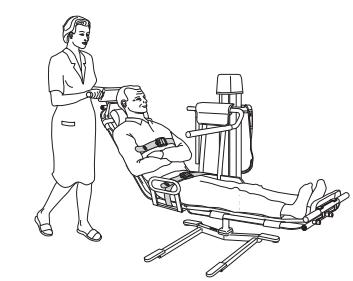

Đưa bệnh nhân trở lại giường.

