

Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

매일 세척하고 소독하십시오.
다음 환자에 사용하기 전에 세척하고 소독하십시오.

필수 액세서리:

- 보호 장갑
- 보호 안경
- 소독제를 병에 분무하십시오(통합형 소독 시스템은 해당하지 않음).
- 물을 병(또는 샤워기 손잡이)에 분무하십시오.
- 마른 천과 젖은 천
- 일회용 수건
- 부드러운 솔
- 손잡이가 긴 부드러운 솔

참고

이 세척 및 소독 절차는 Miranti와 통합형 소독 시스템을 예시로 설명하였습니다.

경고




눈과 피부 손상을 방지하기 위해 항상 보안경과 장갑을 사용하십시오. 접촉한 경우 충분한 물로 씻어냅니다. 눈이나 피부에 자극이 있으면 의사에게 문의하십시오. 항상 소독제의 사용 및 안전성 데이터 시트(SDS)에 관한 지침을 읽으십시오.

교차 오염을 방지하려면, 항상 본 사용 지침의 소독 지침을 따르십시오.

눈 또는 피부 자극을 방지하려면 환자가 있는 곳에서 절대 소독을 하지 마십시오.

외관상의 잔여물 제거하기

1

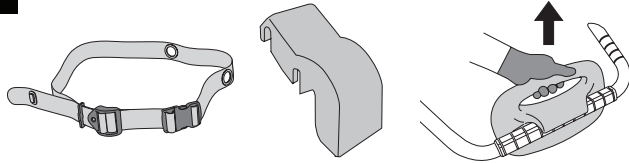

Miranti: 머리 받침, 허벅지 지지 쿠션, 환자 안전 손잡이 및 안전 벨트를 제거하십시오.


Bolero: 매트리스 및 안전 벨트를 제거하십시오.

Alenti: 등받이 및 안전 벨트를 제거하십시오.

Calypso: 시트, 시트 삽입물, 등받이 및 안전 벨트를 분리하십시오.

부속장치를 욕조 바닥에 위치시키십시오.

2

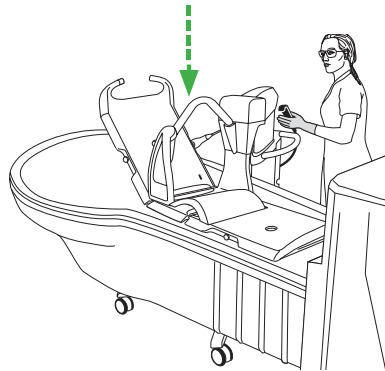

위생 리프트를 욕조 위에 배치시킨 후 높이를 낮춥니다.

3



물에 적신 천을 사용하여 육안으로 보이는 잔여물을 닦거나 솔을 사용하여 물을 뿌리고 문질러 닦으십시오. 위생 리프트를 위에서부터 아래로 세척하십시오.
모든 분리된 부품을 세척하십시오.

다음 페이지에서 이후 단계가 계속됨

4




보호 안경과 장갑을 착용하십시오.

5




소독 시스템 및 소독제
사용에 관한 별도의
지침을 읽으십시오.

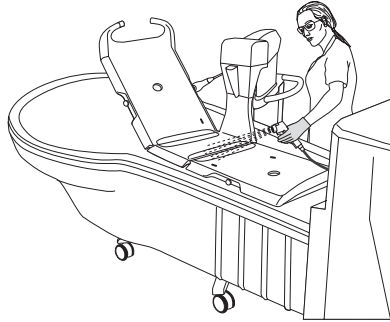


위생 리프트 및 모든 분리된 부품에 소독제를 분사합니다.
소독제를 병에 분사하거나 욕조의 통합형 소독 시스템을
사용하십시오.

6

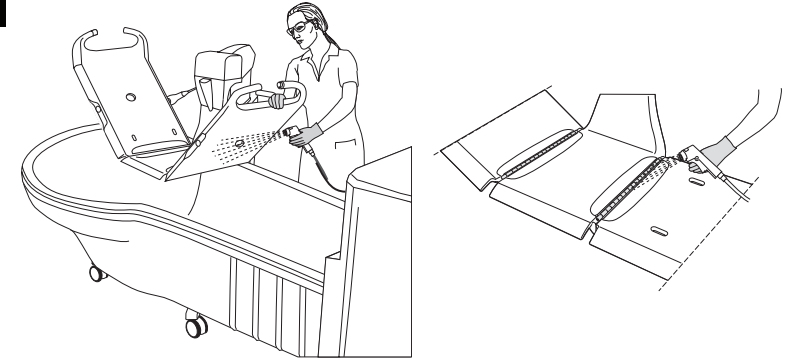


소독제를 적신 솔로 손잡이, 핸드셋 제어장치, 경첩 및 위생 리프트의
아래 쪽을 철저히 문질러 닦으십시오.

7

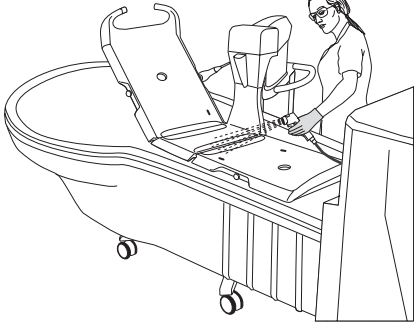


물(약 25 °C (77 °F))을 뿌리거나 물을
분사하여 깨끗한 천으로 닦아냅니다.

8

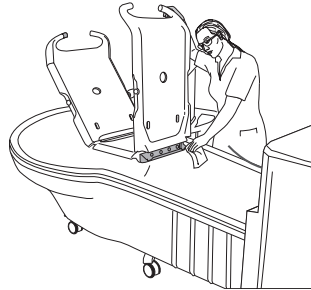


천에 소독제를 적셔 다른 모든 부분을
닦아냅니다.

9

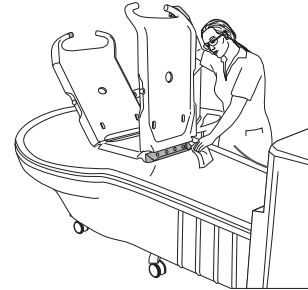

새로운 천을 물에 적셔 다른 부분에
남아있는 소독제 자국을 모두
제거합니다. 이 천은 자주 흐르는
물에 헹구어야 합니다.


10

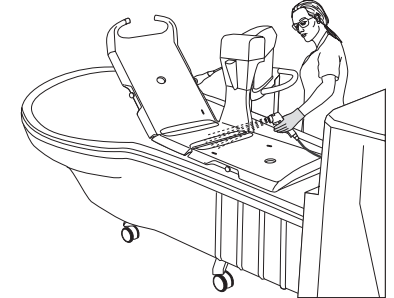

소독제를 완전히 제거할 수 없는 경우 영향을
받은 부품에 물을 분사하고 모든 소독제가 제거될
때까지 일회용 수건으로 닦아내십시오.


다음 페이지에서 이후 단계가 계속됨

11

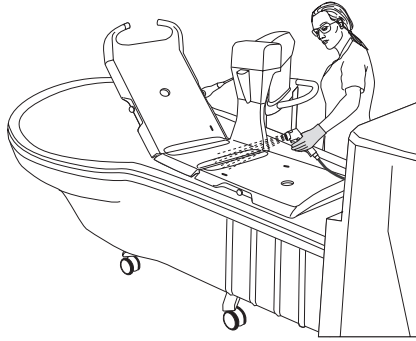


위생 리프트 및 모든 분리된 부품에 소독제를 분사합니다.

12

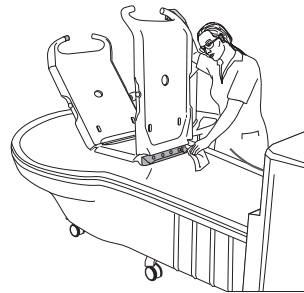


천에 소독제를 적셔 다른 모든 부분을 닦아냅니다.

13

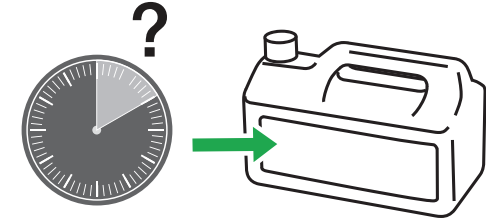


소독제 지침에 따른 소독 시간 동안 기다립니다.

14

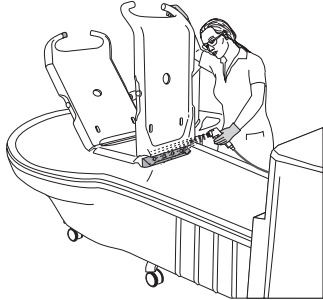


물을 뿌리거나 분사한 후 깨끗한 천으로 닦아내어 위생 리프트, 샤페 및 모든 분리된 부품에서 남아 있는 모든 소독제를 제거합니다. 이 천은 자주 흐르는 물에 행구어야 합니다.

15

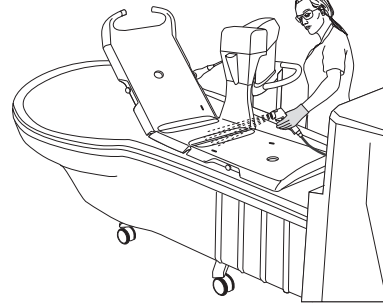

소독제를 완전히 제거할 수 없는 경우 영향을 받은 부품에 물을 분사하고 모든 소독제가 제거될 때까지 일회용 수건으로 닦아내십시오.

16

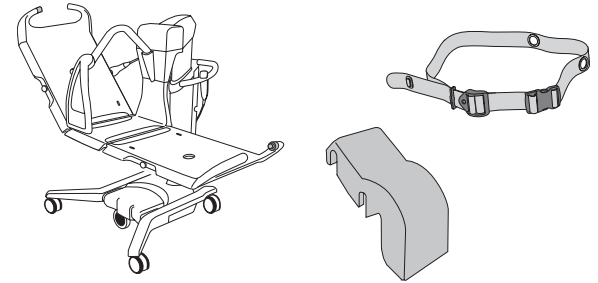

모든 부품을 건조시키십시오.

