

Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

Valykite ir dezinfekuokite kasdien.
Valykite ir dezinfekuokite prieš naują pacientą.

Reikalingi priedai

- Apsauginės pirštinės
- Apsauginiai akiniai
- Purškalo buteliukas su dezinfekavimo priemone (jei nėra integruotos dezinfekavimo sistemos)
- Purškalo buteliukas (ar dušo rankenėlė) su vandeniu
- Šluostės – drėgna ir sausa
- Vienkartiniai rankšluosčiai
- Minkštas šerių šepetėlis
- Minkštas šerių šepetėlis su ilga rankena



ĮSPĖJIMAS




Visuomet dėvėkite apsauginius akinius ir mūvėkite apsaugines pirštines, kad nesusižalotumėte akių ir odos. Esant sąlyčiui nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Jeigu akys ar oda sudirginamos, kreipkitės į gydytoją. Visuomet perskaitykite dezinfekavimo priemonės naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapą.

Norint išvengti kryžminės taršos, būtina visuomet vykdyti šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus dezinfekavimo nurodymus.

Norint išvengti akių ar odos dirginimo, niekuomet nedezinfekuokite, kai šalia yra pacientas.

Matomų teršalų pašalinimas


1

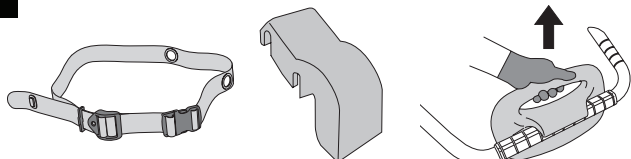

„Miranti“. Nuimkite galvos atramą, atraminę šlaunų pagalvėlę, paciento saugos rankenėlę ir saugos diržus.
„Bolero“. Nuimkite čiužinį ir saugos diržus.
„Alenti“. Nuimkite nugaros atlošą ir saugos diržą.
„Calypso“. Nuimkite sėdynes, sėdynės įdėklą, nugaros atlošą ir saugos diržą.


Padėkite priedus vonios apačioje.

2

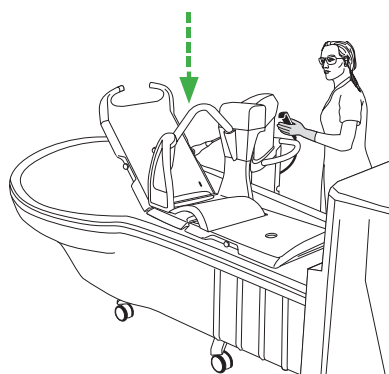

Nustatykite higienos keltuvą virš vonios ir jį nuleiskite.

3

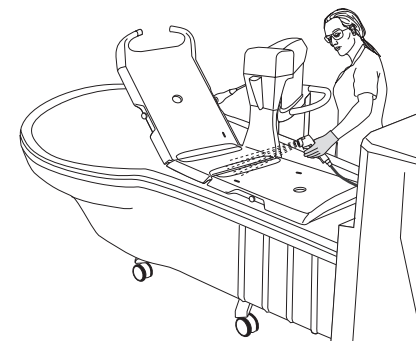

Vandeniu sudrėkinta šluoste arba po dušu, šveisdami šepetėliu nuvalykite matomus nešvarumus. Higienos keltuvą pradėkite valyti nuo viršaus ir leiskitės žemyn. Nuvalykite visas išimtas dalis.

Toliau atlikite kitame puslapyje nurodytus veiksmus

4




Užsimaukite apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius.

5





Perskaitykite atskiras dezinfekavimo sistemos ir naudojamos dezinfekavimo priemonės instrukcijas.

Užpurškite dezinfekavimo priemonės ant higienos keltuvo ir visų nuimtų dalių. Naudokite purškalo buteliuką su dezinfekavimo priemone arba integruotą vonios dezinfekavimo sistemą.

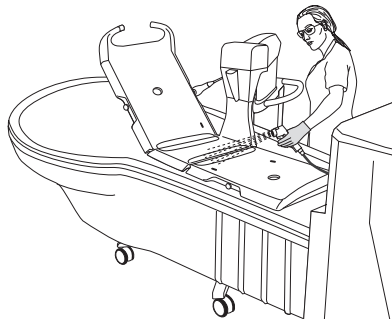


6

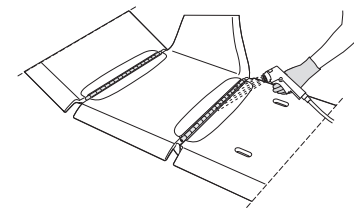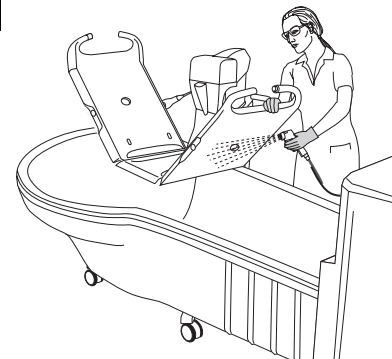


Kruopščiai nušveiskite dezinfekavimo priemone sudrėkintu šepetėliu rankenas (ypač), rankinio valdymo pultą, lankstus ir higienos keltuvo apačią.

7

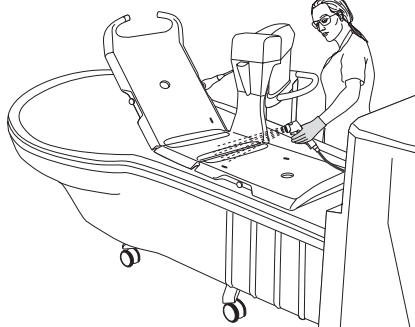

Nuplaukite po dušu vandeniu (maždaug 25 °C (77 °F) arba purškite vandenį ir nuvalykite švaria šluoste.

8

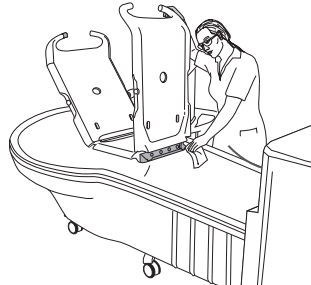


Pamirkykite šluostę dezinfekavimo priemonėje ir nuvalykite visas kitas sritis.

9



Nauja vandenyje sumirkyta šluoste nuo kitų dalių nuvalykite visus dezinfekavimo priemonės likučius. Šią šluostę retkarčiais praplaukite tekančiu vandeniu.


10

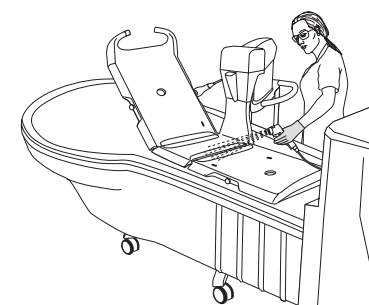

Jeigu dezinfekavimo priemonė visur nenusiplauna, ant tokių dalių purškite vandenį ir valykite vienkartiniais rankšluosčiais, kol visa dezinfekavimo priemonė bus pašalinta.


Toliau atlikite kitame puslapyje nurodytus veiksmus

11

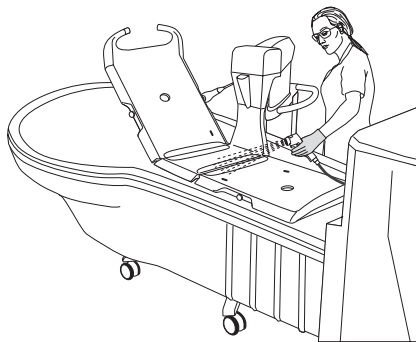


Užpurškite dezinfekavimo priemonės ant higienos keltuvo ir visų nuimtų dalių.

12

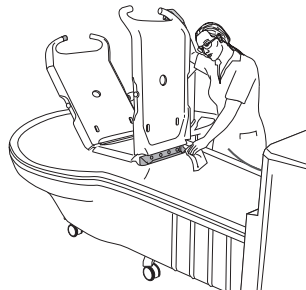


Pamirkykite šluostę dezinfekavimo priemonėje ir nuvalykite visas kitas sritis.

13

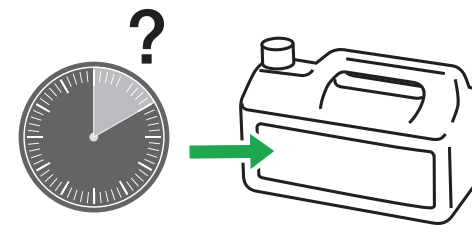


Palikite dezinfekavimo priemonę ant dezinfekuojamų paviršių, kaip nurodyta priemonės instrukcijoje.

14

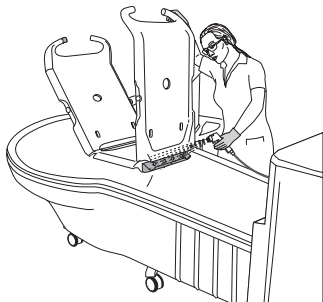


Plaukite po dušu ar purškite vandenį ir nušluostykite švaria šluoste, kad nuo higienos lifto, važiuoklės ir visų nuimtų dalių pašalintumėte visus dezinfekavimo priemonės likučius. Šią šluostę retkarčiais praplaukite tekančiu vandeniu.

15

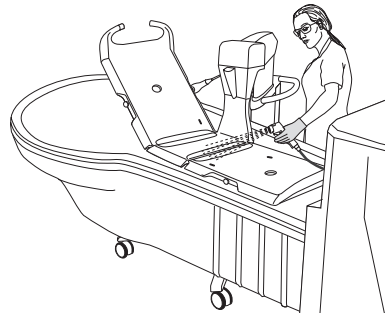

Jeigu dezinfekavimo priemonė visur nenusiplauna, ant tokių dalių purškite vandenį ir valykite vienkartiniais rankšluosčiais, kol visa dezinfekavimo priemonė bus pašalinta.

16

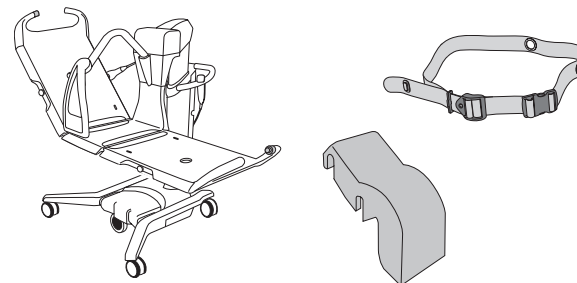

Palikite visas dalis išdžiūti.

