

Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

Curățați și dezinfectați zilnic.

Curățați și dezinfectați înainte de următorul pacient.

Accesorii necesare:

- Mănuși de protecție
- Ochelari de protecție
- Flacon pulverizator cu dezinfectant (dacă nu este disponibil un sistem de dezinfectare integrat)
- Flacon pulverizator (sau pară de duș) cu apă
- Cârpe – umede și uscate
- Prosoape de unică folosință
- Perie cu peri moi
- Perie cu peri moi și mâner lung

NOTĂ

Procedura de curățare și dezinfectare este ilustrată, ca exemplu, cu Miranti și un sistem integrat de dezinfectare.



AVERTISMENT




Pentru a evita afectarea ochilor sau a pielii, purtați întotdeauna ochelari și mănuși de protecție. Dacă intrați în contact cu dezinfectantul, clătiți cu apă din abundență. Dacă vi se irită ochii sau pielea, consultați medicul. Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare și fișa de date de siguranță (FDS) pentru dezinfectant.

Pentru a preveni contaminarea încrucișată, respectați întotdeauna instrucțiunile de dezinfectare din Instrucțiunile de utilizare.

Pentru a evita iritarea ochilor și a pielii, nu dezinfectați niciodată în prezența unui pacient.

Îndepărtarea reziduurilor vizibile

1

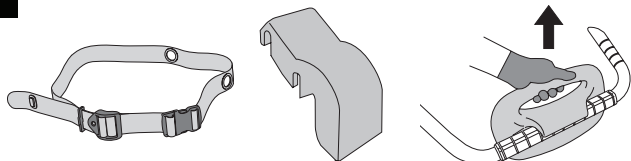

Miranti: Detașați suportul pentru cap, perna suport pentru coapsă, mânerul de siguranță pentru pacient și centurile de siguranță.


Bolero: Detașați salteaua și centurile de siguranță.

Alenti: Detașați spătarul și centura de siguranță.

Calypso: Detașați scaunul, cadrul pentru scaun, spătarul și centura de siguranță.


Puneți accesoriile pe fundul căzii.

2

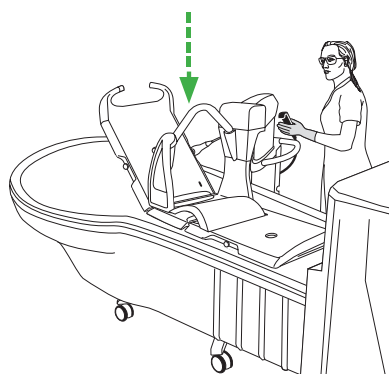

Așezați elevatorul pentru igienă deasupra căzii și coborâți-l.

3

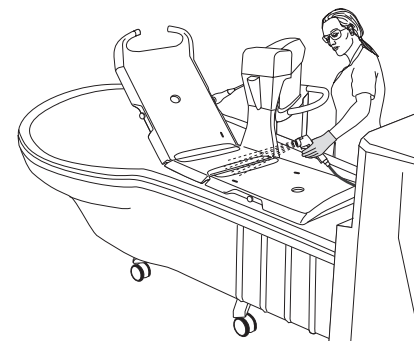

Curățați reziduurile vizibile folosind o cârpă înmuiată în apă sau spălând cu dușul și frecând cu o perie. Curățați elevatorul pentru igienă de sus în jos. Curățați toate piesele detașate.

Continuați cu pașii prezentați pe pagina următoare

4




Folosiți mănuși și ochelari de protecție.

5





Citiți instrucțiunile separate pentru sistemul de dezinfectare și dezinfectantul folosit.

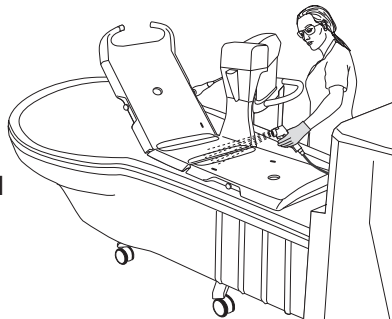


Pulverizați dezinfectant pe elevatorul pentru igienă și pe toate piesele detașate. Utilizați un flacon pulverizator cu dezinfectant sau utilizați sistemul integrat de dezinfectare al băii.

6

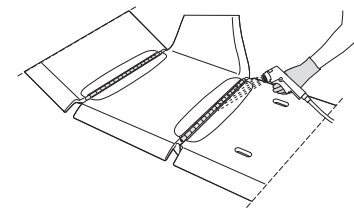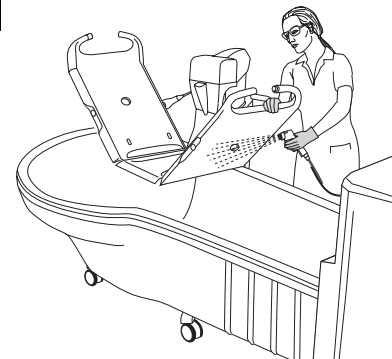


Frecați bine peste tot cu o perie înmuiată în dezinfectant, îndeosebi pe mânere, telecomandă, balamale și în partea de dedesubt a elevatorului pentru igienă.

7

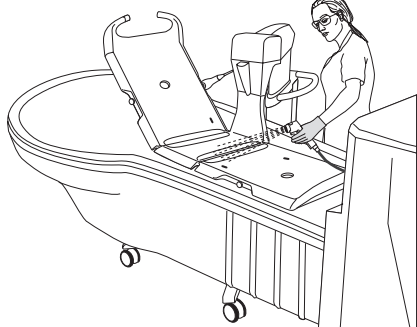

Spălați cu dușul (cu apă la aprox. 25 °C (77 °F)) sau pulverizați apă și ștergeți cu o cârpă curată.

8

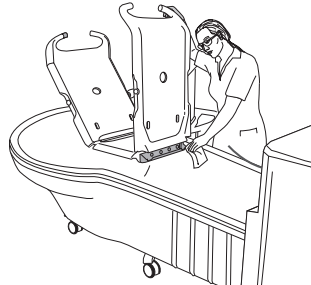


Înmuiiați o cârpă în dezinfectant și ștergeți toate celelalte zone.

9



Îndepărtați cu o cârpă nouă și înmuiată în apă toate urmele de dezinfectant de pe celelalte zone. Clătiți din când în când cârpa cu apă.


10

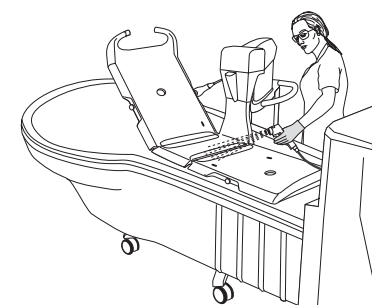

Dacă dezinfectantul nu poate fi îndepărtat în totalitate, pulverizați apă pe piesa afectată și ștergeți cu prosoape de unică folosință până la îndepărtarea totală a dezinfectantului.


Continuați cu pașii prezentați pe pagina următoare

11

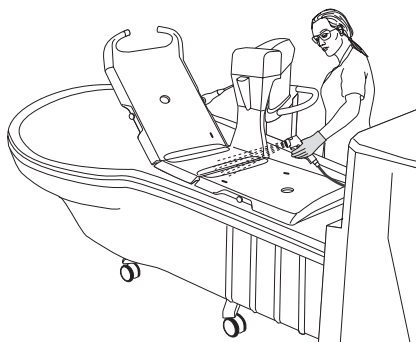


Pulverizați dezinfectant pe elevatorul pentru igienă și pe toate piesele detașate.

12

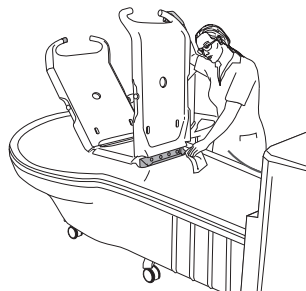


Înmuiiați o cârpă în dezinfectant și ștergeți toate celelalte zone.

13

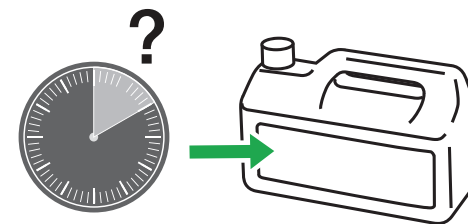


Lăsați produsul să acționeze o anumită perioadă, conform instrucțiunilor dezinfectantului.

14

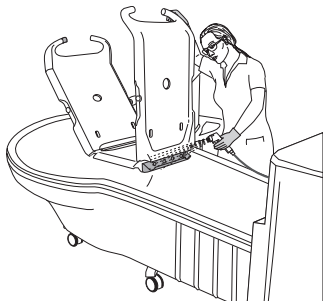


Spălați cu dușul sau pulverizați apă și ștergeți cu o cârpă curată pentru a îndepărta toate urmele de dezinfectant de pe elevatorul pentru igienă, șasiu și toate piesele detașate. Clătiți din când în când cârpa cu apă.

15

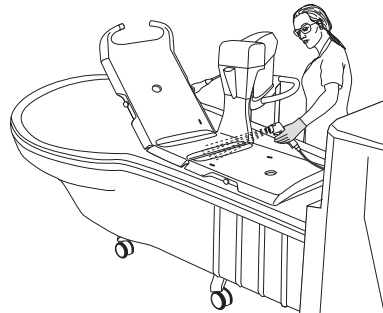

Dacă dezinfectantul nu poate fi îndepărtat în totalitate, pulverizați apă pe piesele afectate și ștergeți cu prosoape de unică folosință până la îndepărtarea totală a dezinfectantului.

16

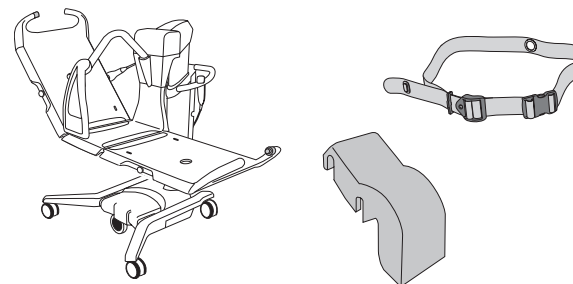

Lăsați toate piesele să se usuce.

