

Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

日常清洁与消毒。
下一个患者使用前要进行清洁与消毒。

所需配件：

- 防护手套
- 护目镜
- 装有消毒剂的喷雾瓶(如果没有一体式消毒系统)
- 装水的喷雾瓶(或花洒手柄)
- 干布和湿布
- 一次性纸巾
- 软毛刷
- 长柄软毛刷

注意

以 Miranti 和一体式消毒系统为例来说明清洁与消毒程序。

警告




为避免眼睛和皮肤受伤,请始终佩戴护目镜和手套。如果发生了接触,请使用大量水冲洗。如果眼睛或皮肤有刺痛感,请立即就医。应始终查阅消毒剂的使用说明书和安全数据表(SDS)。

为了预防交叉感染,必须始终遵守本使用说明书中的消毒说明。

为避免眼睛或皮肤过敏,切勿在患者在场时消毒。

去除可见残留物

1

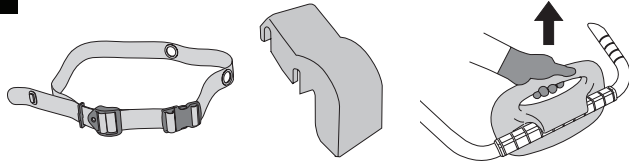

Miranti:取下头枕、大腿支撑垫、患者安全手柄和安全带。


Bolero:取下床垫和安全带。

Alenti:取下靠背和安全带。

Calypso:取下座椅、座椅镶嵌件、靠背和安全带。


将配件放在浴缸底部。

2

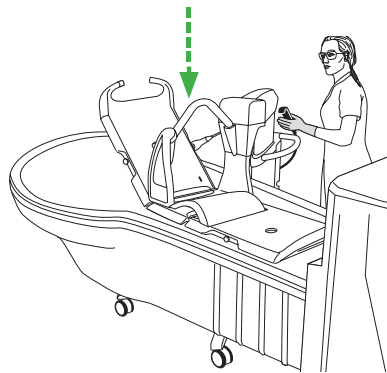

将卫生移位机放置到浴缸上方,然后将其降低。

3

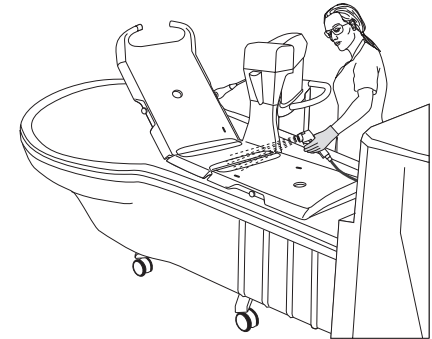

用浸水湿布清洗可见残留物,或用水冲洗并用刷子刷洗。从上往下清洁卫生移位机。
清洗所有拆下的部件。

继续执行下一页的步骤。

4



戴上防护手套和护目镜。

5




请阅读消毒系统和
使用消毒剂的单独说明




在卫生移位机及所有拆下的部件上喷洒消毒剂。
使用装有消毒剂的喷雾瓶或者使用浴缸的一体式消毒系统。

6

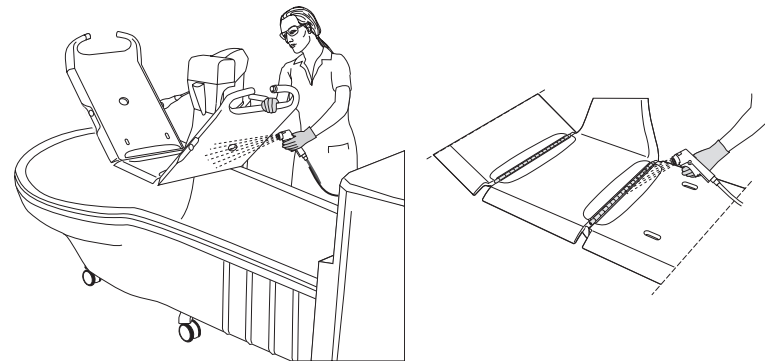

用浸过消毒剂的刷子彻底刷洗,特别是手柄、手持控制器、铰链和卫生移位机底部。

7

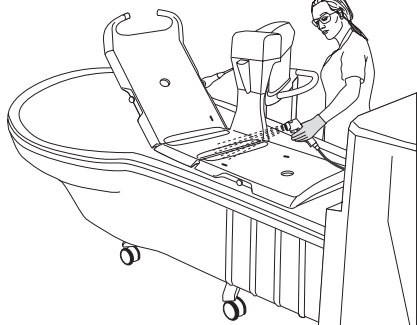


用水冲洗(水温为 25 °C (77 °F) 左右) 或者
喷水,然后用干净的布子擦拭。

8




将布子先浸在消毒剂中,然后用其
擦拭所有其他区域。

9

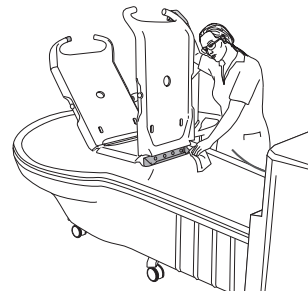

用水浸湿新布并擦掉其他区域上的
所有消毒剂痕迹。必须不时地用自
来水冲洗抹布。


10

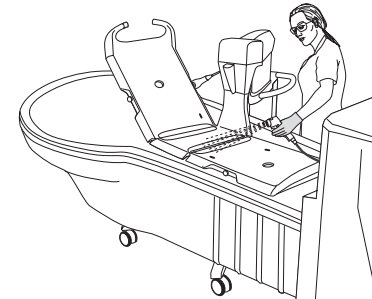

如果无法将消毒剂清除干净,可向受影响的部分
喷水,然后用一次性抹布擦掉,直至所有消毒
剂被清除。


继续执行下一页的步骤。

11

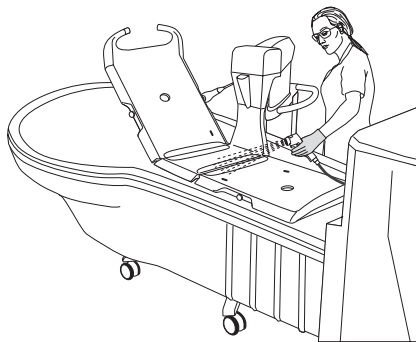


在卫生移位机及所有拆下的部件上喷洒消毒剂。

12

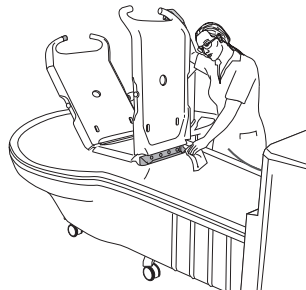


将布子先浸在消毒剂中,然后用其擦拭所有其他区域。

13

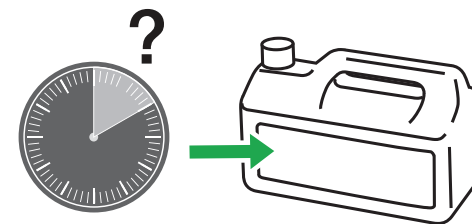

根据消毒剂使用说明留出消毒时间。

14

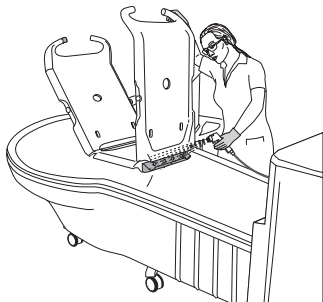


用水冲洗或者喷水,并用洁净的布子擦拭,以清除卫生移位机、底盘和所有拆下的部件上的消毒剂痕迹。必须不时地用自来水冲洗抹布。

15



如果无法将消毒剂清除干净,可向受影响部位喷水,然后用一次性抹布擦掉,直至所有消毒剂被清除。

16

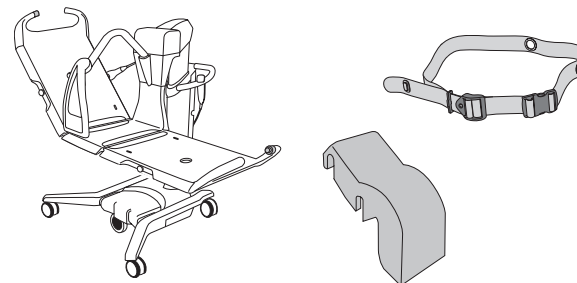

让所有部件干燥。

