

# Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

請每日清潔和消毒。

請先清潔和消毒，再讓下一位病患使用。

所需配件：

- 防護手套
- 護目鏡
- 含消毒劑的噴霧瓶 (若無) 法使用整合式消毒系統)
- 噴霧瓶 (或蓮蓬頭手柄) (含水)
- 布 — 濕與乾
- 拋棄式毛巾
- 軟毛刷
- 長柄軟毛刷

注意

清潔與消毒程序是以 Miranti 及整合式消毒系統為範例解說。

警告




為避免眼睛和皮膚受傷，請務必使用護目鏡和防護手套。如果發生接觸，應使用大量清水沖洗。如果皮膚或眼睛不適，應就醫。請務必閱讀使用手冊和消毒劑的安全性資料表 (SDS)。

為避免交叉感染，請務必遵照本使用手冊之消毒指示。

為避免對眼部或皮膚造成刺激，切勿於病患在場時進行消毒。

## 除去可見之殘餘物

1

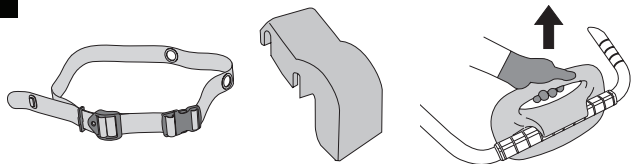

**Miranti:** 移除頭托、大腿支撐墊、病人安全把手與安全帶。


**Bolero:** 移除床墊和安全帶。

**Alenti:** 移除靠背與安全帶。

**Calypso:** 移除座椅、座椅插入件、靠背與安全帶。


把這些配件放在浴缸底部。

2

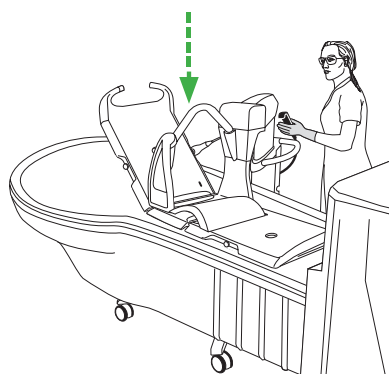

將沐浴抬升器放在浴缸上並降下。

3

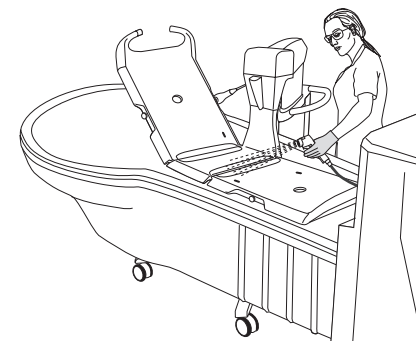

清除殘留物時，可用浸了水的抹布擦掉，或是淋水並搭配刷子來清除。請從頂端開始往下清潔沐浴抬升器。  
清潔所有卸下的零件。

繼續下一頁之步驟

## 清潔

4




戴上防護手套和護目鏡。

5




請先閱讀消毒系統及  
使用之消毒劑的個別  
指示說明。

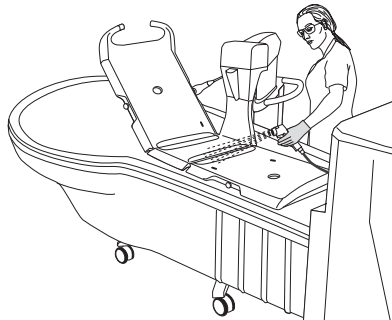


對沐浴抬升器及卸下的零件噴上消毒劑。  
使用裝有消毒劑的噴霧瓶，或使用浴室的整合式消毒系統。

6

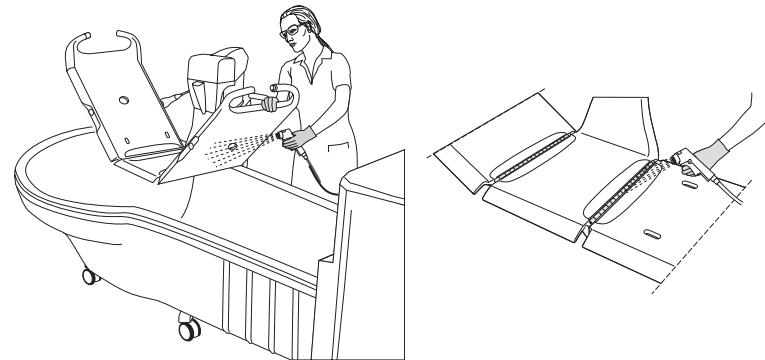


使用浸漬消毒劑的刷子徹底刷乾淨，特別是把手、手動控制器、鉸鏈和  
沐浴抬升器的底部。

7

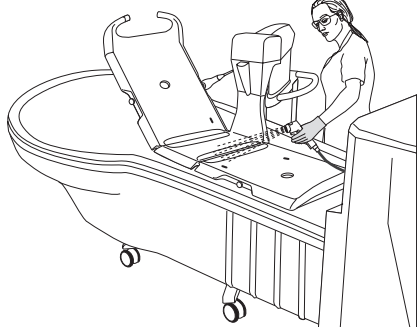


以大約 25 °C (77 °F) 的水沖淋，或噴水後  
以乾淨的抹布擦除。

8

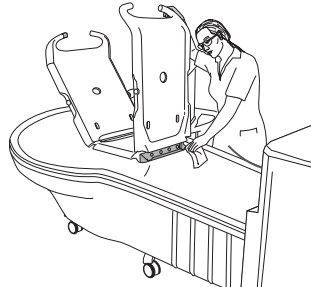


將布沾濕消毒劑，並擦拭所有其他  
部位。

9

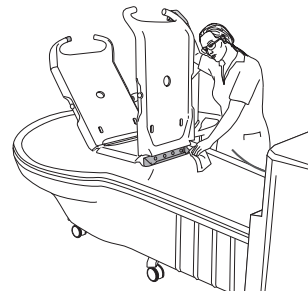

用一條沾了水的新濕布除去其他區  
域上所有的消毒劑殘跡。應偶爾以  
自來水沖洗抹布。


10

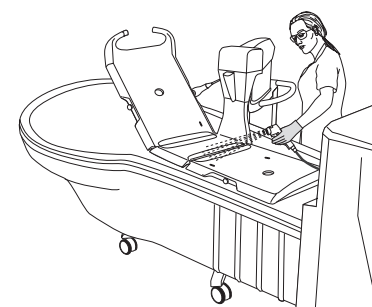

如果無法完全清除消毒劑，請在受影響的零件  
上噴水並以拋棄式紙巾擦淨，直到沒有任何殘  
留的消毒劑。


繼續下一頁之步驟

11

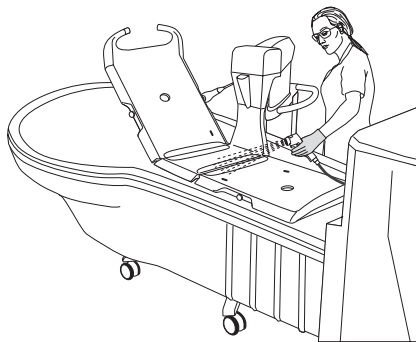


對沐浴抬升器及卸下的零件噴上消毒劑。

12

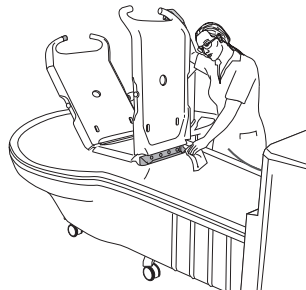


將布沾濕消毒劑，並擦拭所有其他部位。

13

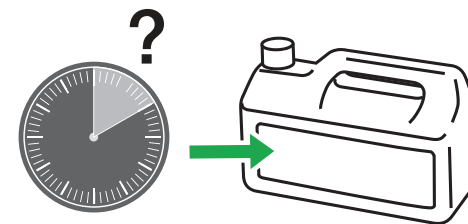


依據消毒劑的說明，將消毒劑靜置一段時間。

14

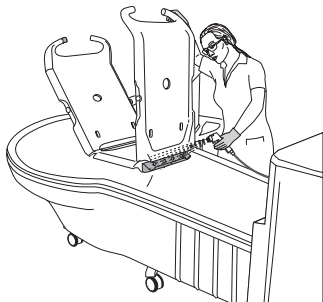


以水噴淋，並以乾淨的抹布擦除沐浴抬升器、底座及所有拆除零件上的所有殘餘消毒劑痕跡。應偶爾以自來水沖洗抹布。

15

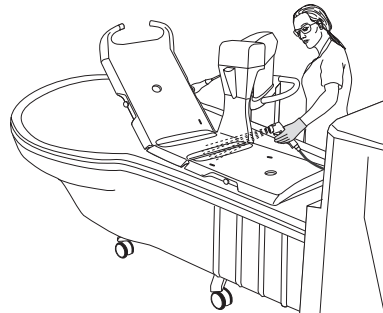

如果無法完全清除消毒劑，請在受影響的零件上噴水並以拋棄式紙巾擦淨，直到沒有任何殘留的消毒劑。

16

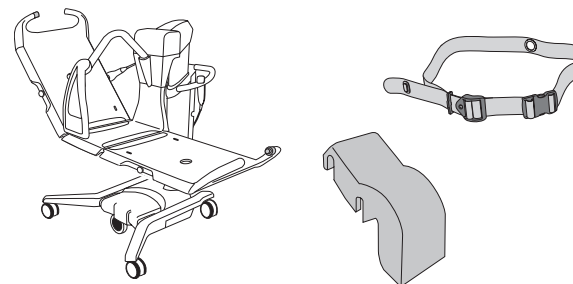

將所有零件風乾。

