

# Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

Limpie y desinfecte cada día.

Limpie y desinfecte antes del siguiente paciente.

Accesorios necesarios:

- Guantes protectores
- Gafas protectoras
- Botella con pulverizador con desinfectante (si no hay disponible ningún sistema integrado de desinfección)
- Botella con pulverizador (o cabezal de ducha) con agua
- Paños, secos y húmedos
- Toallitas desechables
- Cepillo de cerdas suaves
- Cepillo de cerdas suaves con mango largo

NOTA

El procedimiento de limpieza y desinfección se ilustra con Miranti y un sistema de desinfección integrado como ejemplos.



ADVERTENCIA




Para evitar lesiones oculares y cutáneas, utilice siempre gafas y guantes de protección. Si se produjese contacto, aclare con abundante agua. Si los ojos o la piel se irritan, póngase en contacto con un médico. Lea siempre las instrucciones de uso y la ficha de datos de seguridad (SDS) del desinfectante.

Para evitar la infección cruzada, siga siempre las instrucciones de desinfección de estas instrucciones de uso.

Para evitar que se irriten los ojos y la piel, no realice nunca la desinfección delante de un paciente.

## Limpieza de los residuos visibles

1

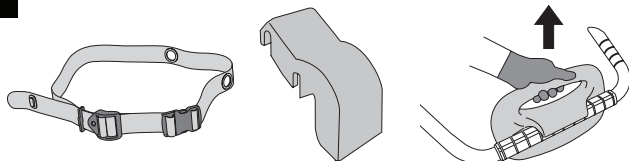

**Miranti:** retire el reposacabezas, el cojín de apoyo para los muslos, el asidero de seguridad para el paciente y las correas de seguridad.


**Bolero:** retire el colchón y las correas de seguridad.

**Alenti:** retire el respaldo y la correa de seguridad.

**Calypso:** retire los asientos, el suplemento del asiento, el respaldo y la correa de seguridad.


Coloque los accesorios en el fondo de la bañera.

2

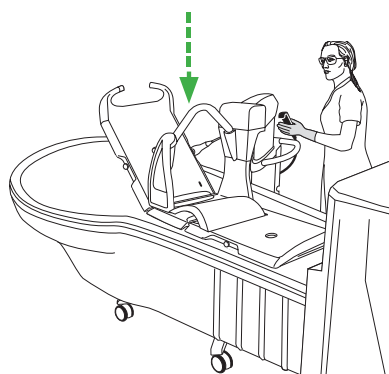

Coloque la grúa de higiene sobre la bañera y bájele.

3

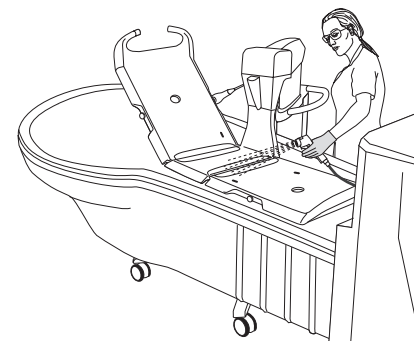

Limpie los residuos visibles con un paño humedecido con agua, o bien rocíelos con agua y frote con un cepillo. Limpie la grúa de higiene desde arriba hacia abajo. Limpie todas las piezas previamente retiradas.

Continúe con los pasos que se indican en la página siguiente.

4




Póngase gafas y guantes protectores.

5





Lea las instrucciones del sistema de desinfección y el desinfectante utilizados

Rocíe desinfectante en la grúa de higiene y en todas las piezas retiradas.  
Utilice una botella con pulverizador con desinfectante o el sistema de desinfección integrado de la bañera.

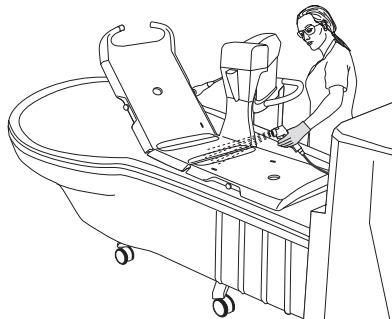


6

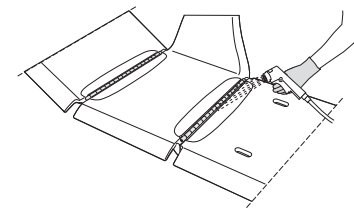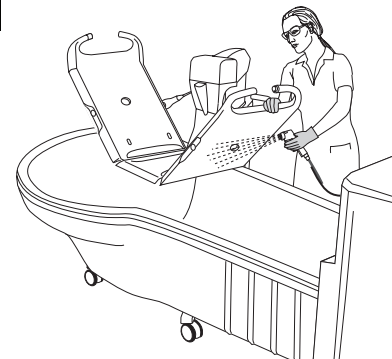


Frote a fondo con un cepillo humedecido con desinfectante, sobre todo las asas, el mando de control, las bisagras y la parte inferior de la grúa de higiene.

7

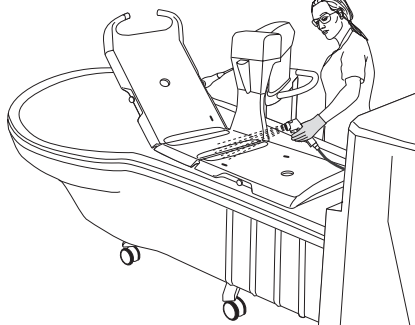


Utilice el pulverizador o lave con agua de la ducha (a 25 °C [77 °F] aprox.) y seque con un paño limpio.

8

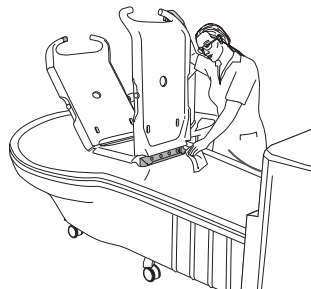


Empape un paño en desinfectante y limpie el resto de zonas.

9

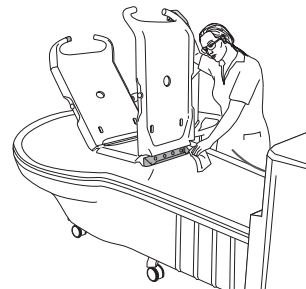

Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante. Durante este proceso, tendrá que aclarar el trapo con agua limpia cada cierto tiempo.

10

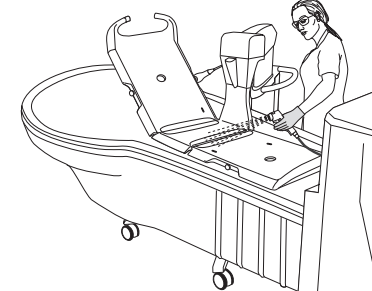


Si no se puede quitar todo el desinfectante, pulverice con agua la zona afectada y séquela con toallas desechables hasta eliminarlo.

*Continúe con los pasos que se indican en la página siguiente.*


## Desinfección

11

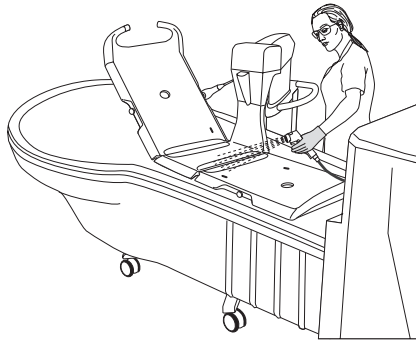


Rocíe desinfectante en la grúa de higiene y en todas las piezas retiradas.

12

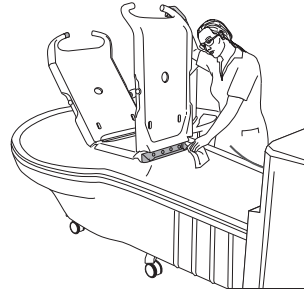


Empape un paño en desinfectante y limpie el resto de zonas.

13

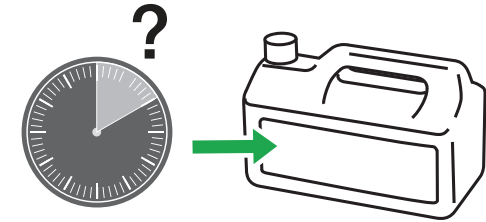


Deje que el desinfectante actúe durante el tiempo establecido en las instrucciones del desinfectante.

14

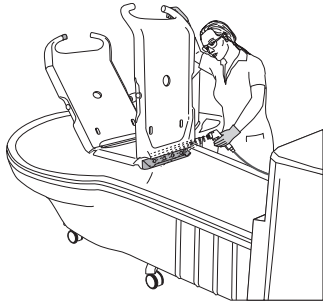


Pulverice o rocíe con agua y seque con un paño limpio para retirar los restos de desinfectante de la grúa de higiene, el chasis y todas las piezas retiradas. Durante este proceso, tendrá que aclarar el trapo con agua limpia cada cierto tiempo.

15

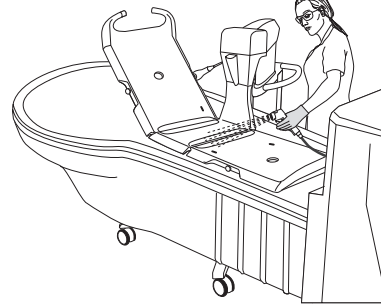

Si no se puede quitar todo el desinfectante, pulverice con agua las zonas afectadas y séquelas con toallas desechables hasta eliminarlo.

16

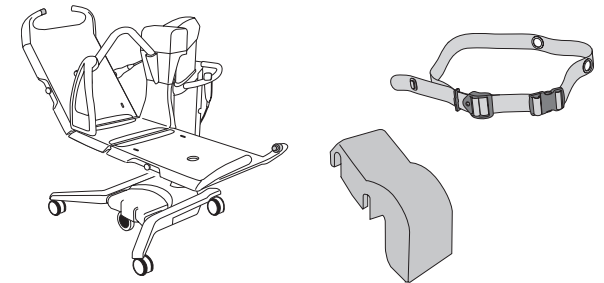

Deje que todas las piezas se sequen.

