

# Sara Combilizer

## De la cama



**1**

Coloque el Sara Combilizer en posición horizontal. Abata los apoyos del hombro (A). Coloque el reposabrazos en posición horizontal al mismo nivel que el colchón (B). Retire la almohada (C). Retire las correas de seguridad (D).

**2**

Active los frenos de la cama.

**3**

Debe situarse un cuidador a cada lado de la cama. Abata la barandilla de la cama del lado del traslado. Coloque el accesorio deslizante debajo del paciente. Coloque una almohada debajo de la cabeza del paciente.

**4**

Coloque el Sara Combilizer junto a la cama. Alinee la cadera del paciente con el hueco situado entre la placa del respaldo y la placa del asiento.

**5**

No levante ni baje otros equipos

Coloque el Sara Combilizer de 2 a 5 cm (1-2 in) (A) por debajo de la cama. Ajuste el reposapiés (B) para evitar que choquen los pies del paciente durante el traslado.

**6**

Active los frenos del Sara Combilizer.

Continúe con los pasos de la página siguiente

## De la cama (continuación)

7



Pueden ser necesarios dos o más cuidadores  
Vigile la cabeza y los pies del paciente




Traslade al paciente al Sara Combilizer.

8



Coloque al paciente en una posición correcta

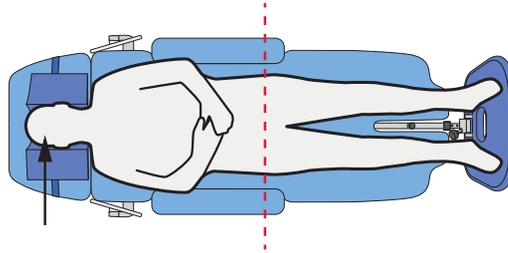


Coloque la cabeza del paciente. Alinee la cadera del paciente con el hueco situado entre la placa del respaldo y la placa del asiento.

9



Apriete las correas de seguridad  
Placa del reposapiés pesada

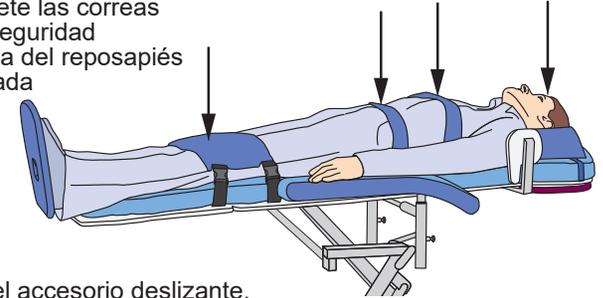


Retire el accesorio deslizante.  
Asegure al paciente con las correas de seguridad para el pecho, la cadera, las rodillas y la cabeza.  
Pliegue los apoyos del hombro y ajuste el ancho a la medida del paciente.  
Coloque el reposapiés.

## A la cama

1




Active los frenos  
Bloquee el soporte lateral

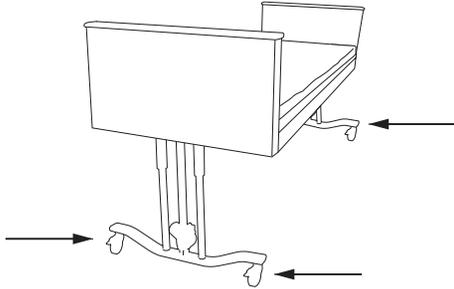

Active los frenos de la cama.  
Abata la barandilla de la cama del lado del traslado, si la hubiese.

2

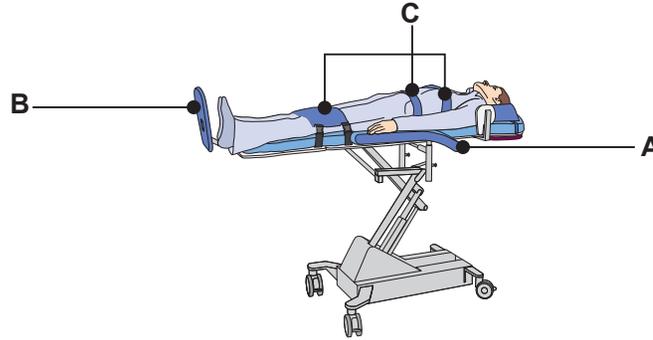


Coloque el reposabrazos en posición horizontal (A).  
Separe el reposapiés (B) de los pies del paciente.  
Desabroche todas las correas de seguridad (C) del lado de la cama y guárdelas.

3



Coloque el accesorio deslizante debajo del paciente.

4

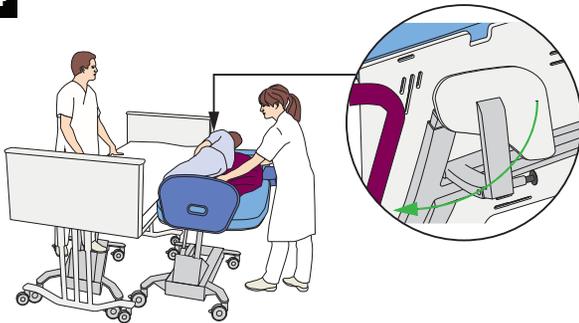

Abata el apoyo del hombro (B) del lado más próximo a la cama del Sara Combilizer.

5




No levante ni baje otros equipos



Coloque el Sara Combilizer cerca de la cama (A).  
Ajuste la altura del Sara Combilizer a 5 cm (2 in) sobre la cama (B).  
Baje el Sara Combilizer hasta colocarlo sobre la cama para realizar un traslado correcto (C).

6

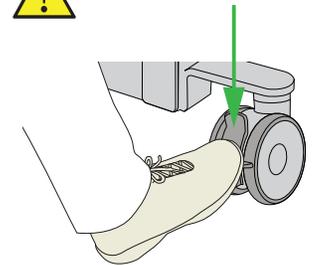

Active los frenos del Sara Combilizer.

Continúe con los pasos de la página siguiente

## A la cama (continuación)

7




Pueden ser necesarios dos o más cuidadores  
Vigile la cabeza y los pies del paciente



Debe haber un cuidador en un lado del equipo Sara Combilizer y otro cuidador en el lado opuesto de la cama a la que se va a trasladar al paciente.  
Traslade al paciente a la cama con el accesorio deslizable sin golpear la cabeza ni los pies del paciente.

8

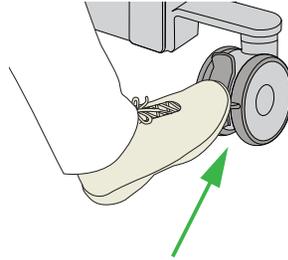

Libere los frenos y retire el equipo Sara Combilizer de la cama.

9




Retire el accesorio deslizable  
Bloquee el soporte lateral



Retire el accesorio deslizable de debajo del paciente.  
Estire las arrugas o las partes desiguales del colchón o la ropa del paciente para evitar que ejerzan presión o provoquen incomodidad.  
Pliegue las barandillas de la cama, si las hubiese.

## De la posición sentada a la posición de pie

1

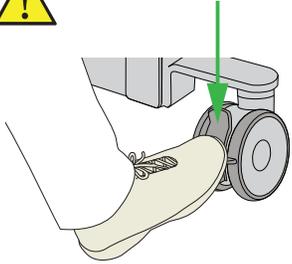

Prepare y coloque cerca el accesorio.  
Active los frenos del Sara Combilizer.

2



Coloque el Sara Combilizer en la posición de silla más baja y vertical.

3




Abata el apoyo del hombro y retire el reposabrazos del lado del traslado.  
Desabroche todas las correas de seguridad.  
Gire al paciente con cuidado hacia el lado del traslado.

4




Incline el Sara Combilizer con cuidado hacia el lado del traslado de modo que los pies del paciente toquen el suelo.

5

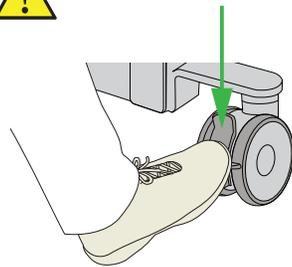

Coloque el accesorio delante del paciente.  
Active los frenos del accesorio.


6

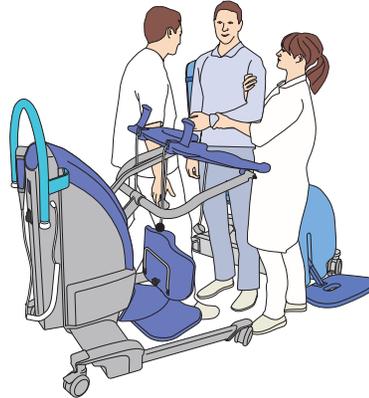

Ayude al paciente a ponerse de pie.  
Deje que el paciente se apoye en usted y guíelo hacia el accesorio.

## De la posición de pie a la posición sentada

1

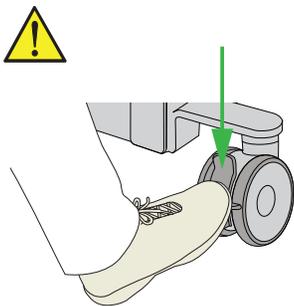


Prepare y coloque cerca el accesorio. Active los frenos del Sara Combilizer.

2




Coloque el Sara Combilizer en la posición de silla más baja y vertical.

3

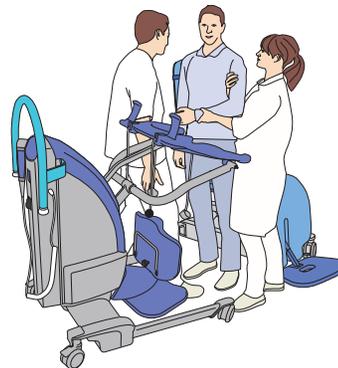

Abata el apoyo del hombro y retire el reposabrazos del lado del traslado. Mueva al paciente con la ayuda del accesorio cerca del Sara Combilizer.

4

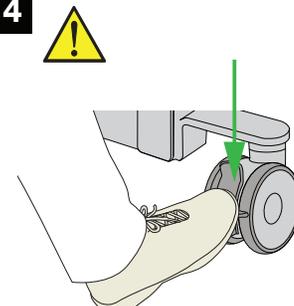

Active los frenos del accesorio.

5



Ajuste el Sara Combilizer a la altura de la posición sentada del paciente. Incline ligeramente el Sara Combilizer hacia el lado del traslado. Sostenga al paciente al cambiar a la posición sentada.

6



Incline Sara Combilizer hasta alcanzar la posición de silla horizontal. Sostenga al paciente.

7



Gire al paciente de modo que quede mirando hacia delante en la posición sentada. Levante los pies del paciente y colóquelos sobre el reposapiés.

8



Fije y ajuste las correas de seguridad necesarias. Coloque el reposabrazos y ajuste el ancho y la altura. Pliegue el apoyo del hombro y ajuste el ancho.