
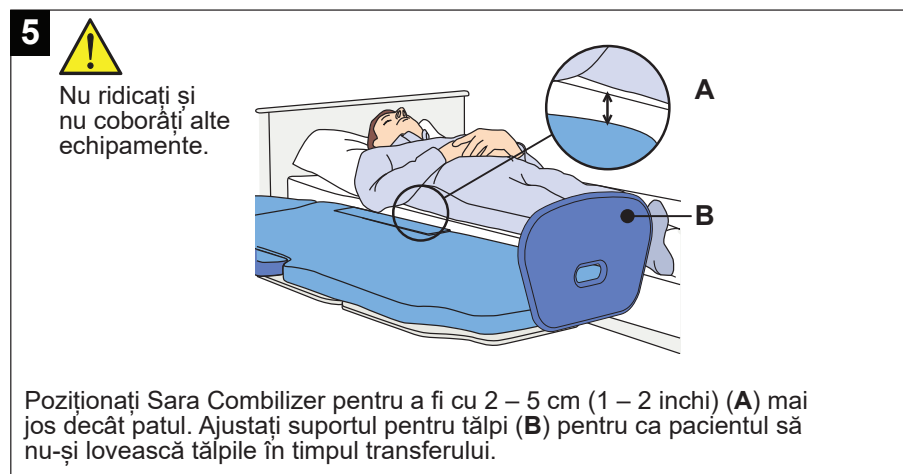
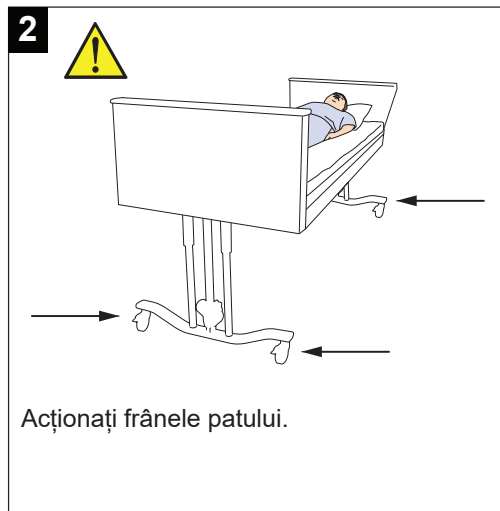


# Sara Combilizer

## Dinspre pat

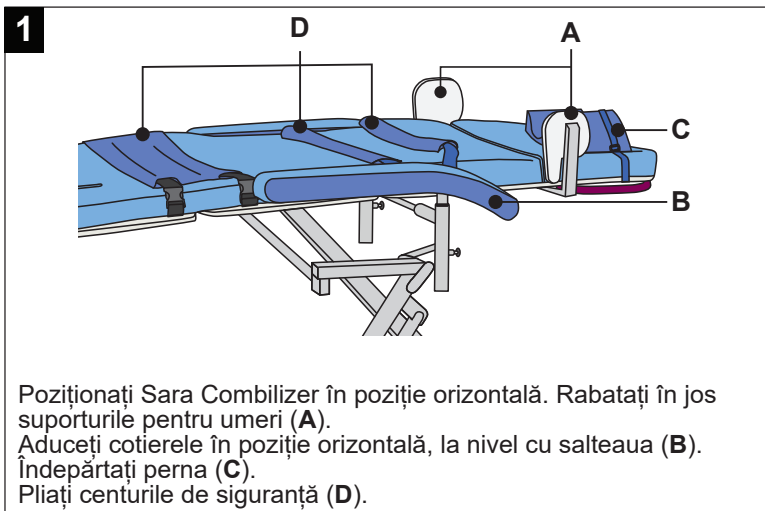


Continuați cu pașii prezentați pe pagina următoare.

## Dinspre pat – continuare

7



Este nevoie de doi sau mai mulți îngrijitori. Atenție la capul și tălpile pacientului.

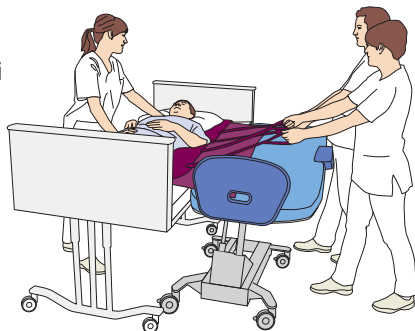


Transferați pacientul în Sara Combilizer.

8



Poziționați pacientul în mod corect.

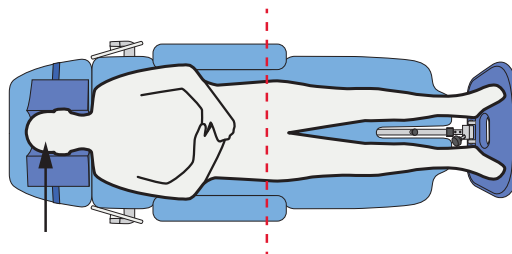


Poziționați capul pacientului. Aliniați șoldul pacientului la spațiul dintre placa de suport pentru spate și placa pentru șezut.

9



Cuplați centurile de siguranță. Placă pentru tălpi grea

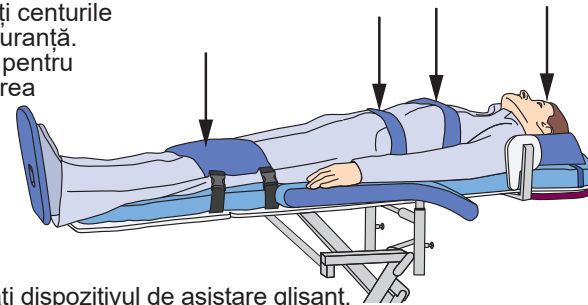


Îndepărtați dispozitivul de asistare glisant. Securizați pacientul cu ajutorul centurilor de siguranță pentru piept, șolduri, genunchi și cap. Rabatați în sus suporturile pentru umeri și ajustați lățimea pentru a se potrivi pacientului. Atașați suportul de tălpi.

## Spre pat

1




Acționați frânele.  
Blocați suportul lateral.

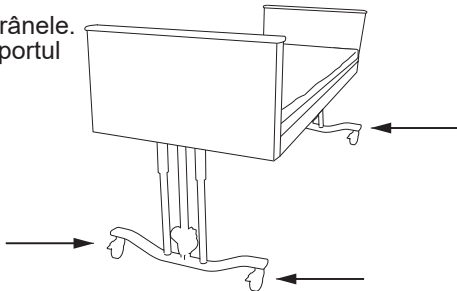


Acționați frânele patului.  
Dacă există, rabatați în jos balustrada patului pe partea pentru transfer.

2

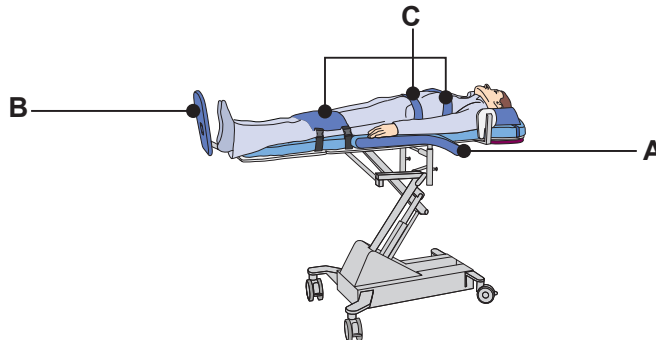


Aduceți cotierele în poziție orizontală (A).  
Ajustați suportul pentru tălpi (B) la distanță de tălpile pacientului.  
Decupați și pliați toate centurile de siguranță (C) pe partea dinspre pat.

3

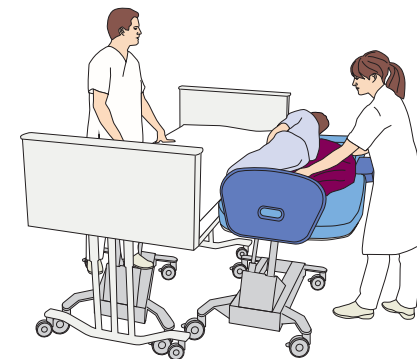

Asezați un dispozitiv de asistare glisant sub pacient.

4

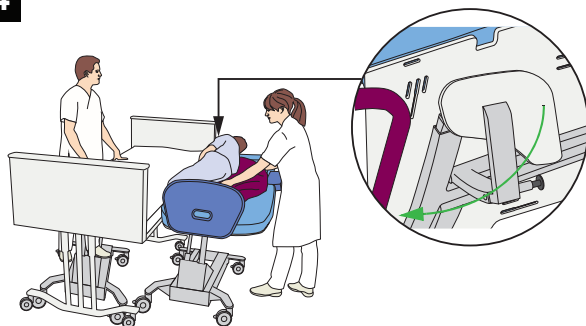


Rabatați în jos suportul pentru umeri (B) de pe partea de pat dinspre Sara Combilizer.

5




Nu ridicați și nu coborâți  
alte echipamente.

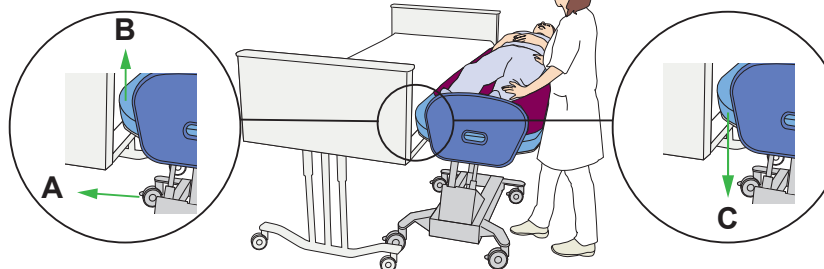

Poziționați Sara Combilizer aproape de pat (A).  
Ajustați înălțimea echipamentului Sara Combilizer pentru a fi cu 5 cm (2 inch) mai sus decât patul (B).  
Coborâți Sara Combilizer deasupra patului pentru a efectua transferul la nivel (C).

6

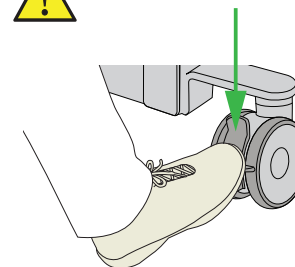

Acționați frânele pentru  
Sara Combilizer.


Continuați cu pașii prezentați pe pagina următoare.

## Spre pat – continuare

7




Este nevoie de doi sau mai mulți îngrijitori. Atenție la capul și tălpile pacientului.

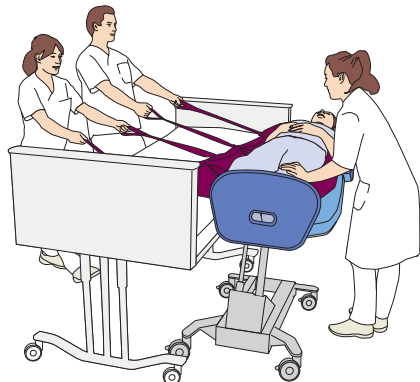

Poziționați un îngrijitor de o parte a echipamentului Sara Combilizer și un îngrijitor de partea opusă a patului pe care este transferat pacientul.  
Transferați pacientul în pat cu ajutorul dispozitivului de asistare glisant, fără a-i lovi capul sau tălpile.

8

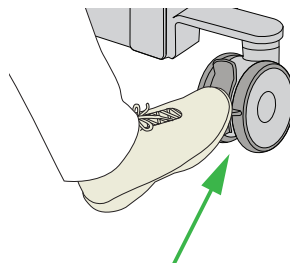


Eliberați frânele și mutați Sara Combilizer departe de pat.

9




Îndepărtați dispozitivul de asistare glisant. Blocați suportul lateral.

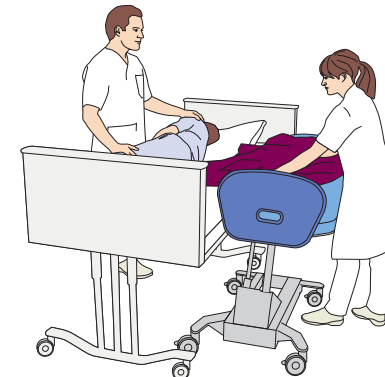

Îndepărtați dispozitivul de asistare glisant de sub pacient. Neteziți cutele sau denivelările la nivelul saltei sau al hainelor pacientului pentru a preveni acumularea de presiune sau disconfortul.  
Rabatați în sus balustradele patului, dacă există.

## Din poziția așezat în poziția în picioare

1

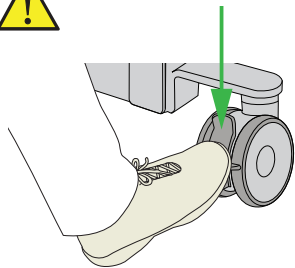

Pregătiți și așezați dispozitivul de asistare în apropiere. Acționați frânele pentru Sara Combilizer.

2



Poziționați Sara Combilizer în poziție verticală și în cea mai joasă poziție de scaun.

3




Rabatați în jos suportul pentru umeri și scoateți cotierele de pe partea pentru transfer. Decuplați toate centurile de siguranță. Rotiți cu grijă pacientul către partea pentru transfer.

4




Înclinați cu grijă Sara Combilizer către partea pentru transfer, astfel încât tălpile pacientului să atingă podeaua.

5

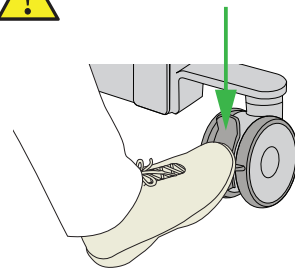

Așezați dispozitivul de asistare în fața pacientului. Acționați frânele dispozitivului de asistare.


6

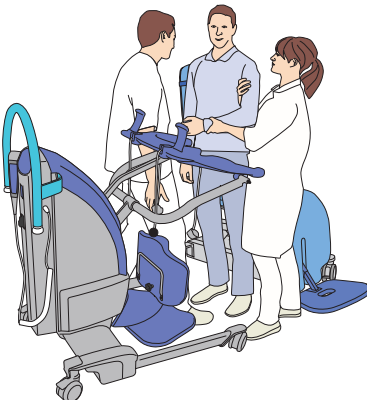

Ajutați pacientul să se ridice în picioare. Susțineți pacientul și ajutați-l să ajungă la dispozitivul de asistare.

## Din poziția în picioare în poziția așezat

1

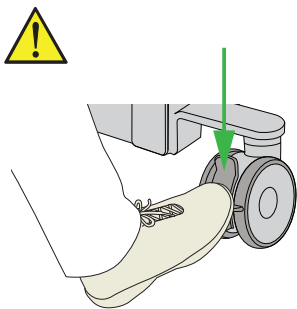


Pregătiți și așezați dispozitivul de asistare în apropiere. Acționați frânele pentru Sara Combilizer.

2




Poziționați Sara Combilizer în poziție verticală și în cea mai joasă poziție de scaun.

3

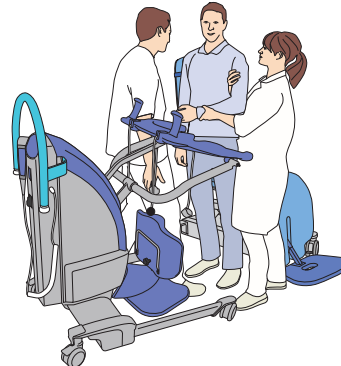

Rabatați în jos suportul pentru umeri și scoateți cotierele de pe partea pentru transfer. Mutați pacientul aproape de Sara Combilizer cu dispozitivul de asistare.

4

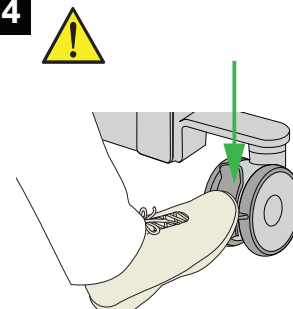

Acționați frânele dispozitivului de asistare.

5




Ajustați înălțimea echipamentului Sara Combilizer în funcție de înălțimea pacientului când stă în șezut. Înclinați ușor Sara Combilizer către partea pentru transfer. Susțineți pacientul în cursul mutării în poziția așezat.

6



Înclinați Sara Combilizer pentru a-l aduce în poziție orizontală de scaun. Susțineți pacientul.

7

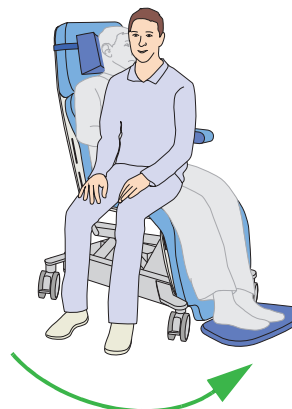

Întoarceți pacientul pentru a-l aduce în poziția așezat cu fața înainte. Ridicați tălpile pacientului și așezați-le pe suportul pentru tălpi.

8



Prindeți și ajustați centurile de siguranță necesare. Atașați cotiera și ajustați-i lățimea și înălțimea. Rabatați în sus suportul pentru umeri și ajustați lățimea.

