



Sara Combilizer


Da cama

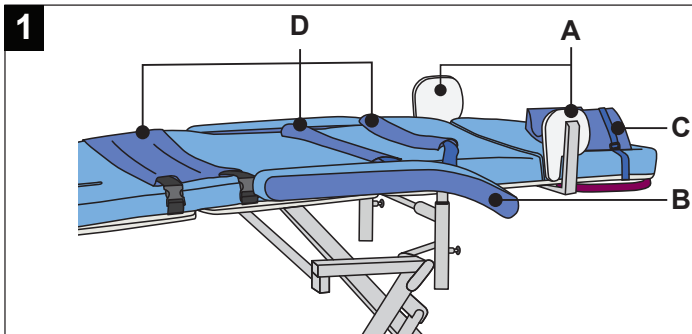


Coloque o Sara Combilizer na posição horizontal.
Dobre os apoios para os ombros (A).
Coloque os apoios para os braços na posição horizontal, nivelados com o colchão (B).
Retire a almofada (C).
Dobre os cintos de segurança (D).

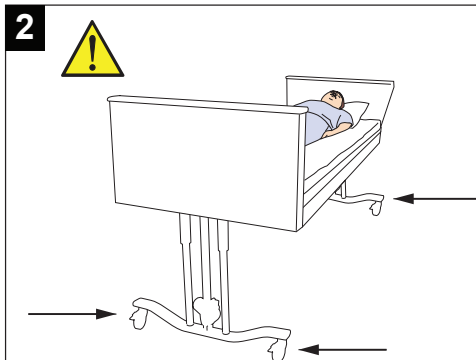


Acione os travões da cama.

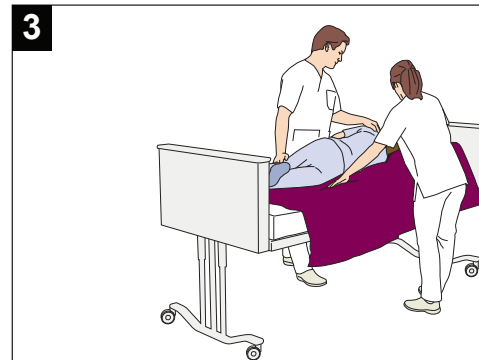

Coloque um prestador de cuidados em cada lado da cama.
Dobre a guarda da cama no lado da transferência.
Coloque o auxiliar de deslizamento por baixo do paciente.
Coloque uma almofada por baixo da cabeça do paciente.

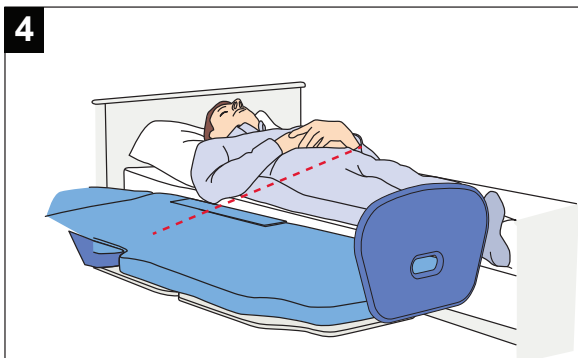


Posicione o Sara Combilizer junto à cama.
Alinhe a anca do paciente com o intervalo entre a placa de apoio para as costas e a placa do assento.

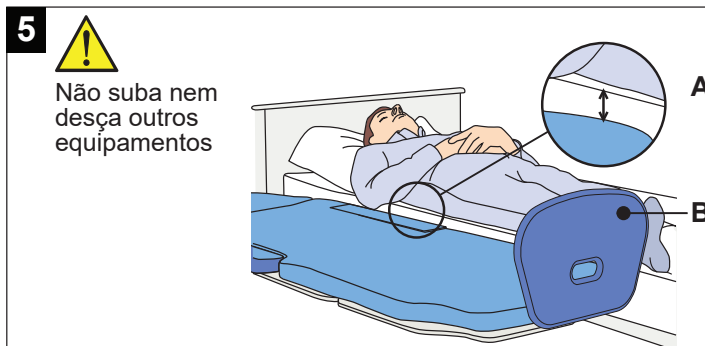

Não suba nem desça outros equipamentos

Posicione o Sara Combilizer 2 a 5 cm (1 a 2 polegadas) (A) abaixo da cama.
Regule o apoio para os pés (B) para evitar bater nos pés do paciente durante a transferência.

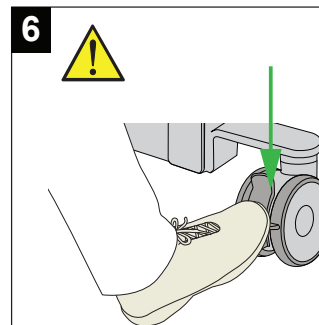

Acione os travões no Sara Combilizer.


Continue com os passos na página seguinte

Da cama (continuação)

7



São necessários dois ou mais prestadores de cuidados. Preste atenção à cabeça e aos pés do paciente.

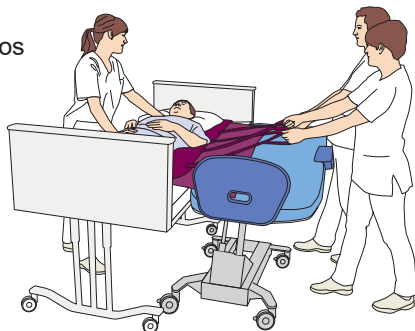


Transfira o paciente para o Sara Combilizer.

8



Posicione o paciente corretamente

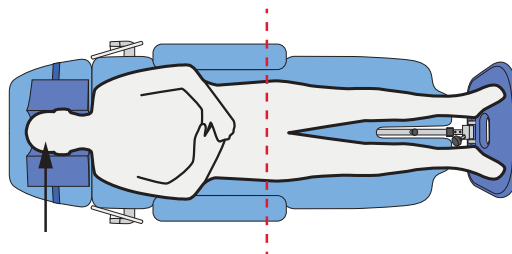


Posicione a cabeça do paciente. Alinhe a anca do paciente com o intervalo entre a placa de apoio para as costas e a placa do assento.

9



Aperte os cintos de segurança
Placa para os pés pesada

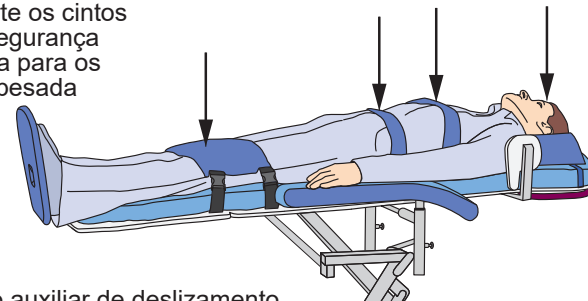


Retire o auxiliar de deslizamento. Fixe o paciente com os cintos de segurança para o peito, ancas, joelhos e cabeça. Levante os suportes para os ombros e ajuste a largura em função do paciente. Coloque o apoio para os pés.

Para a cama

1




Acione os travões
Bloqueie a
barra lateral

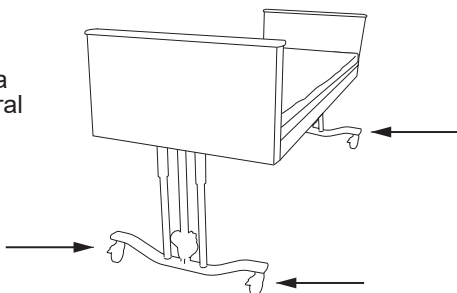


Acione os travões da cama.
Se existir, dobre a guarda da cama para baixo
no lado da transferência.

2

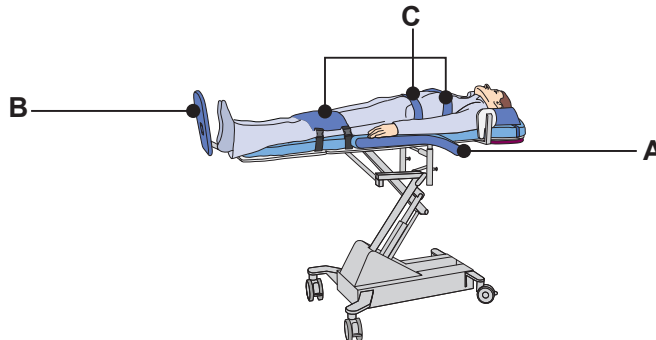


Coloque os apoios para os braços na posição horizontal (A).
Regule o apoio para os pés (B) afastado dos pés do paciente.
Retire e guarde todos os cintos de segurança (C) ao lado da cama.

3

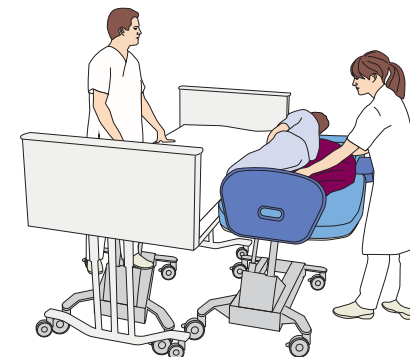

Coloque um auxiliar de deslizamento
por baixo do paciente.

4

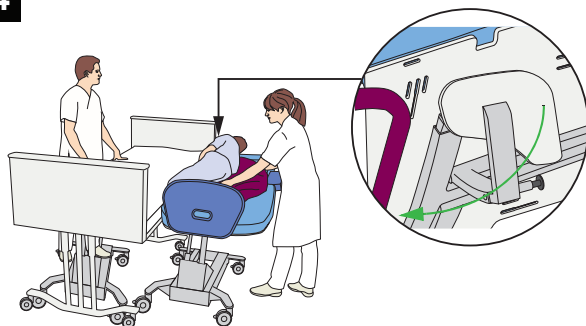


Dobre o apoio para os ombros (B) no
lado da cama no Sara Combilizer.

5




Não suba nem desça
outros equipamentos

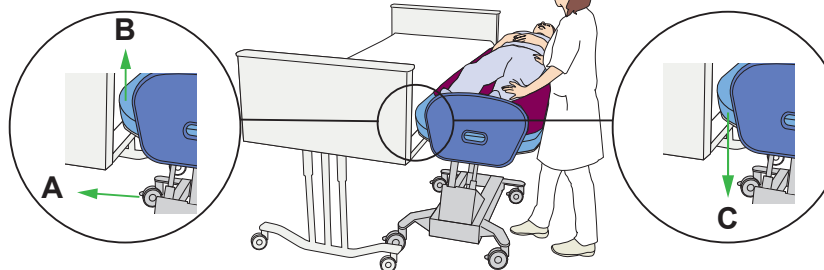

Posicione o Sara Combilizer perto da cama (A).
Regule a altura do Sara Combilizer para 5 cm (2 polegadas) acima da cama (B).
Baixe o Sara Combilizer sobre a cama para uma transferência uniforme (C).

6

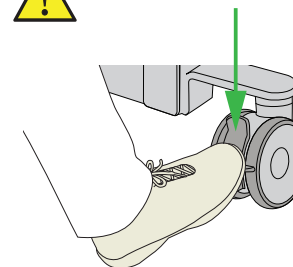

Acione os travões no
Sara Combilizer.


Continue com os passos na página seguinte

(continua)

7




São necessários dois ou mais prestadores de cuidados. Preste atenção à cabeça e aos pés do paciente.

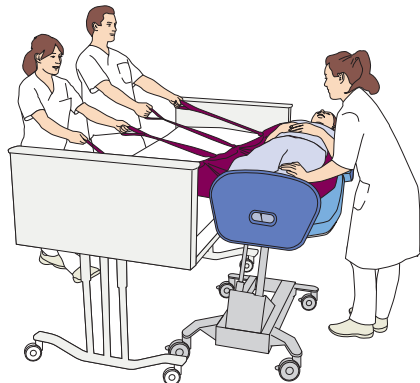

Um prestador de cuidados deve estar no lado do Sara Combilizer e o outro no lado oposto da cama recetora. Transfira o paciente para a cama com o auxiliar de deslizamento, sem bater com a cabeça ou os pés do paciente.

8

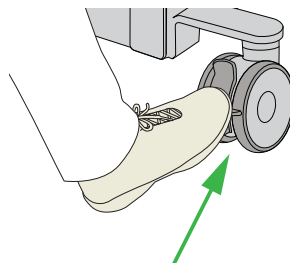


Liberte os travões e afaste o Sara Combilizer da cama.

9




Retire o auxiliar de deslizamento. Bloqueie a barra lateral.

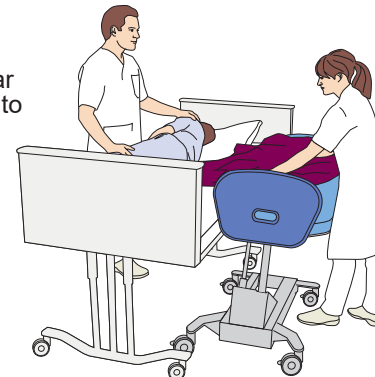

Retire o auxiliar de deslizamento de debaixo do paciente. Elimine vincos ou irregularidades no colchão ou no vestuário do paciente para evitar pressão ou desconforto. Levante as guardas da cama, se existirem.

A partir da posição sentada para a posição de pé

1

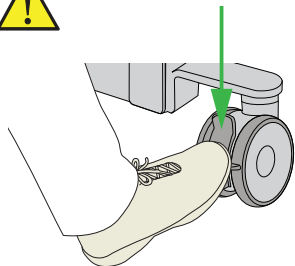

Prepare e tenha o auxiliar por perto. Acione os travões no Sara Combilizer.

2



Posicione o Sara Combilizer na posição de cadeira vertical e mais baixa.

3




Dobre o apoio para os ombros e retire os apoios para os braços no lado de transferência. Retire todos os cintos de segurança. Rode cuidadosamente o paciente para o lado da transferência.

4




Incline cuidadosamente o Sara Combilizer na direção do lado da transferência de modo a os pés do paciente poderem chegar ao chão.

5

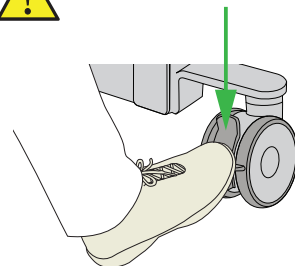

Coloque o auxiliar em frente do paciente. Acione os travões no auxiliar.


6

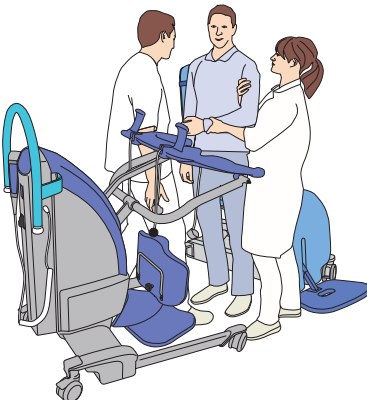

Ajude o paciente a levantar-se. Apoie e guie o paciente em direção ao auxiliar.

Da posição de pé para a posição sentada

1

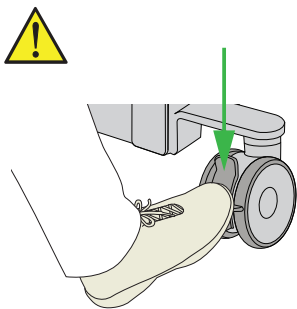


Prepare e tenha o auxiliar por perto.
Acione os travões no Sara Combilizer.

2




Posicione o Sara Combilizer
na posição de cadeira vertical
e mais baixa.

3

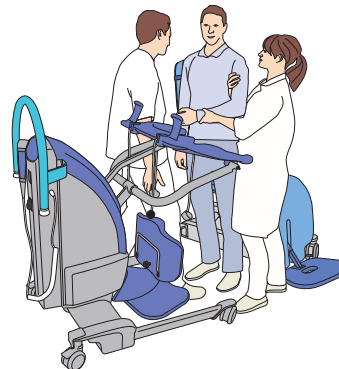

Dobre o apoio para os ombros e retire os apoios
para os braços no lado de transferência.
Mova o paciente com o auxiliar para junto do
Sara Combilizer.

4

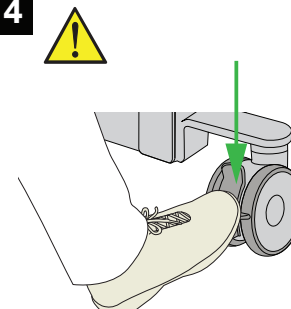

Acione os travões no auxiliar.

5




Ajuste a altura do Sara Combilizer à altura sentada
do paciente. Incline ligeiramente o Sara Combilizer
para o lado da transferência. Apoie o paciente
durante o movimento para uma posição sentada.

6



Incline o Sara Combilizer
para uma posição
de cadeira horizontal.
Apoie o paciente.

7

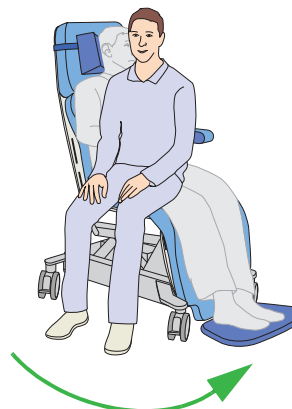

Rode o paciente para uma posição
sentada voltada para a frente.
Levante os pés do paciente e
coloque-os no apoio para os pés.

8



Afixe e ajuste os cintos de segurança
necessários. Coloque o apoio para o
braço e ajuste a largura e a altura. Levante
o apoio para os ombros e regule a largura.

