
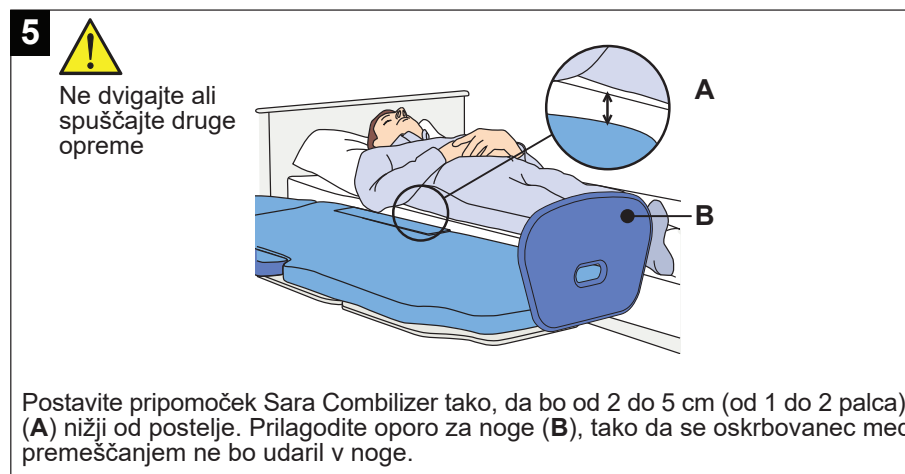
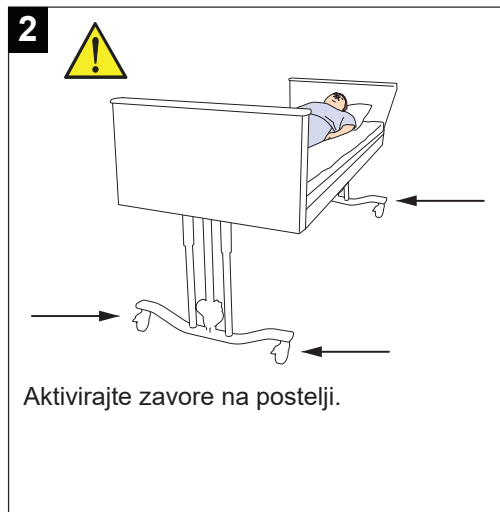


Sara Combilizer

Iz postelje

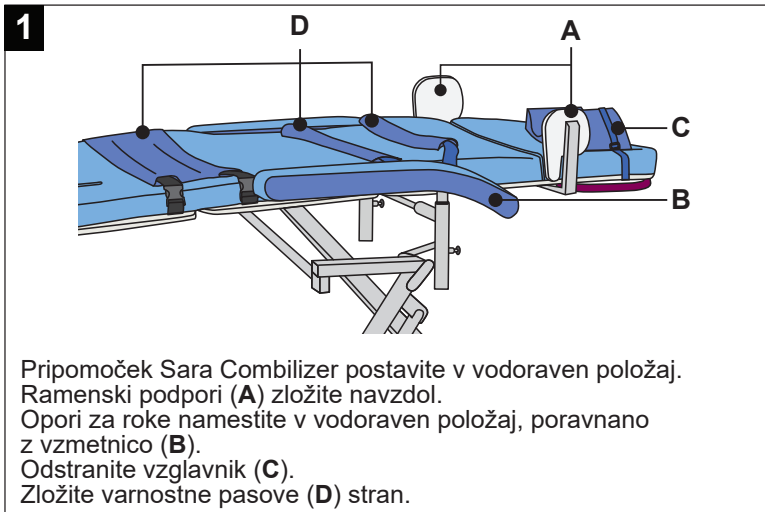


Nadaljujte s koraki na naslednji strani

Iz postelje, nadaljevanje

7



Potrebna sta vsaj dva negovalca
Bodite pozorni na oskrbovančevo glavo in noge

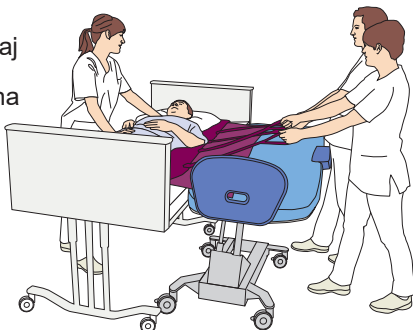


Premestite oskrbovanca na pripomoček Sara Combilizer.

8



Pravilno namestite oskrbovanca

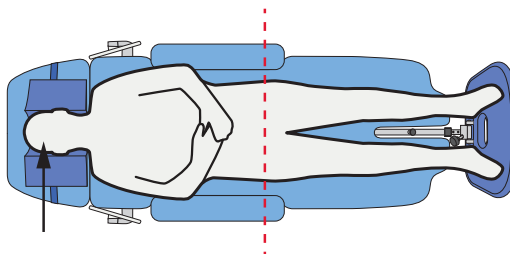


Namestite oskrbovančevo glavo.
Oskrbovančev kolk poravnajte z vrzeljo med hrbtno oporno ploščo in sedežno ploščo.

9



Pripenite varnostne pasove
Obtežite ploščo za noge.

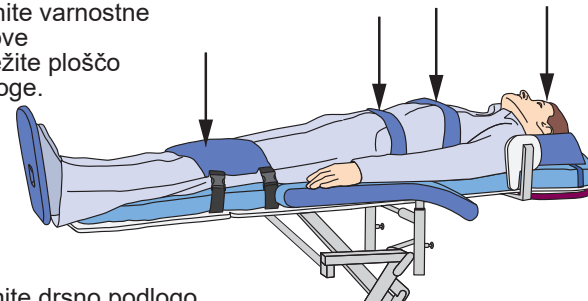


Odstranite drsno podlogo.
Oskrbovanca pripenite s prsnim, bočnim, kolenskim in naglavnim varnostnim pasom.
Dvignite ramenski opori in prilagodite njuno širino, da se bosta prilegali oskrbovancu.
Pritrdite oporo za noge.

Na posteljo

1




Aktivirajte
zavore
Zaklenite
stransko
oporo

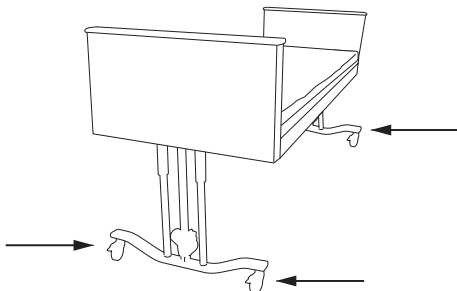

Aktivirajte zavore na postelji.
Na strani za premestitev spustite zaščitno ograjo
za posteljo, če je nameščena.

2

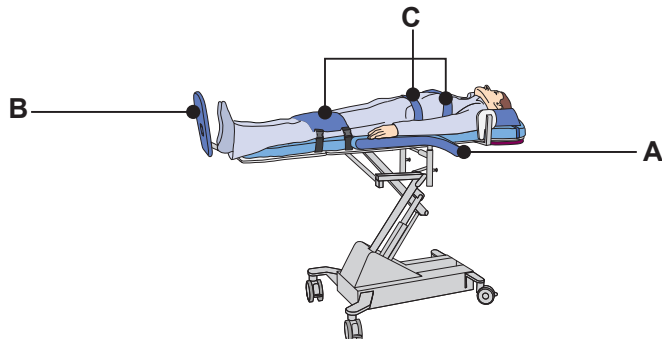


Opori za roke namestite v vodoraven položaj (A).
Oporo za noge (B) nastavite stran od oskrbovančevih nog.
Odstranite in zložite stran vse varnostne pasove na strani ob postelji.

3



Pod oskrbovanca namestite drsno podlogo.

4

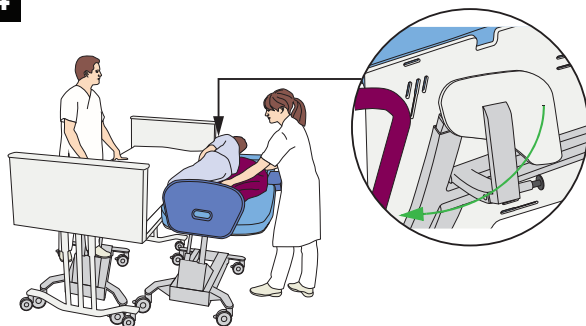


Ramensko oporo (B) na strani postelje zložite
navzdol na pripomoček Sara Combilizer.

5




Ne dvigajte ali spuščajte
druge opreme

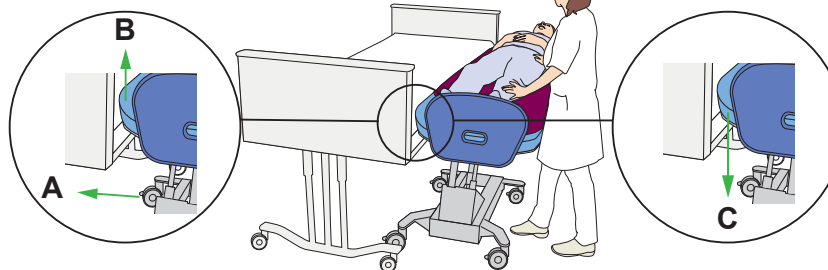

Pripomoček Sara Combilizer namestite v bližino postelje (A).
Prilagodite višino pripomočka Sara Combilizer, tako da bo 5 cm (2 palca)
nad posteljo (B).
Spustite pripomoček Sara Combilizer na zgornji del postelje, da zagotovite
enakomerno premestitev (C).

6

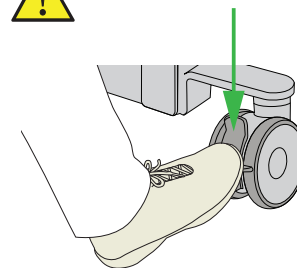

Aktivirajte zavore na pripomočku
Sara Combilizer.


Nadaljujte s koraki na naslednji strani

Na posteljo, nadaljevanje

7




Potrebna sta vsaj dva negovalca
Bodite pozorni na oskrbovančevo glavo in noge

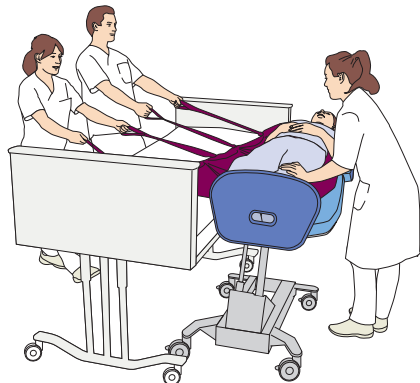

En negovalec mora biti na strani pripomočka Sara Combilizer, en pa na nasprotni strani postelje, na katero premeščate oskrbovanca. Oskrbovanca premestite z drsno podlogo na posteljo, ne da bi se udaril v glavo ali stopala.

8

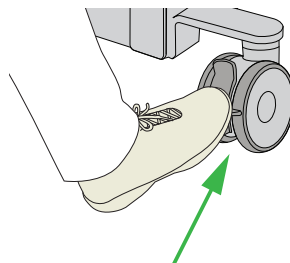


Sprostite zavore in pripomoček Sara Combilizer odmaknite od postelje.

9




Odstranite drsno podlogo
Zaklenite stransko oporo

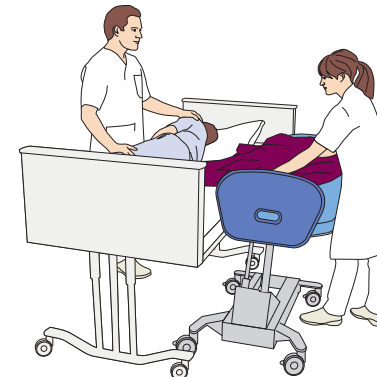

Odstranite drsno podlogo izpod bolnika. Zravnajte gube ali neravnine na vzmetnici ali oskrbovančevih oblačilih, da preprečite pritisk ali neudobje. Če je zaščitna ograja za posteljo nameščena, jo dvignite.

Iz sedečega v stoječi položaj

1

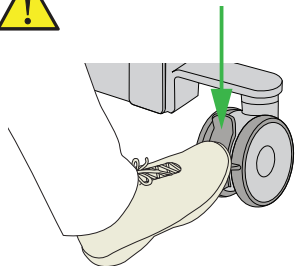

Oporo pripravite in jo postavite v bližino. Aktivirajte zavore na pripomočku Sara Combilizer.

2



Pripomoček Sara Combilizer postavite v pokončni in najnižji možni položaj stola.

3




Na strani za premestitev spustite ramensko oporo in odstranite opori za roke. Odprite vse varnostne pasove. Previdno obrnite oskrbovanca na stran za premestitev.

4




Previdno nagnite pripomoček Sara Combilizer proti strani za premestitev, tako da lahko oskrbovanec z nogami doseže tla.

5

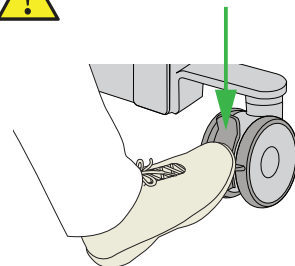

Pripomoček postavite pred oskrbovanca. Aktivirajte zavore na pripomočku.


6

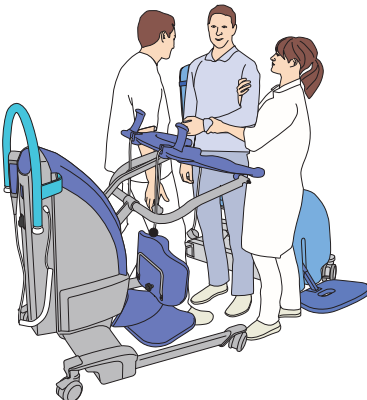

Oskrbovancu pomagajte, da se dvigne v stoječi položaj. Podprite oskrbovanca in ga vodite proti opori.

Iz stoječega v sedeči položaj

1

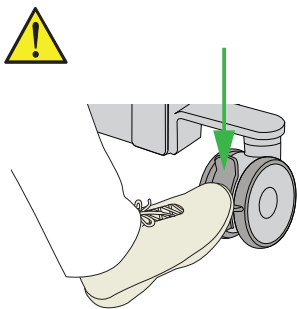


Oporo pripravite in jo postavite v bližino. Aktivirajte zavore na pripomočku Sara Combilizer.

2




Pripomoček Sara Combilizer postavite v pokončni in najnižji možni položaj stola.

3

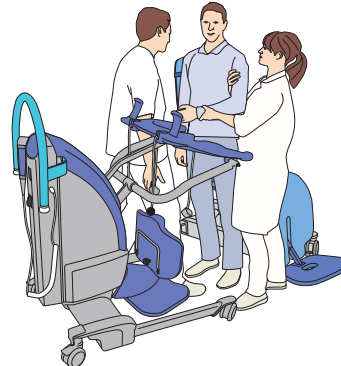

Na strani za premestitev spustite ramensko oporo in odstranite opori za roke. Premaknite oskrbovanca z oporo bližje pripomočku Sara Combilizer.

4

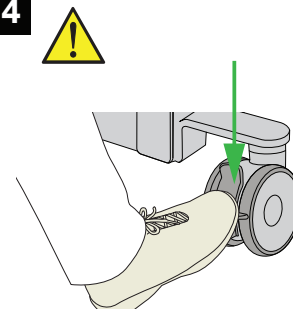

Aktivirajte zavore na pripomočku.

5



Prilagodite pripomoček Sara Combilizer na višino oskrbovanca med sedenjem. Rahlo nagnite pripomoček Sara Combilizer proti strani za premestitev. Oskrbovanca podprite med premikanjem v sedeči položaj.

6



Pripomoček Sara Combilizer nagnite v vodoraven položaj stola. Podprite oskrbovanca.

7



Obrnite oskrbovanca v naprej obrnjen sedeč položaj. Dvignite oskrbovančeve noge in jih položite na oporo za noge.

8



Pritrdite in prilagodite potrebne varnostne pasove. Pritrdite oporo za roke ter prilagodite širino in višino. Dvignite ramensko oporo in prilagodite širino.

