
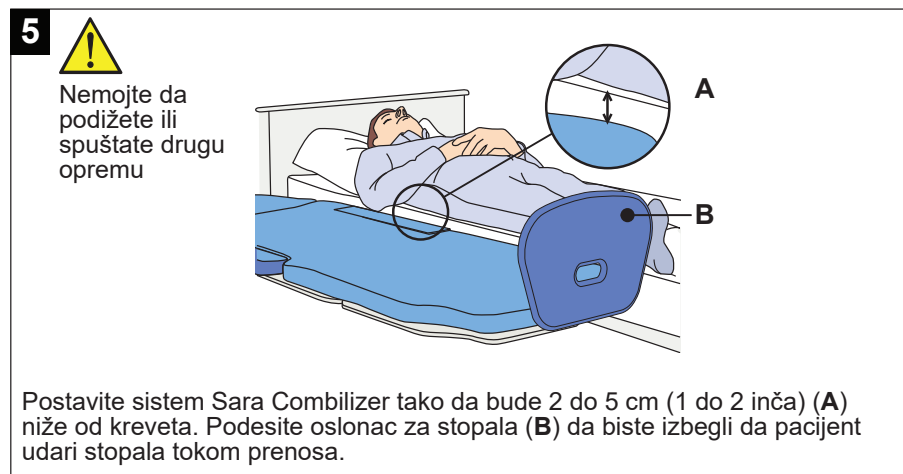


Sara Combilizer

Sa kreveta

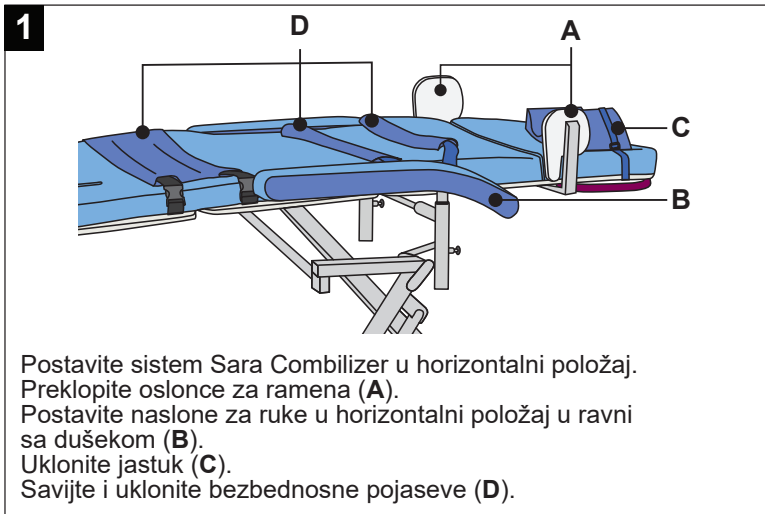


Pređite na korake na sledećoj stranici

Sa kreveta, nastavak

7



Potrebno je da budu prisutna dva ili više negovatelja. Vodite računa o glavi i stopalima pacijenta.

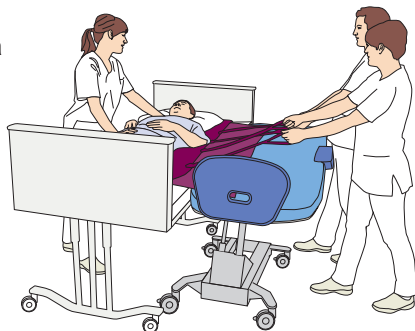


Prenesite pacijenta sa kreveta na sistem Sara Combilizer.

8



Pravilno pozicionirajte pacijenta

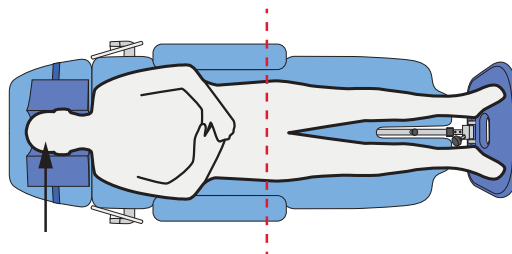


Pozicionirajte glavu pacijenta. Poravnajte kukove pacijenta sa razmakom između ploče oslonca za leđa i sedalne ploče.

9



Vežite bezbednosne pojaseve. Teška ploča za stopala.

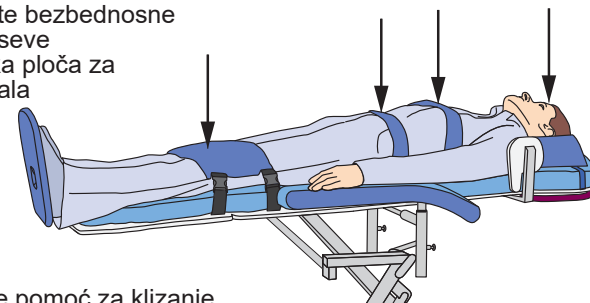


Uklonite pomoć za klizanje. Obezbedite pacijenta pomoću bezbednosnih pojaseva za grudni koš, kukove, kolena i glavu. Podignite oslonce za ramena i podesite im širinu tako da odgovara pacijentu. Postavite oslonac za stopala.

Do kreveta

1




Pritisnite
kočnice
Zaključajte
bočnu potporu

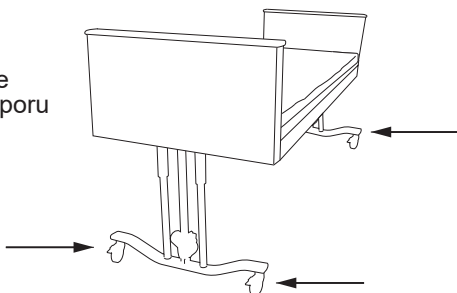


Aktivirajte kočnice na krevetu.
Preklopite šinu kreveta na strani prenosa,
ako je deo opreme.

2

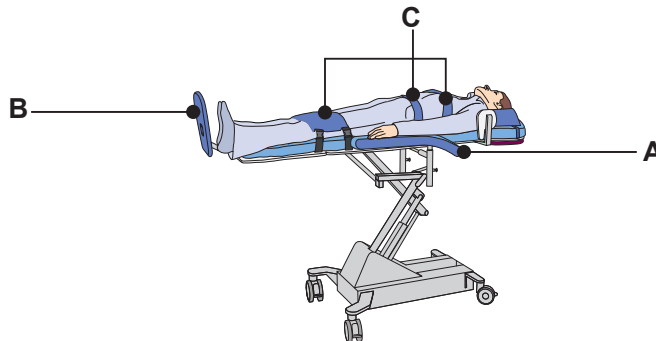


Postavite naslone za ruke u horizontalni položaj (A).
Udaljite oslonac za stopala (B) od stopala pacijenta.
Odvojite, savijte i uklonite sve bezbednosne pojaseve (C)
na strani koja je okrenuta ka krevetu.

3

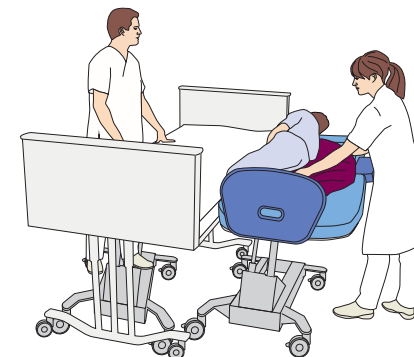

Postavite pomoć za klizanje ispod pacijenta.

4

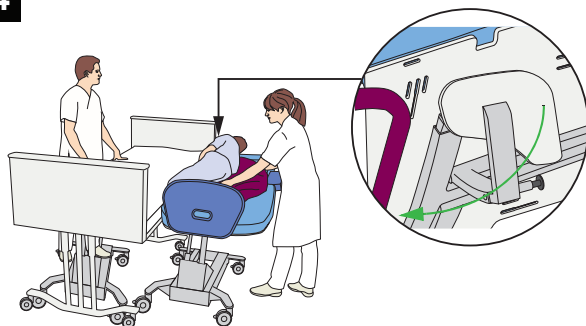


Preklopite oslonac za ramena (B) na strani sistema
Sara Combilizer koja je okrenuta ka krevetu.

5




Nemojte da podižete ili
spuštate drugu opremu

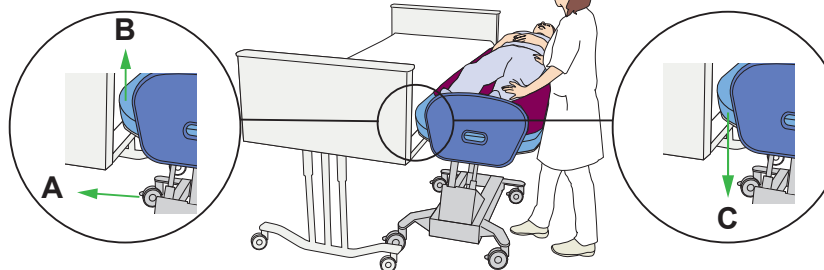

Približite sistem Sara Combilizer krevetu (A).
Podesite visinu sistema Sara Combilizer na 5 cm (2 inča) iznad kreveta (B).
Spustite sistem Sara Combilizer na krevet radi postizanja ujednačenog
prenosa (C).

6

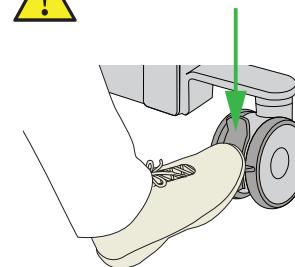

Aktivirajte kočnice na sistemu
Sara Combilizer.


Pređite na korake na sledećoj stranici

Do kreveta, nastavak

7




Potrebno je da budu prisutna dva ili više negovatelja. Vodite računa o glavi i stopalima pacijenta.

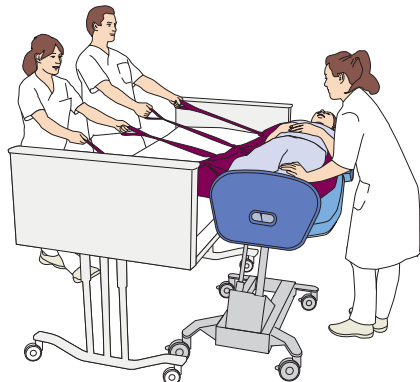

Postavite jednog negovatelja sa jedne strane sistema Sara Combilizer a drugog na suprotnu stranu kreveta na kojeg prenosite pacijenta. Prenesite pacijenta na krevet koristeći pomoć za klizanje vodeći računa da ne udarite glavu ili stopala pacijenta.

8

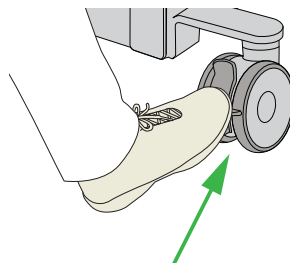


Otpustite kočnice i udaljite sistem Sara Combilizer od kreveta.

9




Uklonite pomoć za klizanje. Zaključajte bočnu potporu.

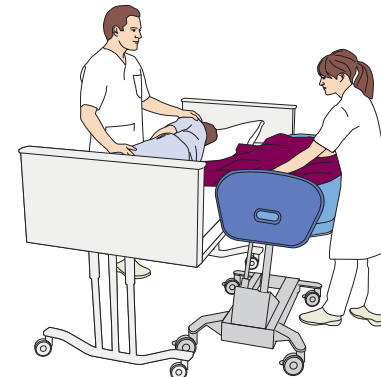

Uklonite pomoć za klizanje koja se nalazi ispod pacijenta. Izravnajte nabore ili neravnine na dušek u ili odeći pacijenta da biste sprečili pritisak ili neudobnost. Podignite šine kreveta, ako su deo opreme.

Iz sedećeg u stojeći položaj

1

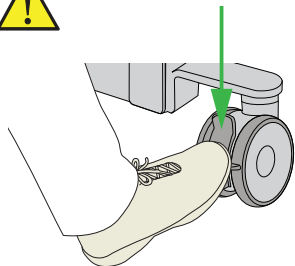

Pripremite pomagalo i postavite ga u blizini. Aktivirajte kočnice na sistemu Sara Combilizer.

2



Postavite sistem Sara Combilizer u uspravan i najniži položaj stolice.

3




Preklopite oslonac za ramena i uklonite naslone za ruke na strani prenosa. Uklonite sve bezbednosne pojaseve. Pažljivo okrenite pacijenta do strane prenosa.

4




Pažljivo nagnite sistem Sara Combilizer ka strani prenosa kako bi pacijent stopalima mogao da dotakne pod.

5

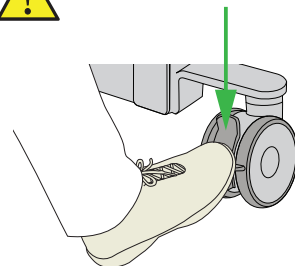

Postavite pomagalo ispred pacijenta. Aktivirajte kočnice na pomagalu.


6

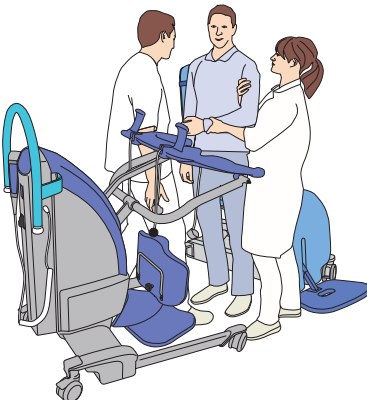

Pomozite pacijentu da se uspravi u stojeći položaj. Pružite pacijentu oslonac i usmerite ga prema pomagalu.

Iz stojećeg u sedeći položaj

1

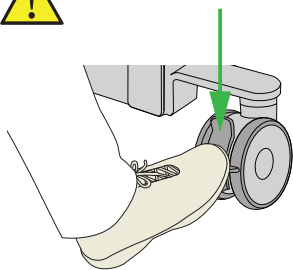


Pripremite pomagalo i postavite ga u blizini. Aktivirajte kočnice na sistemu Sara Combilizer.

2




Postavite sistem Sara Combilizer u uspravan i najniži položaj stolice.

3

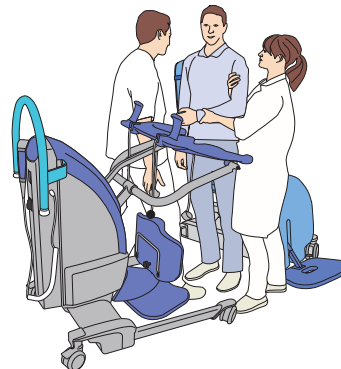

Preklopite oslonac za ramena i uklonite naslone za ruke na strani prenosa. Premestite pacijenta koristeći pomagalo nadomak sistema Sara Combilizer.

4

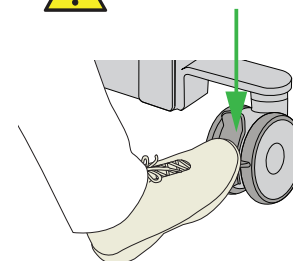

Aktivirajte kočnice na pomagalu.

5



Podesite visinu sistema Sara Combilizer na visinu sedenja pacijenta. Blago nagnite sistem Sara Combilizer ka strani prenosa. Pružite pacijentu oslonac tokom prelaska u sedeći položaj.

6



Nagnite sistem Sara Combilizer u horizontalni položaj stolice. Pružite pacijentu oslonac.

7



Okrenite pacijenta u položaj sedenja licem ka napred. Podignite pacijentova stopala i postavite ih na oslonac za stopala.

8



Pričvrstite i podesite potrebne bezbednosne pojaseve. Postavite naslon za ruke i podesite širinu i visinu. Podignite oslonac za ramena i prilagodite širinu.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com