






Sara Combilizer

النقل من السرير




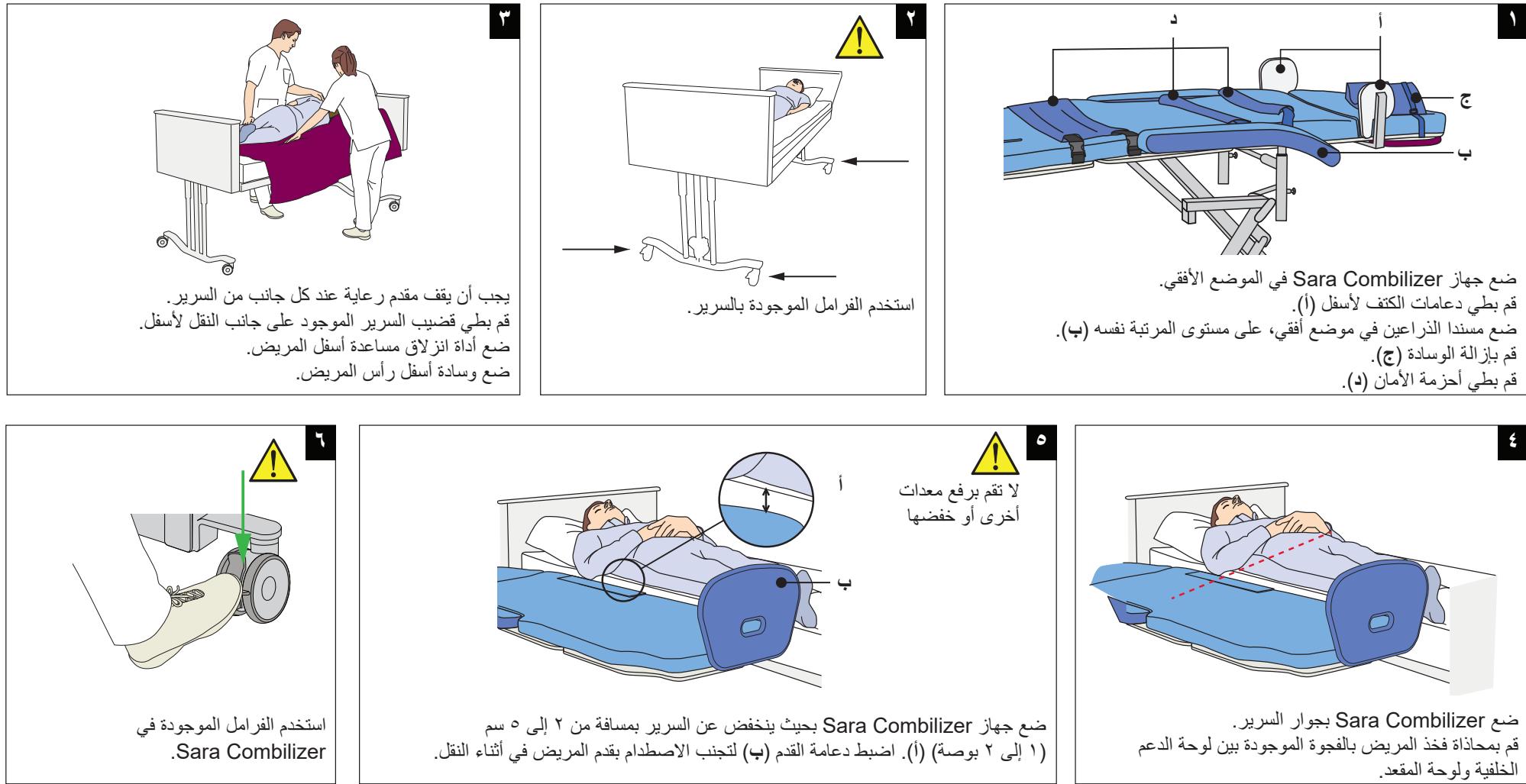


تابع الخطوات في الصفحة التالية

النقل من السرير (تابع)

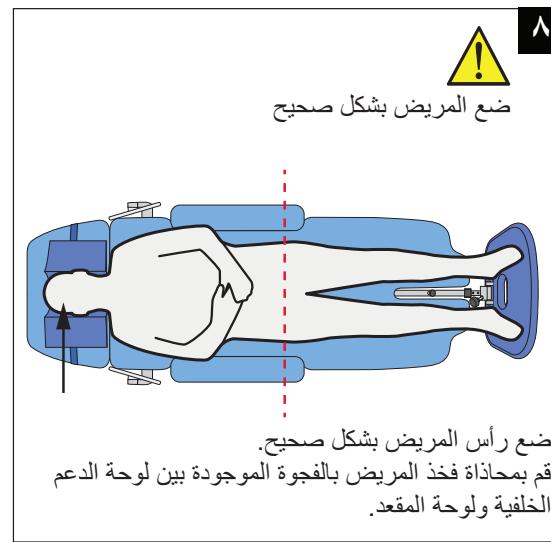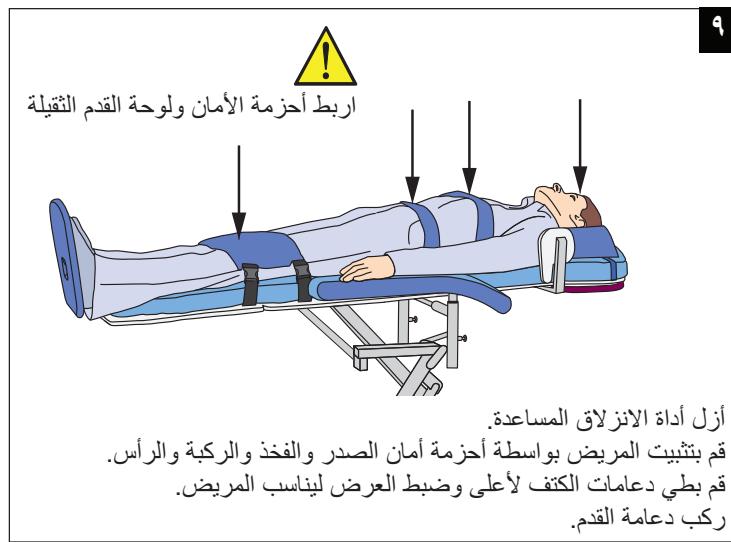

النقل إلى السرير

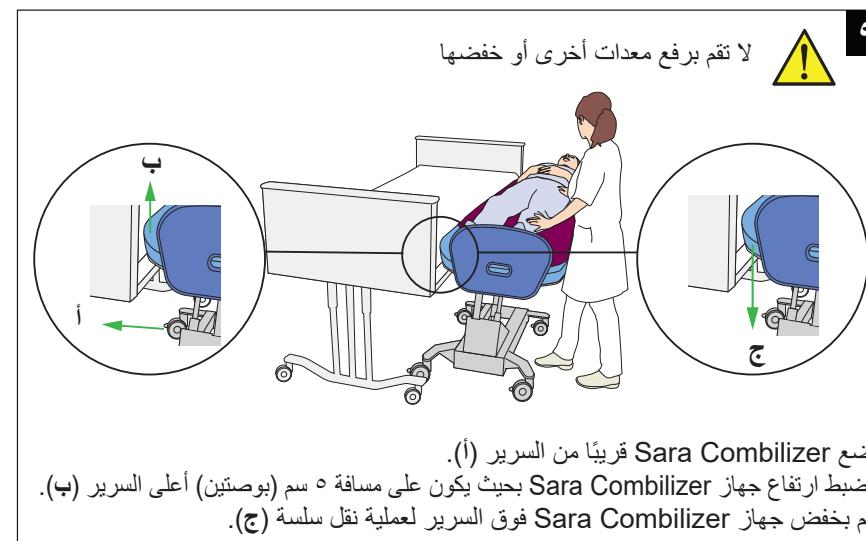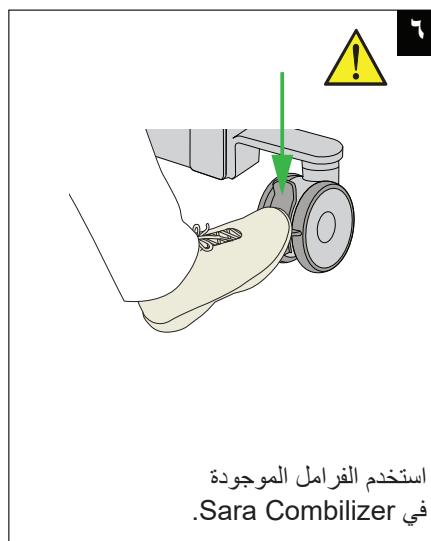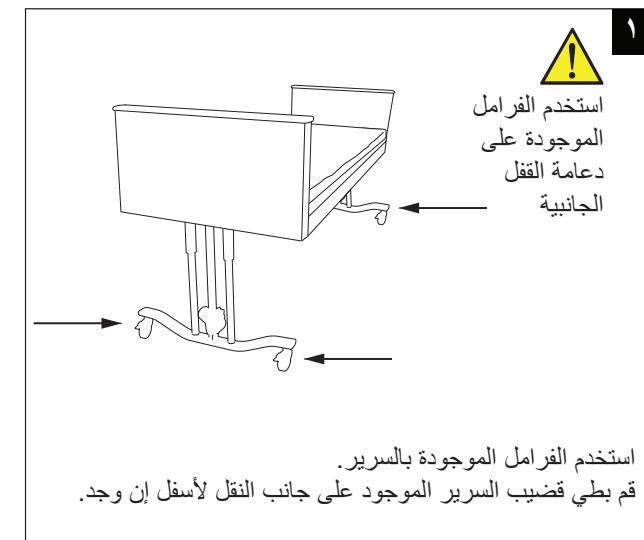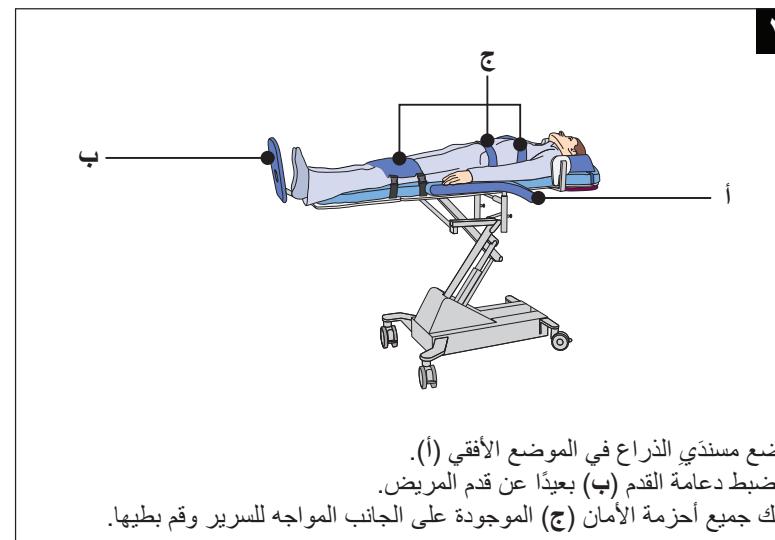

تابع الخطوات في الصفحة التالية

النقل من السرير (تابع)



من وضع الجلوس إلى وضع الوقوف

٤



قم بإمالة Sara Combilizer بحذر نحو جانب النقل بحيث يمكن أن تصل قدم المريض إلى الأرض.




قم بطي دعامة الكتف لأسفل وإزالة مساند الذراعين على جانب النقل.
فك جميع أحزمة الأمان.
قم بلف المريض بحذر إلى جانب النقل.

٣




تأكد من أن Sara Combilizer في وضع كرسي مستقيم وفي أقل ارتفاع له.

٢

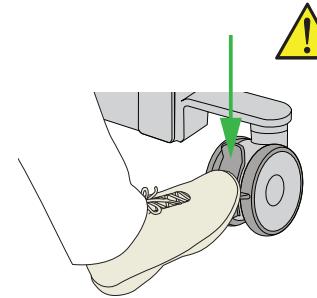


قم بتجهيز الأداة المساعدة ووضعها في مكان قريب. استخدم الفرامل الموجودة في Sara Combilizer.

١

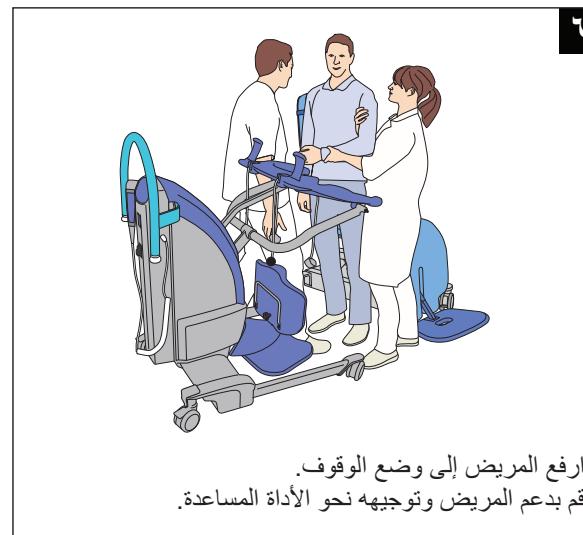

ارفع المريض إلى وضع الوقوف.
قم بدعم المريض وتوجيهه نحو الأداة المساعدة.

٦

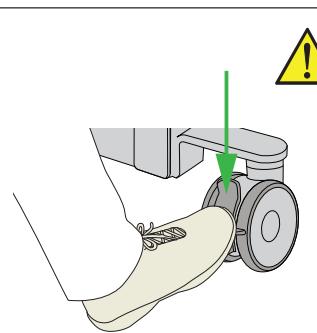

ضع الأداة المساعدة أمام المريض.
استخدم الفرامل الموجودة في الأداة المساعدة.

٥

من وضع الوقوف إلى وضع الجلوس

