

# Flowtron ACS900



CE  
2797

## 開始治療

**1**

為病患裝上加壓套。

**2**

發出喀嗒聲

將加壓套連接至幫浦。

**3**

按下中間控制按鈕即可開始。

## 停止治療

**1**

按住中間控制按鈕。

**2**

從幫浦斷開加壓套。

**3**

按住電源鈕可關閉幫浦。

## 閱讀病患運行時數 – 小時與分鐘 (來自軟體版本 2.210)

**1**

小時數值在幫浦開啟時顯示。(12 h)

**2**

按下右方控制按鈕可顯示分鐘。

**3**

分鐘數會顯示 5 秒 (-14 = 14 分鐘)。

小時數值恢復自動顯示。

壓縮時間 = 12 小時 14 分鐘。

## 重設病患運行時數 – 小時與分鐘

**1**

按住右方控制按鈕。

**2**

按住中間控制按鈕可重設為 0。

**3**

按下右方控制按鈕可儲存新設定。

## 變更警報音量設定

**1**

按下左方控制按鈕。

**2**

按下中間控制按鈕可變更音量。

**3**

按下左方控制按鈕即可儲存。