

Flowtron ACS900

CE
2797

Početak terapije

<p>1</p> <p>Postavite steznika na pacijenta.</p>	<p>2</p> <p>Priključite steznik na pumpu.</p>	<p>3</p> <p>Za početak pritisnite srednji kontrolni gumb.</p>
---	--	--

Prekid terapije

<p>1</p> <p>Pritisnite i držite srednji kontrolni gumb. 2 s</p>	<p>2</p> <p>Odvojite steznik od pumpe.</p>	<p>3</p> <p>Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili pumpu. 2 s</p>
--	---	--

Očitavanje vremena rada na pacijentu – sati i minute (iz verzije softvera 2.210)

<p>1</p> <p>Sati se prikazuju kad se uključi pumpa. (12 h)</p>	<p>2</p> <p>Pritisnite desni kontrolni gumb za prikaz minuta. 1 s 5 s</p> <p>Minute se prikazuju 5 sekundi. (-14 = 14 min).</p>	<p>3</p> <p>Prikaz sati vraća se automatski. Vrijeme kompresije = 12 sati, 14 minuta.</p>
---	--	--

Ponovno postavljanje vremena rada na pacijentu – sati i minute

<p>1</p> <p>Pritisnite i držite desni kontrolni gumb. 2 s</p>	<p>2</p> <p>Pritisnite i držite srednji kontrolni gumb za vraćanje na 0. 3 s</p>	<p>3</p> <p>Pritisnite desni kontrolni gumb da biste spremili novu postavku.</p>
--	---	---

Promjena postavke glasnoće zvučnog alarma

<p>1</p> <p>Pritisnite lijevi kontrolni gumb. 2 s</p>	<p>2</p> <p>Pritisnite srednji kontrolni gumb za promjenu glasnoće.</p>	<p>3</p> <p>Pritisnite lijevi kontrolni gumb za spremanje.</p>
--	--	---