

Flowtron ACS900



CE
2797

ကုသမှု စတင်ရန်

1

လျှာတင် အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။

2

“ကလစ်ပွဲပါ”

အဝတ်ကို ပန်/ဖွင့် ခံတွဲဆက်ပါ။

3

စတင်ရန် အလယ် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိပါ။

ကုသမှု ရပ်ရန်

1

အလယ် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိ၍ ပိတ်ထားပါ။

2

ပန်/ဖွင့် အဝတ်ကို ပိတ်ပါ။

3

ပန်/ဖွင့် ပိတ်ရန် ပါဝါခလုတ်ကို ဖိ၍ ပိတ်ထားပါ။

လျှာတင် ဝတ်ဆင်ထားသည့် အခါ တိုင်းတာကို ဖတ်ပါ- နာရီမီးခွင့် မိနစ်မီး (ဆော့ဖဲ ဖားရှင်း 2.210 မှ)

1

ပန်/ဖွင့် ပါဝါဖတ်လိုက်သည့်အခါ နာရီမီးကို ပြသသည်။ (12 နာရီ)

2

မိနစ်မီးပြသရန် ညာဘက် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိပါ။

မိနစ်မီးကို 5 စက္ကန့်/ ဖတ်ကာ ပြသပါသည်။ (-14 = 14 မိနစ်)

3

စတင် ဆက်လုပ်သည့် နာရီမီးကို အလိုအလျောက် ပြသထားပါသည်။

ဖိထားသည့် အခါ = 12 နာရီ 14 မိနစ်

လျှာတင် ဝတ်ဆင်ထားသည့် အခါ တိုင်းတာကို ပြန်သတ်မှတ်ပါ - နာရီမီးခွင့် မိနစ်မီး

1

ညာဘက် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိ၍ ပိတ်ထားပါ။

2

0 တင် ပြန်ထားရန် ညာဘက် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိ၍ ပိတ်ထားပါ။

3

သတ်မှတ်ခံအသစ်ကို သိမ်းရန် ညာဘက် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိပါ။

သတိပေးသံ အတိုးအက်ယူ သတ်မှတ်ခံကို ရှာဖွေပါ။

1

ဘယ်ဘက် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိပါ။

2

အသံအတိုးအက်ယူ ရှာဖွေရန် အလယ် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိပါ။

3

သိမ်းထားရန် ညာဘက် ထိန်းခံပွဲ၊ ခလုတ်ကို ဖိပါ။