

Flowtron ACS900



CE
2797

Iniciar a terapia

1

Ajuste o acessório ao paciente.

2

Ligue o acessório à bomba.

3

Prima o botão de Comando Central para iniciar

Parar a terapia

1

Prima continuamente o botão de Comando Central.

2

Desligue o acessório da bomba.

3

Prima continuamente o botão de alimentação para desligar a bomba.

Ler o temporizador de funcionamento do paciente – horas e minutos (a partir da versão de software 2.210)

1

As horas são apresentadas quando a bomba é ligada. (12 h)

2

Prima o botão de Controlo Direito para ver os minutos.

Os minutos são apresentados durante 5 segundos. (-14 = 14 min).

3

A apresentação das horas é retomada automaticamente. Tempo de compressão = 12 horas, 14 minutos.

Repor o temporizador de funcionamento do paciente — horas e minutos

1

Prima continuamente o botão de Controlo Direito.

2

Prima continuamente o botão de Controlo Central para repor para 0.

3

Prima o botão de Comando Direito para guardar a nova definição.

Alterar a configuração do volume do alarme sonoro

1

Prima o botão de Comando Esquerdo.

2

Prima o botão de Comando Central para alterar o volume.

3

Prima o botão de Comando Esquerdo para guardar.