

# Flowtron ACS900

CE  
2797

## Spustenie terapie

**1**

Pacientovi/klientovi nasadíte návlek.

**2**

Návlek pripojte k pumpe.

**3**

Na spustenie stlačte stredné ovládacie tlačidlo.

## Zastavenie terapie

**1**

Stlačte a podržte stredné ovládacie tlačidlo.

**2**

Návlek odpojte od pumpy.

**3**

Stlačením a podržaním napájacieho tlačidla vypnete pumpu.

## Vysvetlenie prevádzkového časovača pacienta/klienta – hodiny a minúty (od verzie softvéru 2.210)

**1**

Pri zapnutí pumpy sa zobrazujú hodiny. (12 h)

**2**

Stlačením pravého ovládacieho tlačidla zobrazíte minúty.

**3**

Minúty sa zobrazujú 5 sekúnd. (-14 = 14 minút).

## Obnovenie prevádzkového časovača pacienta – hodiny a minúty

**1**

Stlačte a podržte pravé ovládacie tlačidlo.

**2**

Stlačením a podržaním stredného ovládacieho tlačidla vynulujte.

**3**

Stlačením pravého ovládacieho tlačidla uložíte nové nastavenie.

## Zmena nastavenia hlasitosti zvukového alarmu

**1**

Stlačte ľavé ovládacie tlačidlo.

**2**

Stlačením stredného ovládacieho tlačidla zmeníte hlasitosť.

**3**

Stlačením ľavého ovládacieho tlačidla uložíte nastavenie.

