

Flowtron ACS900



CE
2797

Запуск лікування

1

Припасуйте манжету на пацієнті.

2

Приєднайте манжету до насоса.

3

Для запуску натисніть середню кнопку керування.

Припинення лікування

1

Натисніть і утримуйте середню кнопку керування.

2

Від'єднайте манжету від насоса.

3

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути насос.

Зчитування показань таймера лікування пацієнта — години і хвилини (з програмного забезпечення версії 2.210)

1

Години відображатимуться при увімкненні насоса. (12 год.)

2

Щоб відобразити хвилини, натисніть праву кнопку керування.

3

Хвилини відображатимуться протягом 5 секунд. (-14 = 14 хв).

3

Відображення годин буде відновлено автоматично. Час стиснення = 12 годин, 14 хвилин.

Скидання таймера лікування пацієнта — години і хвилини

1

Натисніть і утримуйте праву кнопку керування.

2

Натисніть і утримуйте середню кнопку керування, щоб здійснити скидання до нульового значення.

3

Натисніть праву кнопку керування, щоб зберегти нове налаштування.

Зміна налаштування гучності звукового сигналу тривоги

1

Натисніть ліву кнопку керування.

2

Натисніть середню кнопку керування, щоб змінити гучність.

3

Для збереження натисніть ліву кнопку керування.