

# Flowtron ACS900

CE  
2797

## 开始治疗

**1**

为患者戴上护套。

**2**

将护套连接至泵。

**3**

按中间的控制键启动。

## 停止治疗

**1**

按住中间的控制钮。

**2**

断开护套与泵之间的连接。

**3**

按住电源键关闭泵。

## 患者运行计时器解读 — 时分 (源自软件版本 2.210)

**1**

泵电源打开后，即会显示小时数（12 小时）。

**2**

按右边的控制键可显示分钟。

分钟数显示 5 秒 (-14 = 14 分钟)。

**3**

自动显示恢复的小时数。  
加压时间 = 12 小时，14 分钟。

## 患者运行计时器复位 — 时分

**1**

按住右边的控制键。

**2**

按住中间的控制键即会复位至 0。

**3**

按右边的控制键保存新设置。

## 更改声音报警音量设置

**1**

按左边的控制键。

**2**

按中间的控制键调节音量。

**3**

按左边的控制键保存。