


Flowtron ACS900



CE
2797

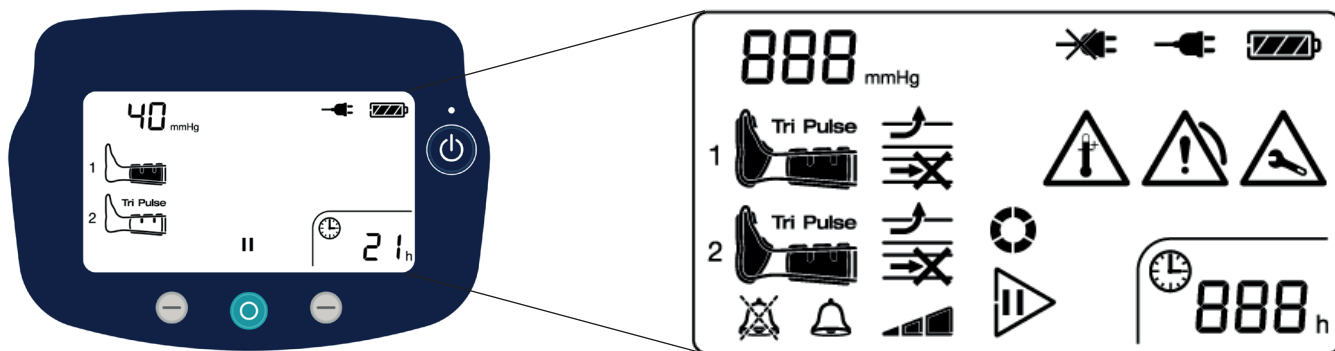

Κουμπί τροφοδοσίας και Ένδειξη τροφοδοσίας δικτύου

Κρατήστε παταταμένα για είσοδο στη λειτουργία Αναμονής. Η ένδειξη τροφοδοσίας δικτύου ενεργοποιείται. Κρατήστε παταταμένα για απενεργοποίηση. Η ένδειξη τροφοδοσίας δικτύου απενεργοποιείται.



Μεσαίο πλήκτρο ελέγχου

Πατήστε για να ξεκινήσετε τη θεραπεία. Πατήστε παταταμένα για να διακόψετε τη θεραπεία.



Αριστερό πλήκτρο ελέγχου

Πατήστε για σίγαση του ηχητικού συναγερμού. Κρατήστε παταταμένα για μετάβαση στις ρυθμίσεις έντασης ήχου.



Δεξιό πλήκτρο ελέγχου

Κρατήστε παταταμένα για είσοδο στη λειτουργία Επαναφοράς χρόνου λειτουργίας.

888 mmHg

Ένδειξη πίεσης ενδύματος



Ενδείξεις τύπου ενδύματος και πλήρωσης

Συνδεδεμένο χωρίς πλήρωση Συνδεδεμένο με πλήρωση



Πέλμα



Ενιαίο ένδυμα (DVT) κνήμης (ή κνήμης & μηρού)



Ακολουθιακό ένδυμα (Tri Pulse) κνήμης (ή κνήμης & μηρού)

1
2

Αριθμοί συνδέσμων συστήματος σωλήνων



Ένδειξη σίγασης ηχητικού συναγερμού



Ένδειξη κατάστασης ηχητικού συναγερμού

Κατά τη διάρκεια συναγερμού: υποδεικνύει ότι ο συναγερμός μπορεί να τεθεί σε σίγαση.



Ένδειξη έντασης ήχου



Ενδείξεις προειδοποίησης και συναγερμού

Ανιχνεύθηκε συναγερμός που μπορεί να προκαλέσει διακοπή της θεραπείας.



Χαμηλή πίεση ή διαρροή ενδύματος.



Συστροφή ή φραγή του συστήματος σωλήνων.



Υψηλή θερμοκρασία.



Ανιχνεύθηκε βλάβη υλικού ή απαιτείται περιοδική τεχνική συντήρηση.



Ένδειξη αναμονής/αρχικής προσαρμογής



Ένδειξη έναρξης θεραπείας

Εμφανίζεται στη λειτουργία Αναμονής όταν είναι συνδεδεμένο τουλάχιστον ένα ένδυμα.



Ένδειξη διακοπής θεραπείας

Εμφανίζεται στην Κατάσταση λειτουργίας.

Ενδείξεις τροφοδοσίας δικτύου



Η αντλία είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος δικτύου.



Η αντλία ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος δικτύου.



Ένδειξη μπαταρίας



Μπαταρία άδεια



Μπαταρία 1/4 πλήρης



Μπαταρία 1/2 πλήρης



Μπαταρία 3/4 πλήρης



Μπαταρία πλήρης



Ένδειξη χρόνου λειτουργίας