

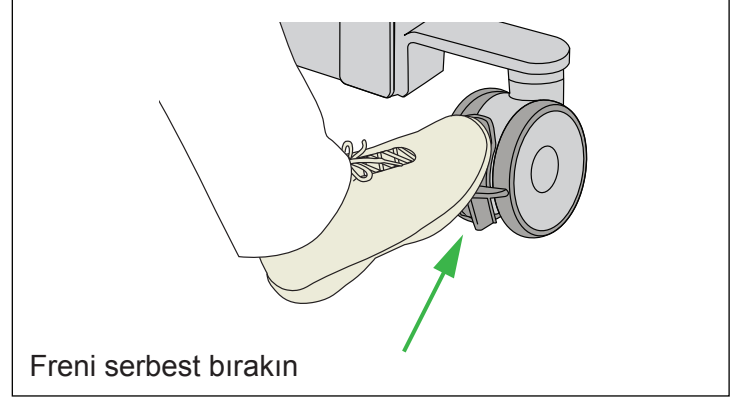
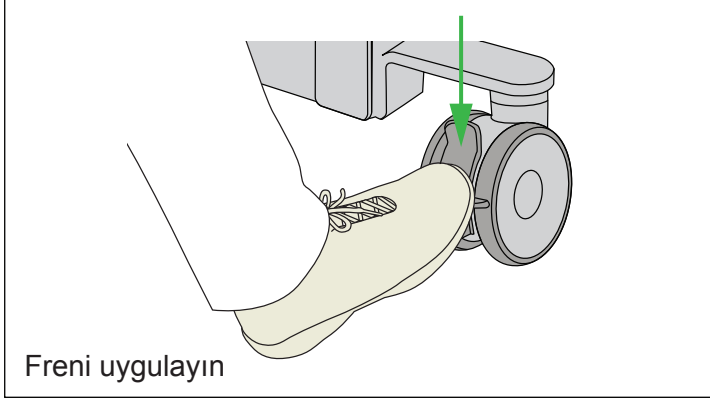



Freni uygulayın ve serbest bırakın

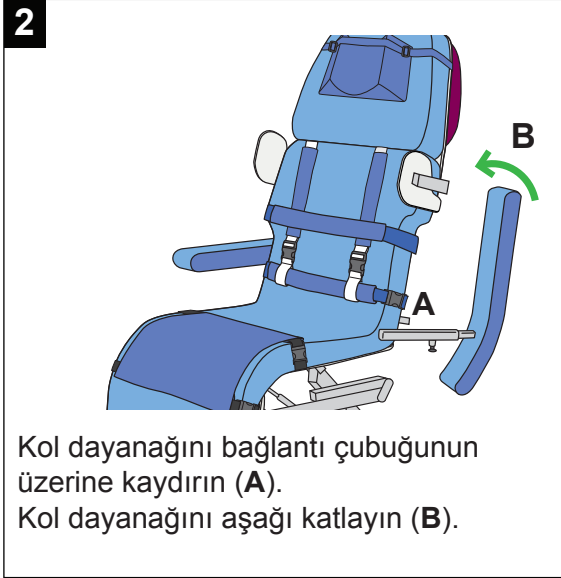


Kol dayanağını takın

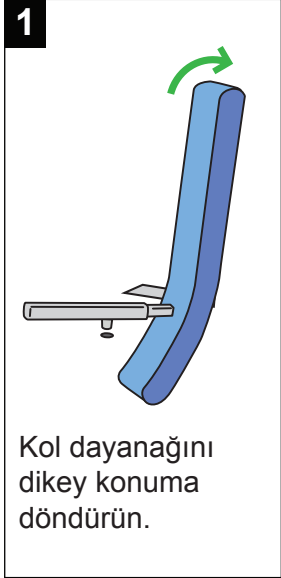



Kol dayanağı yüksekliğini ayarlayın

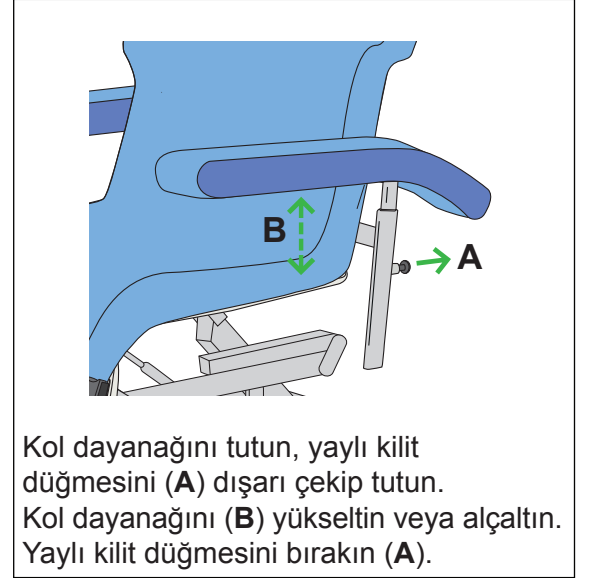


Kol dayanağı genişliğini ayarlayın

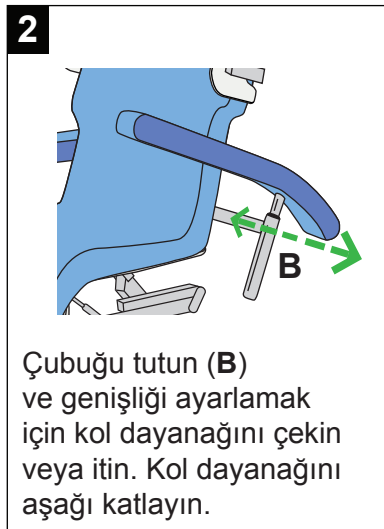

Kol dayanağını sökün

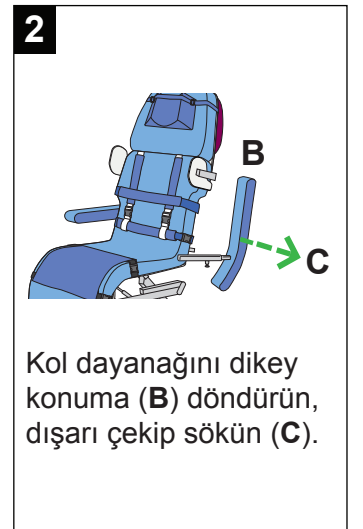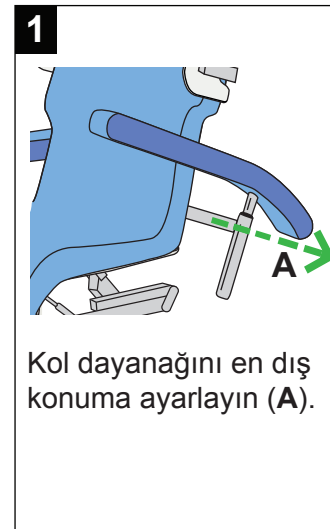


Ayak desteği uzunluğunu ayarlayın

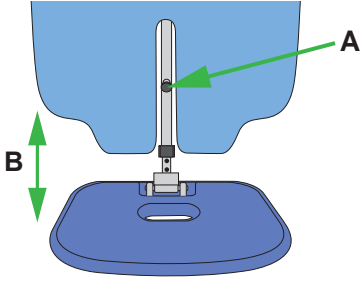


Yaylı kilidi (A) dışarı çekin.
Ayak destek plakasını
yükseltin veya alçaltın (B).
Yaylı kilit düğmesini bırakın (A).
İterek ve çekerek sabitleyin.

Ayak desteğinin ilave uzunluğunu ayarlayın

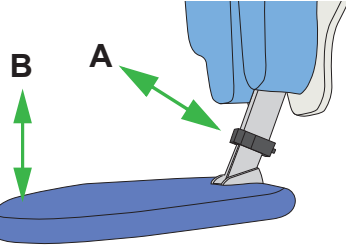


Mandalı ileri doğru çekin (A).
Ayak plakasını yükseltin
veya alçaltın (B).
Mandalı bırakın (A).
İterek ve çekerek sabitleyin.

Ayak desteğini sökün

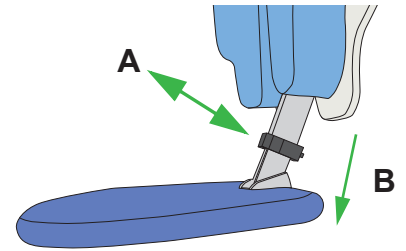


Mandalı ileri doğru çekin (A).
Ayak plakasını sökün (B).
Mandalı bırakın (A).

Omuz desteği genişliğini ayarlayın

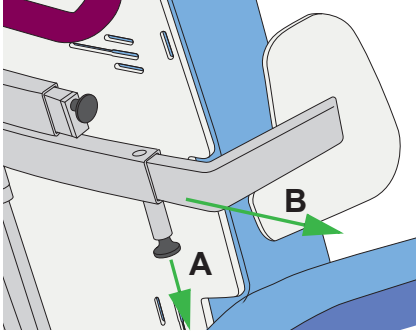


Yaylı kilidi (A) dışarı çekin.
Omuz desteğini konumlandırın (B).
Yaylı kilidi bırakın (A).
İterek ve çekerek sabitleyin.

Omuz desteğini indirin

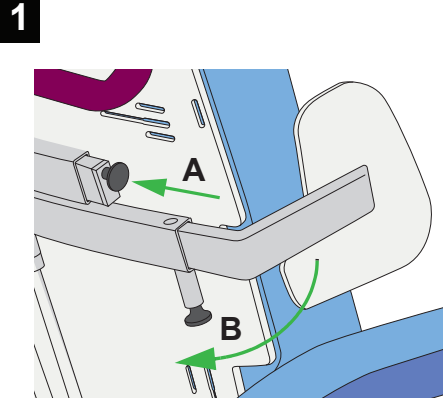


1
Sağ tarafta yaylı kilidi içeri itin (A).
Omuz desteği (B) aşağı katlanır.

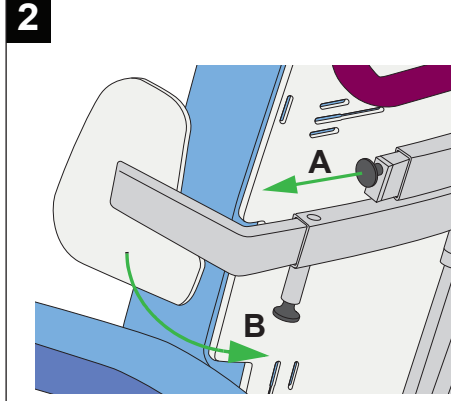


2
Sol tarafta yaylı kilidi (A)
dışarı çekin.
Omuz desteği (B) aşağı
katlanır.

Omuz desteğini yukarı katlayın

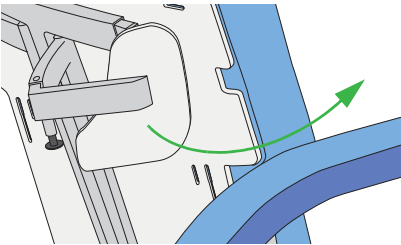


Omuz desteğini yerine
kilitlenene kadar kaldırın.
İterek ve çekerek sabitleyin.

Batarya

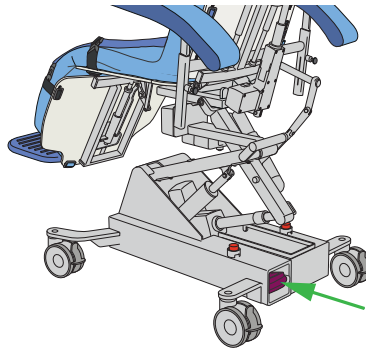


Batarya, Sara Combilizer'ın
arkasındadır.

Bataryayı çıkarın

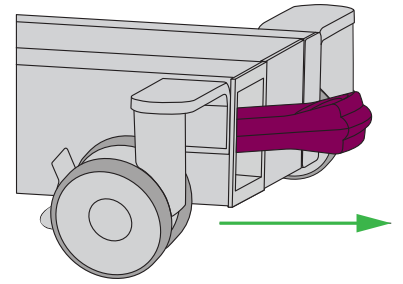


Bataryayı düz bir şekilde
dışarı çekin.


Şilte

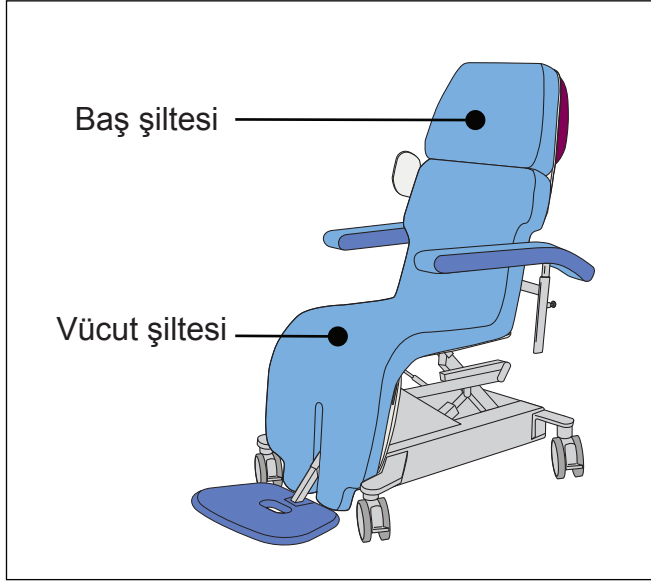


Şilte takma kayışları

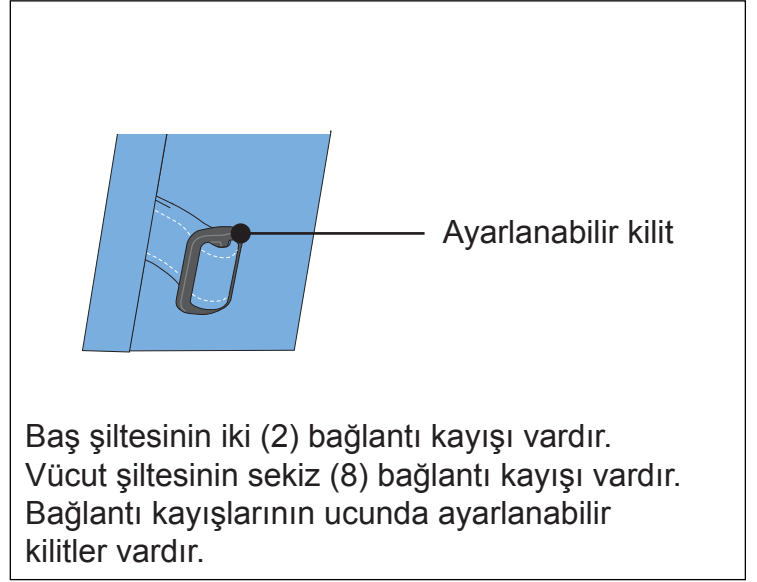

Şilte bağlantı noktaları

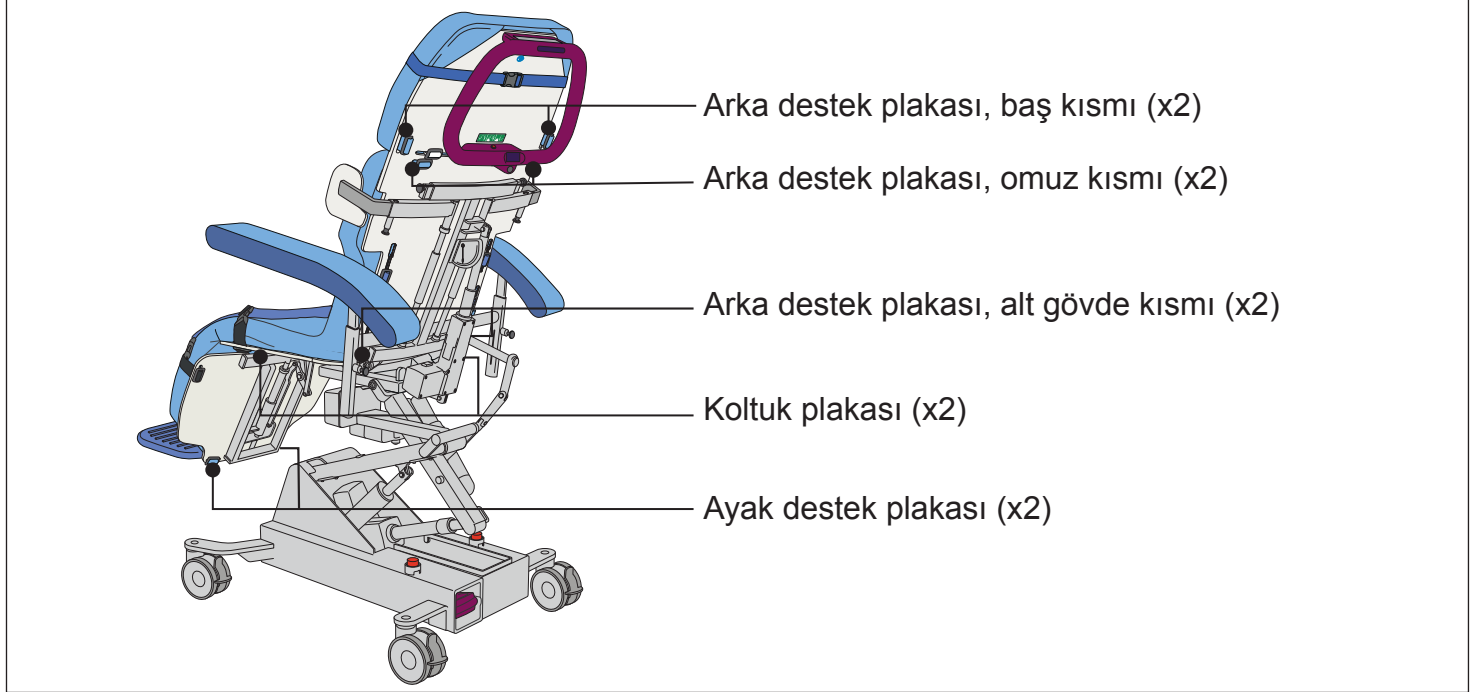

Şilte bağlantı kayışını takın

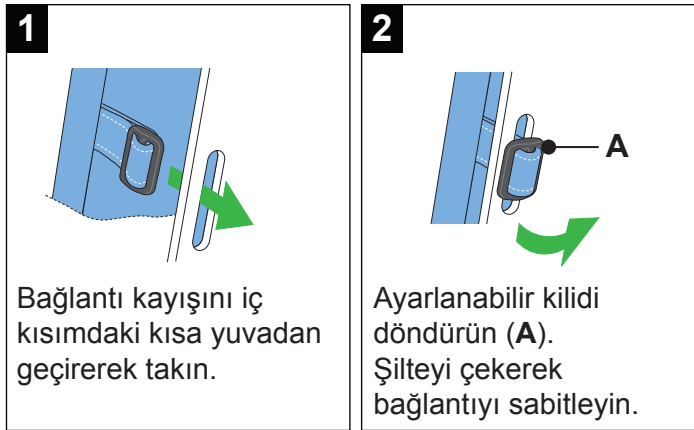

Şilte bağlantı kayışını sökün

